


Snabbguide, kontrollpanel

MagniLink Vision Basic 5 push

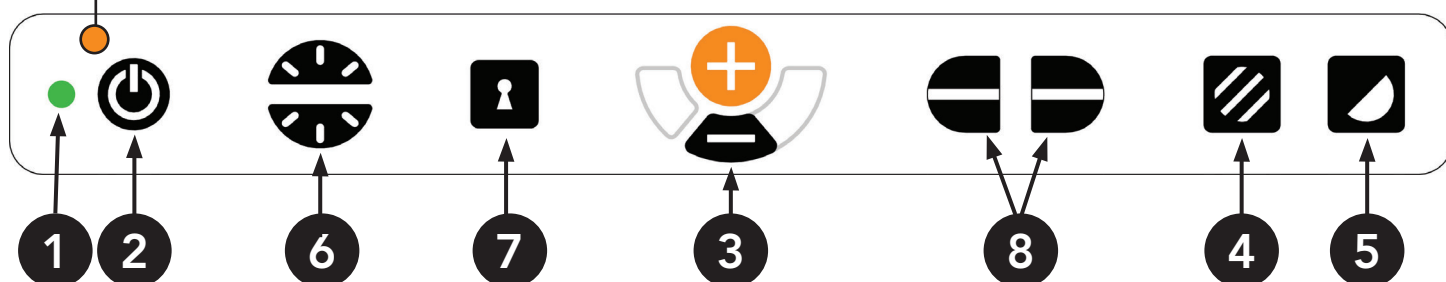

Kontrollpanelens funktioner

- | | |
|--|---|
| 1 Lysdiod (grönt = apparaten igång) | 5 Högonkontrastläge med artificiella färger |
| 2 Strömställare (till/från) | 6 Ljusreglage |
| 3 Förstoringsreglage (+/-) | 7 Autofokus (av/på) |
| 4 Fotoläge/gråskala
(eller ljusjustering) | 8 Referenslinje/kuliss |

Kontakta LVI Low Vision International per tel 0470-72 77 00 eller support@lvi.se om du behöver hjälp med din produkt. Läs mer om våra produkter på: www.lvi.se