




Dolphin

SuperNova

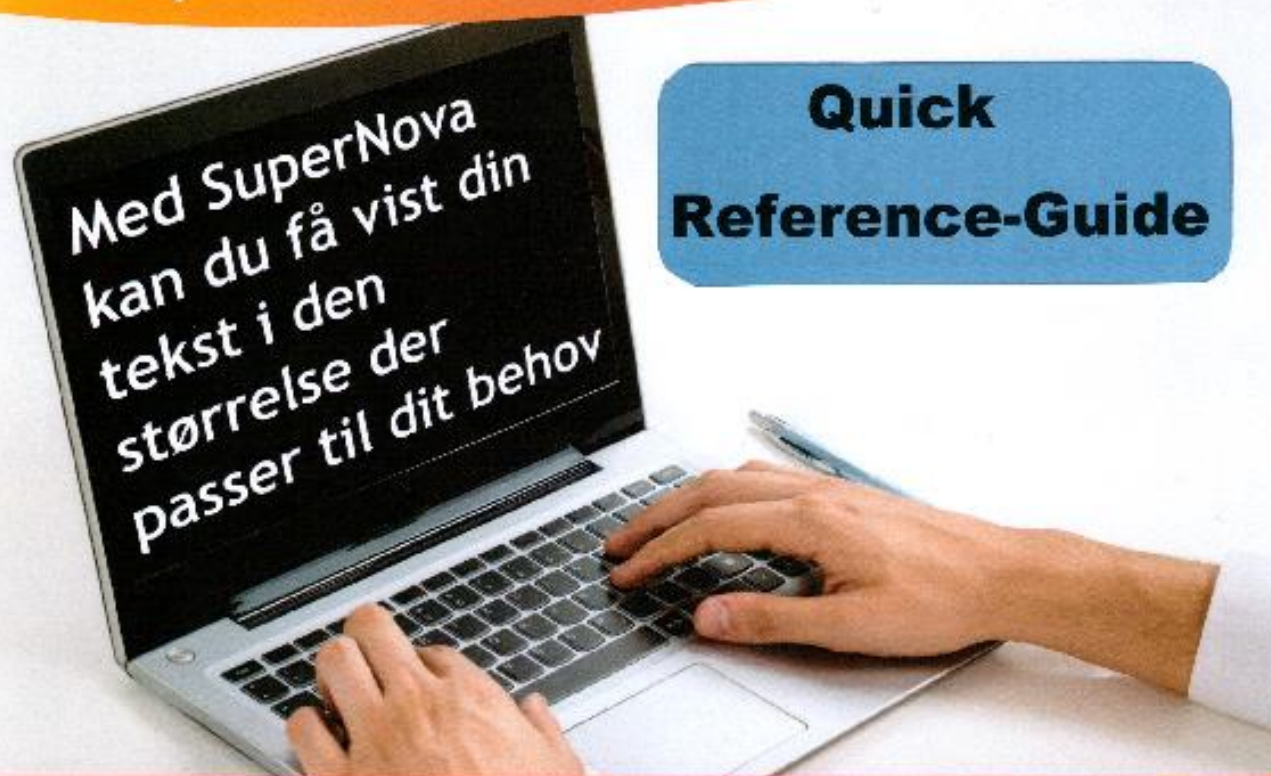

Quick Reference-Guide

Den bedste kombination af forstørrelse og oplæsning, der giver uovertruffen adgang til Windows-tablets, bærbare- og stationære computere.

Fås i 3 udgaver, der passer til dit synsniveau:

- ★ Forstørrelse
- ★ Forstørrelse & Tale
- ★ Forstørrelse & Skærmlæser



For flere informationer kontakt
LVI Danmark:



lvi.dk



info@lvi.dk



Dolphin

Assistive technology for life

Dolphin SuperNova

Reference-guide over genvejstaster

Genvejstaster for desktop, bærbare og touch-skærme

Disse oplysninger er til rådighed i forskellige formater på www.YourDolphin.com

Introduktion

Denne brochure indeholder en liste over de nyttigste genvejstaster til kontrol af de tre versioner af Dolphin SuperNova:

- Forstørrelse
- Forstørrelse og Tale
- Forstørrelse og Skærmlæser

En liste med alle genvejstasterne til dit SuperNova-program findes i brugermanualen. For at åbne manualen skal du trykke F1 eller klikke på Hjælp-knappen i SuperNova-kontrolpanelet. Hvis du vil have kontekstafhængig hjælp og en liste over de genvejstaster, som er til rådighed, mens du bruger et program, skal du trykke CAPSLOCK + F1, mens du står i dit program.

De fleste brugere foretrækker Dolphins standardsæt af genvejstaster, eftersom de mest populære talekommandoer kan nås med et enkelt tastetryk. Når en genvejstast indeholder "NUMERISK", betyder det, at tasten sidder i det numeriske tastatur, som er en blok af taster, som regel i højre side af tastaturet. På en bærbar computer er de numeriske taster som regel til rådighed, når man holder FN-tasten nede. Hvis det numeriske tastatur ikke er til rådighed eller er svært at bruge, anbefaler vi, at man bruger tastaturlayoutet for bærbare computere. Gennem hele dette dokument vil bærbare tastetryk, som er forskellige fra det stationære tastatur-layout, blive vist i firkantede parenteser.

Valg af tastaturlayout og genvejssæt

Mens SuperNova kører, skal du åbne Super-Nova-kontrolpanelet ved at holde VENSTRE-CONTROL nede og trykke på MELLEMRUM. Tryk så ALT + G for at åbne Generelt-menuen, og tryk T for at åbne dialogen Tastatur og genvejstaster, hvor du kan vælge tastaturlayout, tastatursprog og dit foretrukne sæt af genvejstaster. Tryk OK for at gemme eventuelle ændringer og lukke dialogen.

Kom i gang med SuperNova

Start SuperNova

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

SuperNova: CONTROL + SHIFT + S

Demo-installation (hvis side om side med en fuld installation): CONTROL + SHIFT + D

Generelt

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Åbn SUPERNOVA kontrolpanel: VENSTRE-CONTROL MELLEMRUM

Afslut SuperNova: ALT + F4

Dolphin hjælp: CAPSLOCK + F1

Lad næste tastetryk komme igennem til Windows: VENSTRE-CONTROL + 7 [CAPSLOCK + 3]

Forstørrelse

Indstillinger for forstørrelse

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Forstørrelse til/fra: VENSTRE-CONTROL + NUMERISK ENTER [VENSTRE-ALT + 0]

Større: VENSTRE-CONTROL + NUMERISK PLUS [VENSTRE-ALT + ACCENT-AIGU]

Mindre: VENSTRE-CONTROL + NUMERISK MINUS [VENSTRE-ALT + PLUS]

Panorering: HØJRE-CONTROL + PIL-OP / PIL-NED / HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL

Visning (fuld skærm/opdelt skærm/låst vindue/forstørrelsesglas/tilpasset linse): VENSTRE-CONTROL + NUMERISK 7 [ALT + SHIFT + M]

Farveskema til/fra: VENSTRE-CONTROL + Numerisk 0 [ALT + SHIFT + C]

Linjevisning

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Start linjevisning fra markør: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + NUMERISK 2 [ALT + SHIFT + L]

Start/stop rulning: MELLEMRUM

Ændring af rullehastighed: PIL-OP/PIL-NED

Spring fremad/tilbage: HØJRE-PIL/VENSTRE-PIL

Afslut linjevisning: ESCAPE

Flere skærme

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Skift skærm: CAPSLOCK + MIDTERSTE MUSEKNAP

Windows-kommando til at flytte programmer mellem skærme: WINDOWS-tast + SHIFT + VENSTRE-PIL/HØJRE-PIL

Tale

Taleindstillinger

(Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Tale til/fra: VENSTRE-CONTROL + 0 [ALT + CONTROL + 0]

Højere: VENSTRE-CONTROL + PLUS [VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + ACCENT-AIGU]

Lavere: VENSTRE-ALT + PLUS [VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + PLUS]

Hurtigere: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + PLUS [VENSTRE-CONTROL VENSTRE-ALT + SIDE-OP]

Langsommere: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + PLUS [VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + SIDE-NED]

Næste talesyntese: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + Å

Næste sprog: VENSTRE-CONTROL + PUNKTUM

Afbryd tale: VENSTRE-CONTROL

Læs tekst

(Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Tryk på disse taster flere gange for at stave eller høre yderligere oplysninger.

Tegn: NUMERISK 4 [CAPSLOCK + VENSTRE-PIL]

Ord: NUMERISK 5 [CAPSLOCK + HØJRE-PIL]

Linje: NUMERISK 6 [CAPSLOCK + PIL-OP]

Mere tekstlæsning

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Tryk flere gange for at stave eller høre yderligere oplysninger.

Valgt tekst: NUMERISK 1 [SHIFT + CAPSLOCK + PIL-NED]

Linje til markør: VENSTRE-SHIFT + NUMERISK 1 [CAPSLOCK + HOME]

Linje fra markør: VENSTRE-SHIFT + NUMERISK 2 [CAPSLOCK + END]

Læsning af dokumenter

(Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Læs herfra: NUMERISK PLUS [CAPSLOCK + PIL-NED]

Klik og Læs herfra: MIDTERSTE MUSSEKNAP

Stop Læs herfra: VENSTRE-CONTROL

Åbn Dok-læservindue: CAPSLOCK + NUMERISK PLUS [ALT + SHIFT + D]

Læs dele af vinduer

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Hele vinduet: NUMERISK 9 [CAPSLOCK + B]

Fokus: NUMERISK 0 [CAPSLOCK + PIL-OP]

Statuslinje: NUMERISK 2 [CAPSLOCK + PAGE-DOWN]

Hvor er jeg? (Vinduestitel og Fokus): NUMERISK 7 [CAPSLOCK + PAGE-UP]

Flere talekommandoer

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Tastaturhjælp til/fra: CAPSLOCK + STREG [CAPSLOCK + 1]

Tid og dato: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + NUMERISK SKRÅSTREG [CAPSLOCK + F12]

Batteristatus: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + NUMERISK PLUS [SHIFT + CAPSLOCK + B]

Indstillinger for annoncering

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Under skrivning (tegn/ord/begge/ingen): CAPSLOCK + Æ [CAPSLOCK + 2]

Informationsniveau for tale (lav/mellem/høj): CAPSLOCK + PLUS [CAPSLOCK + V]

Touch-skærme

Touch-bevægelser

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Flyt forstørrelse rundt på skærmen: Glid med én finger i en hvilken som helst retning

Udtal tekst ved din fingers placering (ikke i SuperNova Forstørrelse): Tryk og hold med én finger

Forøg forstørrelse: Stræk med to fingre

Formindsk forstørrelse: Skub sammen med to fingre

Vis/skjul SuperNova touch-bjælke: Enkelt-tryk med tre fingre

Forstørrelse til/fra: Dobbelt-tryk med tre fingre

Dolphin-markør

Dolphin-markøren giver adgang til programmer med tastaturet, selv hvis det egentlig kræver en mus. Taster til skærmlæsning er fortsat til rådighed, når Dolphin-markøren er slået til. Dit Dolphin-program slår automatisk Dolphin-markøren til i programmer som f.eks. web-browsere, når den normale programmarkør er begrænset eller ikke er til rådighed. Du kan ændre denne automatiske opførsel fra Dolphin-kontrolpanelet i dialogen Tale > Avancerede indstillinger.

Dolphin-markør

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Dolphin-markør til/fra: NUMERISK MINUS [CAPSLOCK + Z]

Flyt Dolphin-markør til programmarkør: NUMERISK STJERNE [CAPSLOCK + PLUS]

Navigere og vælg med Dolphin-markøren

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Hvis du vil vælge tekst med Dolphin-markøren, skal du lægge SHIFT til de følgende kommandoer. Tryk så:

CONTROL + C for at kopiere teksten til udklipsholderen.

Næste/forrige tegn eller linje: PILETASTER

Næste/forrige ord: VENSTRE-CONTROL + HØJRE/VENSTRE-PIL

Start/slut på linje: HOME/END

Start/Slut på dokument eller vindue: VENSTRE-CONTROL HOME/END

Næste/forrige objekt f.eks. links eller felter: TAB / SHIFT + TAB

Næste/forrige vindue: VENSTRE-CONTROL + TAB / VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + TAB

Flyt en celle ad gangen i en tabel: CAPSLOCK + PILETASTER [VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + PILETASTER]

Hurtignavigationstaster til Dolphin-markør

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Når du læser websider, kan du bruge disse taster for at gå til næste emne. Tilføj SHIFT for at gå til forrige emne.

ARIA-landmærke: Æ

Overskrift: H

Specifikt overskriftsniveau: 1-6

Afsnit: P

Tabel: T- t: Tabel

Link: K

Redigeringsområde: E

Knap: B

Radioknap: R

Checkboks: X

Der er flere hurtignavigationstaster til rådighed, som kan hjælpe dig med at komme rundt på websider og i andre programmer. Tryk på CAPSLOCK + F1 mens du står i et program for at få den fulde liste over de genvejstaster, som er til rådighed.

Musekontrol med Dolphin-markøren

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Venstre-klik på det aktuelle link eller felt: INSERT [CAPSLOCK + 8]

Højre-klik på det aktuelle link eller felt: DELETE [CAPSLOCK + 9]

Flyt musemarkør til Dolphin-markør: HØJRE-CONTROL + DELETE [CAPSLOCK + ACCENT-AIGU]

Træk med venstre musseknap: HØJRE-CONTROL + HOME [CONTROL + CAPSLOCK + 8]

Træk med højre musseknap: HØJRE-CONTROL + HØJRE-SHIFT + HOME [CONTROL + CAPSLOCK + 9]

Slip: HØJRE-CONTROL + END [CONTROL + CAPSLOCK + 7]

Objektfinder

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser)

Bemærk: Nogle lister er kun til rådighed i udvalgte Office-programmer og web-browsere.

Åbn objektfinderen: CAPSLOCK + TAB

Overskrifter: CAPSLOCK + 2 [CAPSLOCK + F6]

Links: CAPSLOCK + 1 [CAPSLOCK + F7]

Ikoner i systembakken: CAPSLOCK + 0 [CAPSLOCK + F11]

Braille

(Forstørrelse og Skærmlæser)

Braille til/fra: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + 0 [CONTROL + CAPSLOCK + 0]

Braille informationsniveau: VENSTRE-SHIFT + CAPSLOCK + PLUS [CONTROL + CAPSLOCK + V]

Braille-kommandoer er knyttet til tasterne på dit punktdisplay. De er afhængige af mærke og model. Brug tastaturhjælp til at finde ud af funktionen af knapperne på netop dit punktdisplay.

Hvordan du får support til dit SuperNova-program

Tryk på CAPSLOCK + F1 i et hvilket som helst program, Word Outlook osv., og SuperNovas online-hjælp giver dig grundlæggende tips og vejledning så vel som nyttige genvejstaster, både til programmet og til SuperNova selv.

Dolphins webside indeholder også en række hjælperessourcer, herunder træningsvideoer, vejledninger til SuperNova samt en videns base, som bliver regelmæssigt opdateret. Besøg www.YourDolphin.com/support

Hvis du har brug for yderligere support, har Dolphin et dedikeret supporthold, som er trænet til at hjælpe dig med dine SuperNova-spørgsmål.

UK og resten af verden:

Tlf.: +44 (0)1905 754765

Email: support@yourdolphin.com

Nordamerika:

Tlf.: 1 888 519 4694

Email: supportus@yourdolphin.com

Hvis du har købt SuperNova hos en af Dolphins internationale forhandlere, så kontakt venligst din forhandler for support. Besøg www.YourDolphin.com/dealers for at finde din nærmeste SuperNova-forhandler.

www.YourDolphin.com



LVI DANMARK

Hørkær 24, st. tv.
2730 Herlev

Telefon: 57 67 20 99

Mail: info@lvi.dk

Web: www.lvi.dk