

MagniLink S

Premium Series



- **Incroyable qualité d'image Full HD** – pour moniteurs et ordinateurs
- **Puissant logiciel TTS Text to Speech** pour PC et Mac – numérise une lettre A4 en quelques secondes
- **Totalement compatible** avec SuperNova et ZoomText

MagniLink S Premium

MagniLink S – selon vos besoins

MagniLink S est un téléagrandisseur apprécié dans le monde entier. Il offre un design récompensé dans le cadre du reddot award, une qualité d'image supérieure, une technologie de pointe et des fonctions intelligentes. Il se transporte facilement, par exemple entre la maison et l'école ou le bureau - et peut être connecté à un ordinateur (PC/Mac/Chromebook) ou à un moniteur. Vous pouvez ainsi choisir les fonctions et les options qui correspondent à vos besoins.



reddot design award

2 Fonctions et Accessoires

Un puissant logiciel TTS pour la synthèse vocale

Avec TTS (Text to Speech), MagniLink S convertit un texte imprimé en fichier audio. Le texte converti peut également être présenté à l'écran de différentes façons (voir page 8-9) ou enregistré dans un fichier sur votre ordinateur pour être modifié ultérieurement. Une page A4 peut être convertie en une fois.

Des voix sont incluses pour votre langue maternelle, plus une autre langue (selon le pays). D'autres voix peuvent être ajoutées. Nous vous recommandons également de vous équiper d'écouteurs.



Station d'accueil intuitive

Une station d'accueil avec pré-câblage permet de se raccorder facilement et rapidement à un PC, à un Mac, à un Chromebook ou à un moniteur - MagniLink S est aussi bien fixe que portable. Boîtier de commande externe, câble pour moniteur et adaptateur externe sont inclus. La station d'accueil est disponible avec table X/Y ou support de bureau. La table X/Y intègre un support pivotant, des freins à friction dans les directions X/Y et gère les documents jusqu'à la taille A3.



Pour gauchers
et droitiers

Boutons tactiles



Écran divisé

Avec le kit de répartition (boîtier de répartition, boîtier de commande externe et câbles de répartition), l'image de l'écran peut être partagée avec un PC/Mac/Chromebook connecté et/ou une caméra à distance. Idéal pour les environnements scolaires ou professionnels. LVI propose également une caméra à distance externe avec caméra SD ou HD à poser sur la table ou à fixer au mur ou au plafond.



1 Choix de base

HD ou Full HD ?

MagniLink S est disponible avec une caméra HD ou Full HD dernière génération. Les deux technologies offrent une image de qualité supérieure, mais la caméra Full HD offre :

- des textes et des images avec encore plus de détails et une image d'une précision extrême en mode lecture comme à distance
- agrandissement de départ encore plus faible, offrant un meilleur aperçu des documents à numériser et permettant le traitement OCR d'une page A4 (avec fonction TTS en option)

Accessoires supplémentaires

LVI propose également des moniteurs basse vision (18,5" or 23") avec base ou bras, des boîtiers de commande à distance avec/sans pince pour table et plus encore.



MagniLink S est disponible avec une technologie Full HD de point, offrant la meilleure qualité d'image possible.

MagniLink S Premium

Un design modulaire adaptable

Le design modulaire de MagniLink S assorti de nombreux accessoires astucieux apporte des solutions à chaque utilisateur. Proposé avec divers types de caméras, de raccords et de fonctionnalités, MagniLink S répondra aux besoins des utilisateurs, qu'il soit utilisé à la maison, à l'école ou au bureau – ou partout où vous irez !

Connexion à un moniteur



Connexion à un PC, Mac ou Chromebook



Écran divisé



TTS Text To Speech sur PC au Mac



Plug & play!

Le MagniLink S peut être raccordé à n'importe quel moniteur. Il est idéal pour travailler ou se divertir. Il vous permet de lire un rapport ou de réaliser des albums. Relisez un document ou partagez des photos. Vous pouvez même vous voir en "mode miroir".

MagniLink S est fourni avec un connecteur HDMI, un panneau de contrôle intégré et il occupe très peu d'espace.



MagniLink S Premium

Toujours **disponible**

MagniLink S est également une solution idéale pour les étudiants ayant besoin d'un système portable et abordable, pouvant être raccordé à un PC, Mac ou à un Chromebook avec son connecteur USB 3.0.

Il est parfaitement adapté pour lire les livres et les documents. Suivez les cours sur le tableau blanc, puis prenez un instantané pour l'étudier plus tard. Vous pouvez contrôler toutes les fonctions avec le clavier de votre ordinateur.



Les pieds supports rétractables permettent de placer le système à proximité d'un ordinateur portable, pour gagner de la place sur le bureau.




Toujours **présent**

MagniLink S est constamment mis à jour pour une compatibilité totale avec les systèmes d'exploitation les plus récents pour PC, Mac et Chromebook. Son logiciel pour PC et Mac est également conçu pour fonctionner avec des logiciels basse vision externes tels que SuperNova et ZoomText.

C'est une caractéristique indispensable, car les utilisateurs de téléagrandisseurs ont souvent besoin d'avoir les fonctions correspondantes dans leur ordinateur.

Rendez-vous sur www.lvi.ch/fr/produits/logiciels_ordinateur pour plus d'informations et pour des versions de démonstration gratuites de plusieurs utilitaires - ou scannez le code QR.

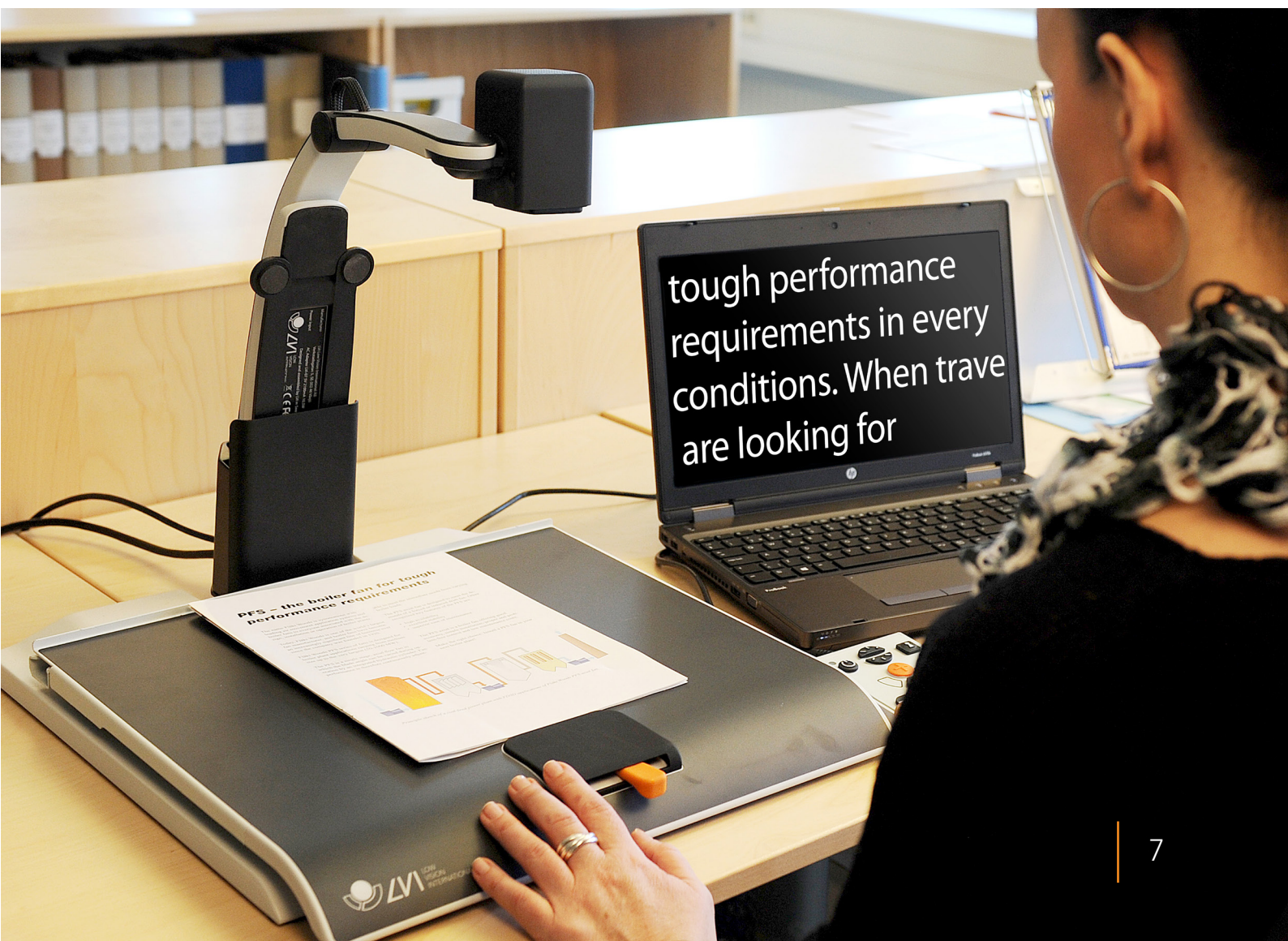

MagniLink S Premium TTS


Une lecture **toujours** efficace

Pour les utilisateurs de PC et de Mac MagniLink S TTS (Text To Speech) offre de nombreuses fonctions, dont la synthèse vocale.

Pouvoir écouter un texte lu à haute voix améliore la vitesse et l'endurance de lecture. Le texte est lu ligne par ligne, mot par mot ou caractère par caractère et peut s'afficher sur l'écran, synchronisé avec la voix.

Le texte peut également être enregistré et ouvert dans un éditeur de texte afin d'être relu ou traité. Une page A4 peut être numérisée en une fois et à l'aide des commandes du clavier, vous pouvez numériser plusieurs pages en quelques secondes, rapidement et efficacement.

Couleurs, contrastes et grossissement peuvent être modifiés pendant la lecture du texte ou pendant son défilement

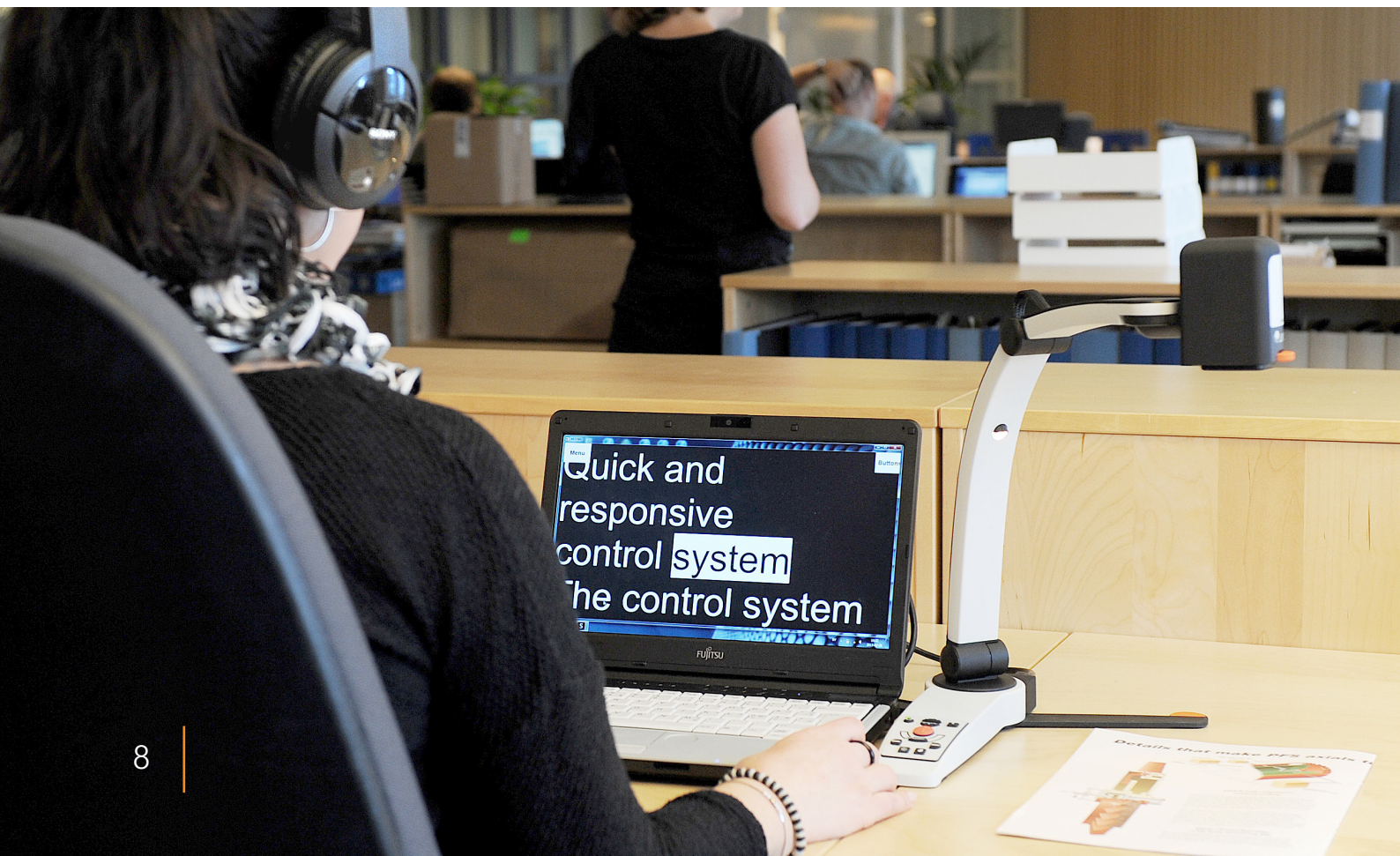

à l'écran en mode silencieux. Il est également possible de brancher des écouteurs si vous ne voulez pas déranger ou être dérangé par votre entourage pendant l'écoute.

MagniLink S TTS est simple d'utilisation, en partie grâce aux menus à synthèse vocale intégrale. Les langues disponibles sont : le Flamand, le Néerlandais, le Danois, l'Anglais britannique, américain et

australien, le Russe, le Finnois, le Français, l'Italien, l'Allemand, le Norvégien, le Polonais, le Portugais, l'Espagnol et le Suédois.



The Page mode,
displays text as a
page with automatic
line breaks.

1 Mode colonne

This is **line** mode

2 Mode ligne

word

3 Mode mot

This is silent mode

4 Mode silencieux

Les modes 2 à 4 conviennent aux utilisateurs souffrant de dégénérescence maculaire.

MagniLink S Premium



Simple à mettre en place et à déployer

MagniLink S est toujours accessible. Il s'installe et il est prêt à l'emploi pratiquement en quelques secondes. Installez le système à droite ou à gauche de l'ordinateur portable. Bien conçu, il est polyvalent et il résiste aux impacts.

Détails essentiels - couleurs LVI

Les détails colorés sur le produit et le sac de transport indiquent où saisir les différentes parties lors de l'utilisation et de la mise en place du système.

Alimenté par l'ordinateur

L'utilisateur n'aura jamais à se préoccuper de la puissance de la batterie ou des chargeurs de batterie égarés.

Un sac de transport astucieux, deux-en-un

Très pratique, MagniLink S possède un sac de transport deux-en-un, disposant de suffisamment de place pour y loger l'appareil, un ordinateur portable de 15,4" et les accessoires. Le sac intérieur amovible peut être utilisé séparément ou glissé facilement dans un sac à dos.





Image d'excellente qualité

Absence d'effet de rémanence grâce aux 60 images/seconde (entièrement numériques). Luminosité et contraste élevés (objectif sensible à la lumière de haute qualité). Connexion HDMI et haute résolution progressive HD/ Full HD pour une image nette et sans scintillement. Ce qui se traduit par une image de qualité supérieure et inégalée.

La technologie de pointe

Connexion USB 3.0 super rapide - dix fois plus rapide et compatibilité descendante avec USB 2.0. Connexion HDMI au moniteur - pour un branchement rapide et stable.

Des matériaux de haute qualité

Construction en fonte d'aluminium et en matériaux plastiques innovants, alliée à une technologie de pointe, y compris l'objectif de la caméra. Toutes les pièces sont conçues dans un souci de durabilité et de recyclage.



MagniLink S Premium



Un encombrement réduit au minimum

Les pieds supports rétractables vous permettent d'installer MagniLink S à côté d'un ordinateur portable ou sur un petit bureau.

Fonction périscopie

La fonction périscopie est pratique avec une caméra à distance car elle réhausse la ligne de visée.

Hauteur de travail dégagée

Leader sur le marché avec sa hauteur de lecture de 31 cm, il permet de tourner les pages des livres et des classeurs volumineux.

Rotation de caméra polyvalente

La tête de la caméra peut pivoter à 330° (horizontalement) et presque à 300° (verticalement), ce qui permet de passer rapidement au mode lecture, à distance et au mode miroir.

PC/Mac/Chromebook

Le logiciel pour PC et Mac est inclus avec chaque MagniLink S Computer système. Le logiciel pour Chromebook est facilement téléchargé de Chrome Web Store.

Compatibilité

MagniLink S est compatible avec les logiciels d'assistance tels que ZoomText, SuperNova, iZoom (PC) et ZoomText Mac (Mac).



Logiciel innovant

Le logiciel de MagniLink S inclut les fonctionnalités uniques et innovantes suivantes :

- Véritable mise à jour (automatiquement via Internet)
- Enregistrement des images et des vidéos
- Touches de raccourcis pouvant être personnalisées
- Adapté aux malvoyants ;
larges touches virtuelles de contraste élevé et synthèse vocale (MLS TTS)
- Fonctionnalité d'écran divisé

Détection automatique de la langue

Le logiciel détecte automatiquement la langue utilisée dans le texte et le lit avec la voix correspondante (PC/Mac).



MagniLink S Premium

Options intelligentes

Station d'accueil intuitive

Branchez MagniLink S à la station d'accueil et vous êtes immédiatement connecté(e). La table de lecture est dotée de câbles de raccordement au dos. (Le grand boîtier de commande est fourni).

Idéale pour déplacer MagniLink S à la maison, au bureau ou à l'école. La table de lecture inclut des freins de friction séparés sur les axes X et Y.



Moniteur LVI

Le moniteur de haute qualité LVI, développé pour les malvoyants, est doté d'une vitre antireflets, offrant une excellente netteté et un haut contraste, et ses contours arrondis et son design en font la solution idéale avec votre MagniLink S. Disponible avec des écrans de 19" et de 23". Vous pouvez ajouter un support de moniteur ou un bras de moniteur.



Boîtier de commande externe

Le boîtier de commande externe est doté de touches pour permettre une sélection aisée des fonctions. Disponible en deux tailles.



Pour connaître la liste des accessoires, nous vous invitons à lire la brochure correspondante.

Modèles et options MagniLink S

1 Choisissez le modèle de base

Référence	Description
MLS-HD	caméra HD 720p avec logiciel pour Windows/Mac OS et sac de transport 2-in-1
MLS-FHD	caméra FHD 1080p avec logiciel pour Windows/Mac OS et sac de transport 2-in-1

2 Choisissez les options et les accessoires

Référence	Description
A (TTS-PC)*	Logiciel TTS pour PC/Windows.
B (TTS-MAC)*	Logiciel TTS pour Mac/Mac OS.
C1 (MLS-A101)*	Station d'accueil MagniLink S avec table A3 X/Y. DVI.
C2 (MLS-A101SPLIT)*	Station d'accueil MagniLink S avec table A3 X/Y. HDMI.
C3 (MLS-A101CLAMP)*	Station d'accueil MagniLink S avec pince de table. DVI.
C3 (MLV-A111A)*	Kit de répartition (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
E1 (MLV-A112)*	Caméra à distance SD MLV (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
E2 (MLV-A113)*	Caméra à distance HD MLV (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
MLV-A110A	Boîtier de commande externe, grand modèle (séparé). Compris dans C1,C2,C3.

Caractéristiques techniques :

Modèle	MagniLink S
Connexions	USB 3.0, HDMI
Résolution de la caméra	HD : 1280 x 720 (720 balayage progressif) FHD : 1920 x 1080 (1080 balayage progressif)
Plage d'agrandissement (grand écran de 15,4")	HD : 1,4x – 75x (le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC) FHD: 1,1 x 75x (le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC)
Hauteur de travail dégagée	31 cm
Modes de couleurs	Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles (positives/négatives)
Modes d'affichage	Lecture (gauche/droite), à distance, miroir
Poids	1,7 kg
Fréquence d'images	60 images/seconde entièrement numériques
Compatibilité	PC : ZoomText 10.X ou version plus récente, Dolphin SuperNova 12 ou version plus récente, iZoom 4.0 MAC: ZoomText Mac
Configuration minimale du système	PC : Windows 7 ou version plus récente MAC : MAC OSX 10.6 ou version plus récente Chromebook : Chrome OS 59 ou version plus récente

* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l'article est commandé séparément. Sinon, ajoutez la référence au format MLS-FHD-AC1 pour un MLS avec caméra Full HD, logiciel TTS pour PC et station d'accueil A3 avec connecteur DVI.

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 et 9001.



Bureau en Suisse:

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg
Tel: 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15
E-mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE

MagniLink S_170926