

MagniLink PRO

– Das System am Arbeitsplatz!



MagniLink PRO

Für **Alle**

MagniLink PRO bietet eine einzigartige Vielfalt an kundenorientierten Lösungen am sehbehindertengerechten Arbeitsplatz. Die herausragenden Funktionalitäten der kombinierten Lese-/Distanzkamera mit Full HD sind USB 3.0 und HDMI-Anschluss, großzügiger Arbeitsabstand, einfache Handhabung und die Option, Texte über ein TTS-Modul (Text-to-Speech) vorlesen zu lassen. Das System ist leicht zusammenfaltbar und somit transportabel.

Erfasst eine komplette Din-A4 Seite



Viel Platz!
Ideal für große
Bücher oder
Aktenordner.
Bis zu 46 cm
freie Arbeitshöhe!

Automatischer Stand-by-Modus (einstellbar): Durch eine einfache Handbewegung unter der Kamera wird das System reaktiviert.

Exzellente **Bildqualität**

MagniLink PRO ist mit einer Full HD-Kamera (1.080p) und 20-fachem optischen Zoom ausgestattet. In Kombination mit hoher Tiefenschärfe und geringer Lichtempfindlichkeit, führt das zu einem angenehm brillianten Bild mit scharfen Konturen – unabhängig von der eingestellten Vergrößerung.

PC, Mac oder Monitor

MagniLink PRO kann über USB 3.0 und der kameraeigenen Software mit einem PC oder einem Mac verbunden werden. Alle Funktionen können über Tastenkombinationen ausgeführt und gesteuert werden. Selbstverständlich ist auch der digitale Anschluss an einen separaten Monitor möglich. Zur Bedienung steht das mitgelieferte benutzerfreundliche, taktil ausgestattete Bedienelement zur Verfügung.

Kombinierte **Lese-/Raumkamera**

Die hochwertige Full HD-Kamera mit 1.080p, zeigt sowohl im Lese-, Raum- oder im Spiegelmodus jedes Detail. Die Kamera verfügt über einen Schwenkbereich von 270°, einen abschaltbaren Autofokus sowie einen manuellen Fokus. Die integrierte Beleuchtung ist dimm- und abschaltbar.



Überall einsetzbar

MagniLink PRO ist durch die Portabilität überall einsetzbar. Auf dem Schreibtisch aufgebaut, beansprucht das System wenig Stellfläche und bietet ein sehr stabiles Bild. Bei Bedarf lässt sich MagniLink PRO zusammenklappen und abbauen. Im Akkubetrieb steht das System wirklich überall bis zu 9 Stunden zur Verfügung – egal ob in der Besprechung oder im Termin.



Foto-/Videoaufnahme

Bild- und Videoaufnahmen sind mit MagniLink PRO einfach auf Knopfdruck möglich und ermöglichen das spätere Studieren der Aufnahmen, z.B. auch zu Dokumentationszwecken oder in der Qualitätssicherung.



Monitor Ihrer Wahl

Schließen Sie jeden kompatiblen Monitor Ihrer Wahl an – oder einen LVI low-vision-adaptierten Monitor mit 18,5" oder 23".



Kompatible Software

Die mitgelieferte MagniLink Software ist kompatibel mit bekannten Vergrößerungsprogrammen wie z.B. ZoomText und Supernova – unter Windows 7, 8, 8.1 und 10.

Programmierbare Funktionstasten

Das mitgelieferte Bedienelement steuert alle Funktionen und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Zwei der Tasten sind individuell programmierbar.



Intelligente Optionen

MagniLink PRO kann durch durchdachtes Zubehör den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden (siehe Seite 6).



MagniLink PRO

videum
science park

recep



tion



MagniLink PRO
– die professionelle Lösung bei
allen Aufgaben am Arbeitsplatz

Intelligente Optionen und Zubehör

Andockbarer **A4 Kreutztisch**

Der ergonomische, stabile Komfort-Kreutztisch für A4-Vorlagen ist horizontal und vertikal getrennt voneinander brems- und feststellbar und erhöht den Lesekomfort gerade bei großen, schweren Vorlagen und bei längeren Texten.



Akku

Zur Erweiterung der Flexibilität kann MagniLink PRO mit einem Akku bis zu 9 Stunden betrieben werden. Maximale Flexibilität zum Beispiel beim Einsatz mit einem Notebook.




Kraftvolle **TTS-Software für PC oder Mac**

Das TTS-Modul der MagniLink-Software unterstützt eine vollständige TTS- Funktionalität (Text-to-Speech). Auf Knopfdruck wird eine Seite erfasst und innerhalb von wenigen Augenblicken vorgelesen.



- Scannt eine komplette A4 Seite in wenigen Augenblicken
- Synchronisierte Text- und Lesegeschwindigkeit
- Optimierte Darstellungsmodi (zeichen-, wort-, zeilen- oder absatzweise)
- Texte speichern
- Hochwertige Stimmen
- Einfach zu bedienen
- Menüs mit Sprachausgabe (voice feedback)

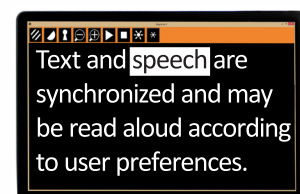

TTS erhöht die Lesegeschwindigkeit

Weiteres Zubehör

LVI bietet Ihnen bei Bedarf gern weiteres Zubehör an: Von Vergrößerungssoftware über Arbeitsplatzbeleuchtung bis hin zu Großschrifttastaturen. Gern stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

DAS System am Arbeitsplatz



Technische Daten

Computer, Auflösung	1.280x1.024, 60Hz bis 1.920x1.080, 60Hz SVGA bis Full HD
Vergrößerung	1,1-70x
Zeilenlineal/Maske	Horizontal/vertikal
Bildschirmteilung über Software	Horizontal, vertikal oder Vollbild.
Kameraauflösung	True Full HD (1.080p, 1.920x1.080)
Abmessungen, zusammengeklappt	33x47x17 cm
Abmessungen, aufgebaut	33x38x52 cm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg
Freie Arbeitshöhe unter der Kamera	42,5-46 cm
Stromversorgung	Netzteil oder Akku

Produkt: MLPRO-FHD

MagniLink PRO (ohne Akku, ohne Kreutztisch)

Lieferumfang: MagniLink PRO, Netzteil, Transporttasche, Anwenderhandbuch, Treiber/
Anwendersoftware für PC WIN7, WIN8, WIN8.1, WIN10 und Mac OS X

Optionales Zubehör:

- **MLPRO-A Portabler, andockbarer A4-Kreutztisch** für MagniLink Pro.
Gewicht: 3 kg.
- **MLPRO-B Akku** für MagniLink Pro.
Gewicht: 0,3 kg. Akkulaufzeit: ca. 5-9 Stunden. Akkuladezeit: ca. 2,5 Stunden
- **MLPRO-C TTS-Modul** für WIN7, WIN8, WIN8.1 und WIN10
- **MLPRO-D TTS-Modus für Mac** ab OS X (10.6 Mountain Lion)

Kombinieren Sie das System nach Ihren Anforderungen, z.B.:

- Basisausführung MLPRO + Akku + Kreutztisch = MLPRO-FHD-BA
- Basisausführung MLPRO + TTS-Modul für Win = MLPRO-FHD-C

Niederlassung in der Schweiz:

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg
Tel: 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15
E-Mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH

LVI Low Vision International
ist als einer der weltweit führenden
Hersteller von elektronisch vergrößernden
Sehhilfen. Angetreten mit der Mission, das
tägliche Leben für Menschen mit Sehbehin-
derung angenehmer zu gestalten. Wir sind
zertifiziert nach ISO 14001 & 9001.



MagniLink Pro_151030 WWW.LVI.SE