

Externa kunder

Hur hanterar Sterilteknik dessa på
Danderyds sjukhus AB

DANDERYDS SJUKHUS




DANDERYDS SJUKHUS



Vi är en del av Stockholms läns landsting

Upptagningsområde

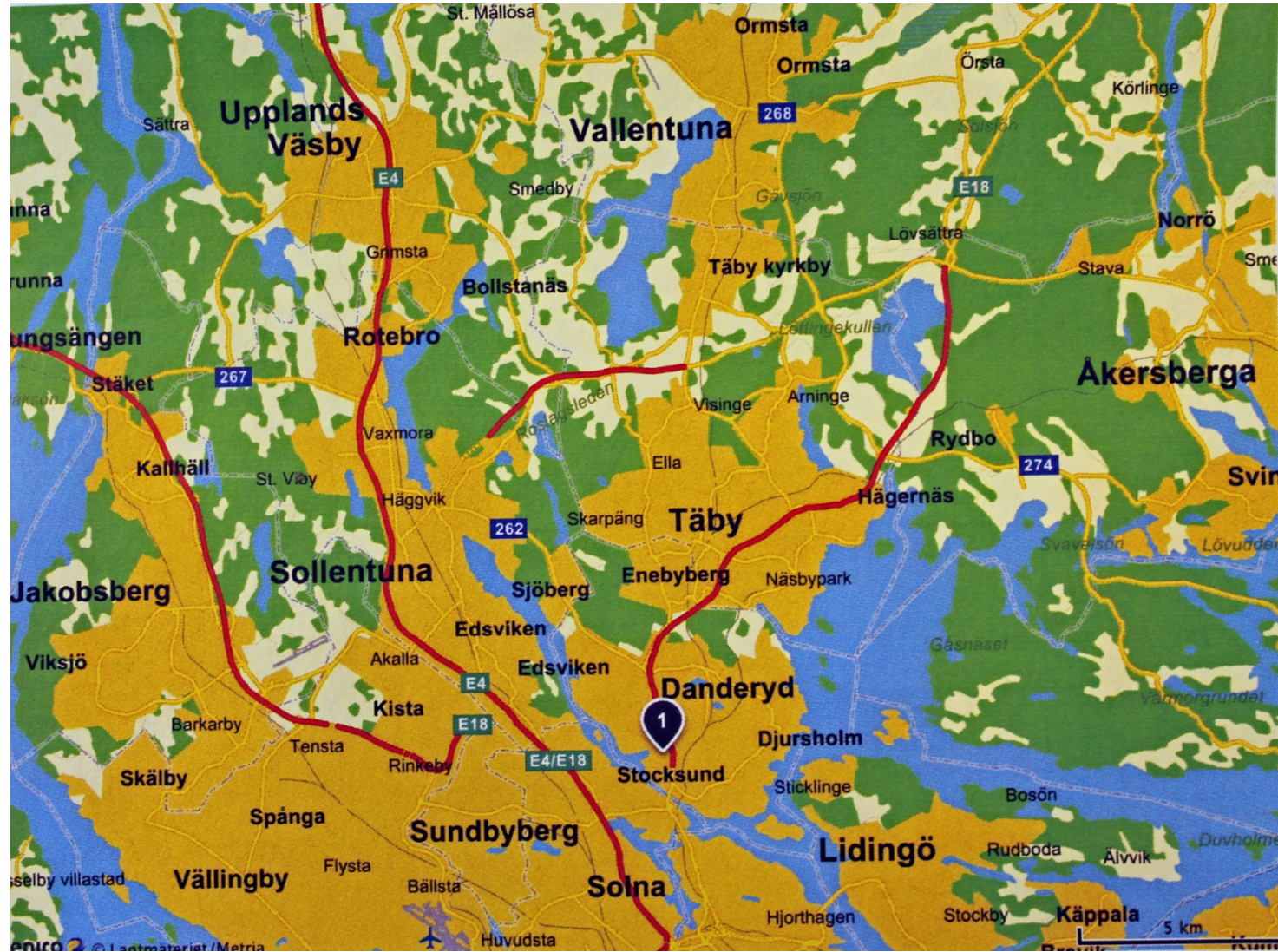

DANDERYDS SJUKHUS



Vi är en del av Stockholms läns landsting

Extern kund

- Barnmorskemottagningar
- Vårdcentraler, privata och landstingsägda
- Hudmottagningar
- Ungdomsmottagningar
- Företagshälsovård

Danderyds sjukhus har ca 115 externa kunder



Extern transport av gods



Lådorna kommer till Sterilteknik på fm.



Hantering i diskrum



- Godset ska vara desinfekterat när det kommer till Sterilteknik
- Varje kunds instrument hanteras var för sig.
- Instrumenten öppnas och läggs vid behov på saxstöd.

Copy of returned label

DANDERYDS SJUKHUS

Beställningsdatum _____

Kostnadsställe nr.	Avdelning	Kontaktperson	Telefon		
7213-10	SLSO Taby VC		08-12340840		
Namn	Produkt Antal	Namn	Produkt Antal	Namn	Produkt Antal
		Sax förband Lister 18 cm	9269	Klistra returetiketten här:	
SLSO Taby VC					
Set sutur nr 1,6 mån	2027	Eget instrument	11011		
Slev oval	9323	Slev rund	9324		

Page 2 of 2





Varje kund har sin egen unika diskbricka med streckkod.

På baksidan knyts kundens instrument till streckkoden "Diskbricka".



I diskrummet

Returområde/diskrummet

Användningsområde: När gods anländer till Sterilcentralen skall allt returregistreras. Allt skall skannas på en diskbricka.

1. Skanna streckkoden för returområdet.

ReturOmr

2. Skanna din ID-streckkod.

3. Skanna streckkoden på insatsen (disklast).

Fortsätt

4. Skanna en diskbricka.

Röd diskbricka = ortoped.
Blå diskbricka = kirurg.
Gul diskbricka = urolog.
Vit diskbricka = kvinnokliniken.
Lila diskbricka = externa kunder.
Grön diskbricka = övriga interna kunder.
Lös instrument ska ligga på en särskild diskbricka.

5. Skanna streckkodsetiketten.

6. Skanna galler först och sedan lös instrument. Tänk på att lägga på olika brickor. Punkt 3 till 5 och punkt 4 till 5 kan upprepas.

Om något är fel, tex etikett saknas, håll i papper, skanna aktuell felkod. Denna felkod skall skannas tillsammans med streckkoden, därefter måste man avsluta. (Annars ligger felkoden kvar till nästa streckkod.)

Trasigt emballage	Instrument saknas	Utgången datum

Skanna "Avsluta skanning"

Avsluta skanning

Retur disk

2015-02-12

- Instrumenten skannas in i T-DOC (spårbarhetssystem)





Godkännande av diskprocess



Diskprocessen godkänns digitalt
med kontroll av temp och tid.



Vad gör vi med instrumenten



- Kontrollerar renhet
- Kontrollerar ev under mikroskåp
- Funktionstest, så att instrumenten fungerar korrekt
- Oljning
- Packning enligt kundens önskemål



Kontakt med kunder

- **Instrument som skickas i retur:**
 - Rostiga instrument
 - Skadade instrument
 - Ej funktionsdugliga
 - Engångsinstrument
- **Kunden kan beställa instrument hos oss, både avdelningskvalité och operationskvalité**



Autoklavprocesser




- Elektronisk Bowie Dick-test dagligen
- Lastkontroll vid varje last



- Godkännande av autoklavprocess



Följesedlar

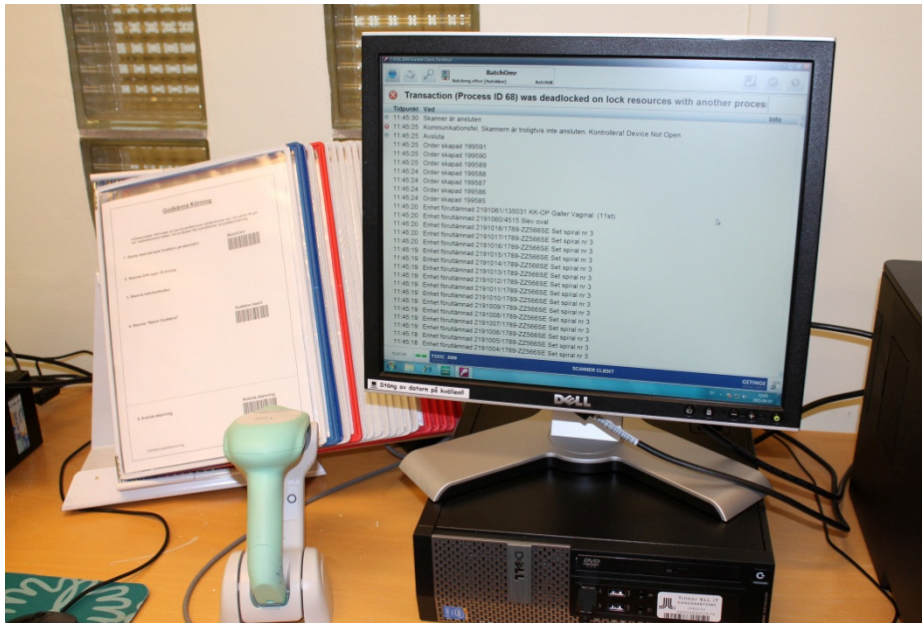

Då genererar systemet en körorder, följesedel, beställningslista med streckkoder



Utleverans av gods

- Transport sker huvudsakligen via Landstingets transporttjänst
- Kund hämtar och lämnar även själv



Certifierad avdelning

- Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 13485:2012



Ledningssystemet för kvalitet är tillämpligt för "Rengöring, funktionskontroll, packning samt ång- och väteperoxidsterilisering av medicinsk tekniska produkter.



Avtal

- Vi tecknar avtal med samtliga externa kunder, avtalet löper på ett år, med årlig förlängning om det inte sägs upp.
- Hanteringstid gentemot kunderna är fyra arbetsdagar exkl transport.
- Kunderna kan skicka antingen lösa instrument eller olika sorters set beroende på behov.



Personal

- Steriltekniker
- Undersköterskor
- Tandsköterskor



23 personer anställda, som roterar på olika stationer.



