


# Eye-Pal Solo



## Hurtigmanual

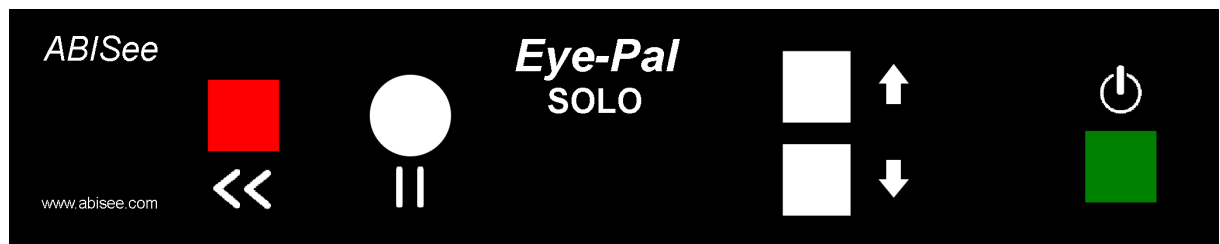

Frontpanelet (beskrevet fra høyre mot venstre):

- En grønn firkantet knapp. Denne slår SOLO av og på
- To hvite firkantete knapper. Knappene er plassert ovenfor hverandre. Den øverste øker lesehastigheten, mens den nederste reduserer lesehastigheten
- En svart og grå skru knott. Denne øker og reduserer lydstyrken.
- En hvit rund knapp. Denne knappen starter og pauser lesingen. Hold knappen inne i tre sekunder for å aktivere eller deaktivere bevegelseskommandoer
- En rød firkantet knapp. Denne knappen leser forrige setning. Kan trykkes flere ganger

Plassering av teksten

Teksten som skal leses plasseres oppå plata under kameraet. Eye-pal Solo vil automatisk oppdage teksten å begynne å lese.

Håndbevegelser (Aktiver eller deaktiver bevegelseskommandoer ved å holde den runde hvite knappen inne i tre sekunder):

- Pause: Beveg hånden fra venstre mot høyre over teksten.
- Fortsett: Beveg hånden fra venstre mot høyre over teksten.
- Les forrige setning: Beveg hånden fra høyre mot venstre over teksten. Kan utføres flere ganger.

For mer informasjon og spørsmål kontakt med ProVista AS.

**Adresse Oslo:**

**ProVista AS Oslo**

Sporveisgata 10  
0354 Oslo  
Tlf: 22 69 61 00

**Hovedkontor:**

**ProVista AS Arendal**

Tromøyveien 24  
4841 Arendal  
Tlf: 37 05 86 86

**Internett:**

[www.provista.no](http://www.provista.no)

**E-post:**

[support@provista.no](mailto:support@provista.no)