

Bruksanvisning **SenseView Light**

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5

Tel: +46 70 – 727700

352 46 Växjö

Fax: +46 70 – 727725

Internet: www.lvi.se

E-mail: info@lvi.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. FÖRSKRIVARINFORMATION	4
2. PATIENTINFORMATION	5
2.1 Allmänt	6
2. ÖVERSIKT	7
3. FUNKTIONER.....	12
3.1 Läsläge	12
3.2 Halvavstånd.....	12
3.3 Energisparläge.....	13
3.4 Batteristatus	14
3.5 Ljud av/på.....	15
4. TEKNISK INFORMATION	16
5. DECLARATION OF CONFORMITY	17

1. Förskrivarinformation

SenseView Light är en portabel förstoringsapparat som är till god hjälp vid underlättandet av vardagsaktiviteter.

Montering

Information om uppackning och start av din SenseView Light finns under avsnitt "Uppackning".

Garanti

SenseView Light levereras med 3 års produktgaranti eller enligt gällande avtal

Underhåll och service

Utför bara den service och det underhåll som anges i denna bruksanvisning. All annan service, förändringar och ingrepp skall utföras av behörig serviceman. Kontakta syncentralen vid osäkerhet.

Teknisk Information

Se kapitel 4 (s.16) för tekniska specifikationer för SenseView Light.

2. Patientinformation

Tack för att du valt SenseView Light. I förpackningen medföljer:

- SenseView Light (SENSE350)
- Nätadapter
- Väska
- Bär-rem
- Användarhandbok



Tillverkare: HIMS

Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA, 305-350

Phone: +82-42-864-0133

Internet: www.himsintl.com

E-mail: hims@himsintl.com

2.1 Allmänt

Batteriet måste laddas minst 3 timmar före första användningen. För att göra detta, anslut den medföljande adaptern till ett vägguttag.

Innan du använder din SenseView Light för första gången, ta bort skyddsplasten på skärmen.

För att undvika skador på din SenseView Light, använd endast den medföljande nätadaptern.

För att undvika brand eller elektriska stötar, utsätt inte din SenseView Light för fukt.

Efter 6 månaders användande, kan det hända att batteriets batteritid förkortas något.

2. Översikt



1. Knapp för PÅ/AV

Sätt på din SenseView Light genom att skjuta denna knapp åt höger. För att stänga av den, skjut knappen åt höger igen.

2. Stativ

när du läser tryckta texter kan du fälla ut de två stödbenen för extra stabilitet.



3. Kamera

Kameran sitter på mitten av undersidan på din SenseView Light.

4. Zoom

Denna knapp ändrar förstöringsgraden. De nivåer som finns visas i tabellen nedan.

Förstoringsnivå	Avstånd från objekt	
	2cm	4.5cm
Nivå 1	3.5x	1.5x
Nivå 2	5.25x	2.25x
Nivå 3	7x	3x
Nivå 4	10.5x	4.5x

Om du i förstöringsläge 4 trycker på knappen igen, kommer du tillbaka till förstöringsnivå 1. Om du

stänger av enheten, kommer enheten att starta på den senast valda förstöringsnivån.

5. Kontrast

Skärmens kontrast har 4 olika nivåer. Varje gång du trycker på knappen ökas kontrasten med en nivå. Om du i kontrastläge 4 trycker på knappen igen, kommer du tillbaka till kontrastnivå 1. Om du stänger av enheten, kommer enheten att starta på det senast valda kontrastläget.

6. Färgläge

Genom att trycka på denna knapp kan du ändra mellan de 5 olika färglägena på skärmen.

(1) Naturliga färger

(2) Svart på vit bakgrund

(3) Svart på vit bakgrund – hög kontrast

(4) Vit på svart bakgrund

(5) Vit på svart bakgrund – hög kontrast

- Du kan använda färgläge (1) när du vill se saker i dess naturliga färger.
- Läge (2) och (4) kan användas när du vill lyfta enheten eller skriva något eller vill se text med svag kontrast eller liten text.
- Läge (3) och (5) kan användas när du vill använda enheten för att läsa eller vill ha hög kontrast.
- Du kan använda läge (3) och (5) när du vill använda enheten för att läsa eller vill ha hög kontrast.

Om du i läge 5 trycker på knappen igen, kommer du tillbaka till färgläge 1. Om du stänger av enheten,

kommer enheten att starta på det senast valda färgläget.

7. Ljusstyrka

Du kan ljustera ljusstyrkan på enheten i 3 nivåer.

- (1) Av
- (2) Medium
- (3) Maximal

Om du i läge 3 trycker på knappen igen, kommer du tillbaka till läge 1. Om du stänger av enheten i läge 1, kommer enheten att nästa gång den sätts på ändras till läge 3.

8. Frys bild

Du kan frysa bilden på enheten genom att trycka på denna knapp. På den frysta bilden kan du sedan byta färgläge, justera kontrasten eller zooma.

9. Batteriindikator

När du laddar batteriet, kommer lampan att lysa rött för att sedan ändras till grönt när batteriet är fulladdat. När lampan blinkar är enheten i energisparläge.

10. Skärm

Observera: Skärmen blir varm om du använder din enhet under en längre tid eller under laddning.

11. Uttag för nätadapter

För att undvika elektriska skador, använd endast den medföljande nätadaptern.

OBS! Koppla ur strömadaptern försiktigt för att undvika skada på adaptern och enheten.

12. Ögla för bär-rem

Bär-remmen kan fästas genom denna ögla.

13. Belysning

3. Funktioner

3.1 Läsläge

Fäll ut benen och placera din SenseView Light på texten som bild 2 visar eller fäll ut ett av stödbenen som bild 3 visar.

OBS! när du förflyttar din SenseView Light över texten, tryck inte enheten mot underlaget. Stödbenen kan då skada det tryckta materialet.



Bild 2



Bild 3

3.2 Halvavstånd

Du kan i detta läge använda din SenseView Light på en höjd av 2 - 4,5 cm, se bild 4 nedan.



Bild 4

3.3 Energisparläge

Om du lämnar din SenseView på i två minuter utan att använda den kommer enheten automatiskt att gå till energisparläget. I detta läge släcks skärmen och batteriindikatorn (9) blinkar. Efter 3 minuter i energisparläget kommer enheten att stängas av.

OBS! när du tittar på en fryst bild, sätts inte energisparläget på. I detta fall stängs enheten av efter 3 minuter om du inte trycker på några knappar, även om du flyttar enheten.

Du kan avbryta energisparläget genom att trycka på någon knapp eller flytta enheten. Om enheten har hunnit stänga av sig måste du trycka på PÅ-knappen för att sätta på enheten.

3.4 Batteristatus

För att visa batteriindikatorn, tryck på zoomknappen (4) och kontrastknappen (7) samtidigt.

Batteriindikatorn visas på skärmen som bild 5 visar, med blå färg när nätadaptern inte är inkopplad.



Bild 5

Bild 6 visar batteriindikatorn när batteriet är tomt, då ikonen visas blinkandes på skärmen. Koppla in nätadaptern för att ladda batteriet.



Bild 6

Batteriindikatorn visas i rött (se bild 7) när enheten laddas.



Bild 7

När enheten är fulladdad visas batteriindikatorn i grönt, se bild 8.



Bild 8

3.5 Ljud av/på

Om du trycker på knappen för färgläge (6) och kontrast (7) samtidigt, sätts knappljudet på/av.

4. Teknisk Information

Skärm:	3,4 tum (16:10 bredbildsskärm)
Förstoring:	1,5 x – 10,5x
Läsavstånd:	2 - 4,5 cm 0,7 till 1,7"
Ljusstyrka:	4 nivåer
Färglägen:	5 färglägen Naturliga färger, Svart på vit bakgrund, Svart på vit bakgrund (hög kontrast), Vit på svart bakgrund, Vit på svart bakgrund (hög kontrast)
Kontrast:	3 nivåer (av, medium, maximal)
Batteri:	Laddningsbart litium polymer - batteritid: 3,5 timmar - laddningstid: 3 timmar
Storlek (W x D x H):	11,5 x 6,7 x 1,8 cm 4,5 x 2,6 x 0,7"
Vikt:	151 g, 0.33 lb
Garanti:	- Garantitiden för enheten (ej batteri) är 3 år eller enligt avtal. - Garantitiden för batteriet är 6 månader. - Garantin täcker inte skador eller problem som orsakats av användaren.

5. Declaration of conformity

Declaration of Conformity




Type of equipment:	SenseView LIGHT
Brand Name /Trade Mark:	HIMS
Type designation /model:	P350
Manufacturer:	HIMS Co., Ltd.

2004/108/EC The Electromagnetic Compatibility Directive

Including amendments by the CE Marking Directive 93/68/EEC

The following harmonized European standards and technical specifications have been applied:

EN 55022:2006	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005	Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003	Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
EN 61000-4-2:1995 +A1:1998 +A2:2001	Electrostatic discharge immunity test
EN 61000-4-3:2006	Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
EN 61000-4-4:2004	Electrical fast transient/burst immunity test
EN 61000-4-5:2006	Surge immunity test
EN 61000-4-6:2007	Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
EN 61000-4-11:2004	Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

Test report issued by:
EMC: CTK Co., Ltd.

The CE Marking on the products and/or their packaging signifies that DONGYANG E&P Inc. holds the reference technical file available to the European Union authorities.

Place and date of issue:	KT Daejeon Satellite Center, 139-9, Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA, 305-350 / October 16, 2009
Authorized Signatory:	Name: Hims Co.,Ltd Title: President Signature: Yoon Yang Taik