

INNHOLD

Sikkerhetsforskrifter	141
KAPITTEL 1 Introduksjon	142
1.1 Systemkrav.....	142
1.2 Utpakking	142
KAPITTEL 2 Installasjon av MagniLink Go!	143
2.1 Telefontilpasninger.....	144
KAPITTEL 3 Systemoversikt	145
3.1 Applikasjonsbetjening.....	146
3.1.1 Kameravisning.....	147
3.1.2 Stillbildevisning.....	148
3.1.3 Tekstvisning.....	150
KAPITTEL 4 Applikasjonsmeny	152
4.1 Meny for innstillinger.....	153
4.2 Bildetaking.....	155
KAPITTEL 5 Lisensiering	156
5.1 Lisensaktivering.....	156
SECTION 6 Tredjeparts applikasjoner.....	157
6.1 Nuance - Talks and Zooms	158
6.2 Code Factory - Mobile Speak og Mobile Magnifier	158
KAPITTEL 7 Tekniske spesifikasjoner	159

Dette produktet er produsert av:
LVI Low Vision International AB, Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö, SWEDEN

LVI Low Vision International AB er ansett som en av verdens ledende produsenter av hjelpemidler for personer med nedsatt syn, med oppgaven å gjøre hverdagslivet bedre for personer med synshemming. Selskapet ble opprettet i 1978 og har hovedkvarter i Växjö, hvor all utvikling og produksjon finner sted.

Informasjonen i denne brukermanualen er nøye sjekket og anses å være korrekt. LVI påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil som måtte forekomme i denne manualen. Ikke i noe tilfelle vil LVI stå ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, unntaksvise, tilfeldige eller konsekvensmessige skader som oppstår på grunn av en defekt eller utelatelse i denne manualen. Til fordel for videre produktutvikling forbeholder LVI seg retten til å gjøre forbedringer i denne brukermanualen og produktene den beskriver når som helst, uten varsel eller forpliktelse.

Sikkerhetsforskrifter

Utstyret må brukes i samsvar med sikkerhetsforskriftene nedenfor. Ved tvil, ta kontakt med en representant eller forhandleren.

MagiLink Go! er kun tiltenkt brukt som programvare sammen med støttede mobiltelefoner og i henhold til sikkerhetsforskriftene for mobiltelefonen som benyttes.

LVI Low Vision International hverken garanterer eller tar ansvar for at resultatet fra produktet vil være 100% nøyaktig. Ikke bruk resultatet til avgjørelser som kan skade deg selv, andre personer eller gjenstander.

LVI er sertifisert iht. ISO 9001 og 14001.
--

KAPITTEL 1 Introduksjon

Gratulerer med valget av MagniLink Go! Vårt mål er å sørge for at du føler deg tilfreds med valget av leverandør og ditt visuelle hjelpemiddel.

MagniLink Go! er en bærbar løsning for mobiltelefonen din som lar brukere lese det de ønsker, hvor enn de måtte være. Det kan sammenlignes med en lesemaskin eller et digitalt forstørrelsesglass, selv om det er en programvare for mobiltelefonen din.

1.1 Systemkrav

Operativsystem: Symbian v9.3, S60 3rd Ed, FP1 eller FP2.

Kamera: Anbefalt 5 megapiksler med autofokus.
Minimum 3,2 megapiksler med autofokus.

Støttede telefoner med 5 megapiksler: Nokia N82, N85, N86, 6220 Classic (6220C), 6710 Navigator, 6720 Classic, Nokia Slide 6700 og E72.

Mer informasjon om flere modeller på www.lvi.no.

1.2 Utpakking

MagniLink Go! leveres i en boks som inneholder:

- En (1) programvare på CD
- En (1) trykket bruksanvisning og en CD med bruksanvisningen i PDF- og Daisy-format
- To (2) polariseringsfiltre (som skal festes over linsen og blitsen)
- En (1) bærestropp

KAPITTEL 2 Installasjon av MagniLink Go!

Koble mobiltelefonen din til datamaskinen via USB og på forespørsel fra mobiltelefonen om "Velg USB-modus", velg "Masselagring". Telefonen vil nå dukke opp i filutforskeren på datamaskinen som et flyttbart medium (Windows XP/Vista/7 - adferd). Fra datamaskinen, søk gjennom telefonen din ved hjelp av filutforskeren og bla deg fram til "\\Installs"-mappen. Vennligst opprett mappen dersom den ikke finnes i rotkatalogen.

Sett inn CD'en med programvaren MagniLink Go! i CD/DVD-spilleren på datamaskinen din og bla frem til "\\Installs\\Magnil_ink Go\\" - mappen på CD'en. Velg INT for internasjonal versjon, eller UK for Engelsk versjon.*

Nokia N82: Velg "MLGO_v10x_FP1.sis"

Andre: Velg "MLGO_v10x_FP2.sis"

Kopier filen fra CD'en til "\\Installs"-mappen på mobiltelefonen din.

Bla frem til "\\Installs\\Voices\\" - mappen på CD'en. I denne mappen finnes det undermapper for de forskjellige språkene som leveres på CD'en. De spesifikke språkene du kan bruke avhenger av hvilke språk det er gitt lisens på i applikasjonen din. Det er kun tilgang til å benytte lisensierte språk på mobiltelefonen, med unntak av at du har en prøveversjon av programvaren som gir deg mulighet til å benytte alle språk i løpet av prøveperioden. Kopier SIS-filene for de lisensierte språkene fra de respektive mappene til "\\Installs"-mappen på mobiltelefonen.

Når alle filene er kopiert, koble telefonen fra datamaskinen. Åpne deretter programbehandleren ("App. mgr"). Programbehandleren kan befinne seg på forskjellige steder avhengig av telefonmodell og gjeldende konfigurasjon, f.eks. finnes den under "Applikasjoner" på en Nokia N86. Åpne mappen "Installasjonsfiler" i programbehandleren. For hver MagniLink Go! - komponent (applikasjon og stemmer) som

*I INT versjon følger stemmen Heather med, mens i UK versjonen følger stemmen Lucy med.

vises i listen under "Installasjonsfiler", trykk enten på bla- og valgtasten eller velg "Alternativer" - "Installer".

Når du får forespørselen "Installer MagniLink Go!?" (eller lignende), trykk "Ja". Trykk "Fortsett" og "OK" på alle dialogboksene som måtte dukke opp. Masseminne er lagringsplassen som er best egnet når du blir spurt om hvor du skal installere applikasjonen. Det kan ta litt tid å installere.

Vennligst vent til dialogboksen "Installasjon fullført" vises et kort øyeblikk.

Når alle MLG SIS-filene er installert, er applikasjonen klar til bruk.

2.1 Telefontilpasninger

For å oppnå best mulig resultat fra din nye MagniLink Go! - applikasjon bør du benytte polariseringsfiltrene som følger med. Polariseringsfiltrene befinner seg i en plastlomme på siste side av denne bruksanvisningen, og skal festes over linsen og blitsen til kameraet på mobiltelefonen. Filtrene vil forhindre uønskede lysrefleksjoner når du tar bilder av glansede materialer som f.eks. aviser med glanset papir.

Polariseringsfiltre lagt ved siste side i denne bruksanvisningen.

Filtrene må festes med de runde kantene i samme retning, dvs. roter filteret lengst til høyre 90 grader mot klokken før du setter på filtrene. Filterkantene har et farget klebemiddel som gjør det enklere å finne klebeområdet samt plassere filtrene slik at klebemiddelet ikke dekker over linsen eller blitsen. Klebemiddelet vil i tillegg sørge for at filtrene er stramt festet på mobiltelefonen. Dersom du skulle miste filtrene eller de skades, vennligst kontakt forhandleren din for å få erstatningsfiltre.

KAPITTEL 3 Systemoversikt

MagniLink Go! - applikasjonen er inndelt i tre funksjonsområder:

- Videovisning i sanntid
- Stillbildeviisning
- Tekstvisning

Applikasjonen startes i visningen for videovisning i sanntid. Denne visningen brukes både som kamerasøker for snapshots, samt et digitalt forstørrelsesglass som kan benyttes til å forstørre og forsterke enhver tekst eller grafisk objekt. Fra denne visningen kan du enten gå til stillbildeviisning gjennom et snapshot (se betjeningsinstruks nedenfor) eller du kan gå direkte til tekstvisning via et OCR- snapshot (se betjeningsinstruks nedenfor).


Stillbilder med høy oppløsning håndteres av stillbildeviisningen. Dette er visningen du ender opp i etter å ha tatt et snapshot i videovisning i sanntid. Her kan du se og håndtere stillbildet; velg zoom, panorere, forsterke, lagre eller OCR-behandle bildet. Dersom OCR-behandling (se betjeningsinstruks nedenfor) er valgt vil bildet bli OCR-behandlet og resultatet bli vist i tekstvisningen etter at OCR-behandlingen er fullført.

I tekstvisningen kan du behandle teksten som er ekstrahert fra bildet via OCR. I denne visningen kan teksten rulles, leses av tekst til tale, lagres til fil, eksportert via MMS, SMS eller e-post.

3.1 Applikasjonsbetjening

For å starte applikasjonen, naviger til telefonmenyen ved bruk av menytaben, finn snarveien til applikasjonen og trykk på bla- og valgtasten. Finn ikonet for MagniLink Go! - applikasjonen i applikasjonsmenyen og trykk på bla- og valgtasten for å starte applikasjonen. Mens applikasjonen starter vises velkomstskjermen en kort stund samtidig som applikasjonsinformasjonen leses av TTS.

Alle hovedfunksjonaliteter i applikasjonen betjenes fra tastene på telefonen. Funksjonalitetene avviker i liten grad fra en visning til en annen, men alle funksjonalitetene som er like i alle visninger deler de samme tastene.

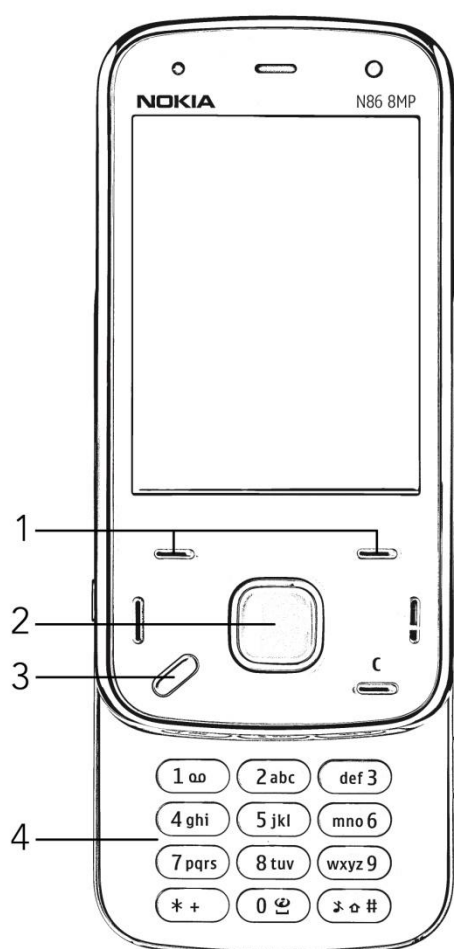

1. Valgtaster, høyre og venstre
Valgtastene befinner seg rett nedenfor skjermen.
2. Rulletast og bla- og valgtast
Rulletasten og bla- og valgtasten befinner seg i midten av telefonen.
3. Menytast
Menytasten befinner seg på forskjellige steder avhengig av modell, men er ofte plassert nederst til venstre for hovedfunksjonene.
4. Numerisk tastatur

Bilde av en telefon, funksjonene kan være forskjellige avhengig av modell.

3.1.1 Kameravisning

Talltast 0	Lås/frigi kamerabilde. Låser kamerabildet. Frigir kamerabildet ved gjentatt trykk.
Talltast 1	Reduser kontrast. Reduserer kontrasten i modus for kunstig farge. Ingen funksjon i modus for naturlig farge.
Talltast 2	Inverter filterfarge. Inverterer gjeldende kunstig farge. Ingen funksjon i modus for naturlig farge.
Talltast 3	Veksle mellom kunstige farger. Fargene det kan veksles mellom er naturlig, hvit/svart, gul/svart, grønn/svart, rød/svart, gul/blå og hvit/blå (fargene som er tilgjengelige avhenger av brukerinnstillinger).
Talltast 4	Øk kontrast. Øker kontrasten i modus for kunstig farge. Ingen funksjon i modus for naturlig farge.
Talltast 5	Zoom ut. Zoomer kamerabildet ut (digitalt). Når zoomgrensen er nådd, opplyses det om dette i en talemelding dersom innstillingen "informasjon" står på "full".
Talltast 6	Zoom inn. Zoomer kamerabildet inn (digitalt). Når zoomgrensen er nådd, opplyses det om dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".
Talltast *	Gå til minimum zoom. Zoomer ut til kameraets minimum zoomnivå er nådd.
Talltast #	Ettrykks-autofokus. Starter funksjonen for ettrykks- autofokus. Hold kameraet stille mens funksjonen jobber. Når

fokuseringen er fullført, opplyses det om dette i en talemelding (enten positiv eller negativ) dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".

Bla- og valgtast **OCR-snapshot.**

Tar et snapshot og OCR behandler bildet. Etter at OCR-behandlingen er fullført (dette kan ta litt tid avhengig av hvor mye tekst det er i bildet og kvaliteten på bildet), leses og rulles den konverterte teksten til deg umiddelbart. Dette er hovedfunksjonen i applikasjonen. (Bla- og valgtasten er alltid hovedfunksjonen i hver visning.)

**Bla- og valgtast,
snapshot opp
eller til høyre.**

Når telefonen er i en horisontal visning, før bla- og valgtasten opp for å ta et snapshot og endre til stillbildevisning. Når telefonen er i en vertikal visning, før bla- og valgtasten til høyre for å ta et snapshot og endre til stillbildevisning.

Høyre valgtast **Avslutt applikasjon.**

Avslutter applikasjonen dersom bruker godtar avslutning på forespørsel.

Venstre valgtast **Applikasjonsmeny.**

Viser applikasjonsmenyen.

3.1.2 Stillbildevisning

Talltast 1 **Reduser kontrast.**

Reduserer kontrasten i modus for kunstig farge. Ingen funksjon i modus for naturlig farge.

Talltast 2 **Inverter filterfarge.**

Inverterer gjeldende kunstig farge. Ingen funksjon i modus for naturlig farge.

Talltast 3	Veksle mellom kunstige farger. Fargene det kan veksles mellom er naturlig, hvit/svart, gul/svart, grønn/svart, rød/svart, gul/blå og hvit/blå (fargene som er tilgjengelige avhenger av brukerinnstillinger).
Talltast 4	Øk kontrast. Øker kontrasten i modus for kunstig farge. Ingen funksjon i modus for naturlig farge.
Talltast 5	Zoom ut. Zoomer kamerabildet ut (digitalt). Når zoomgrensen er nådd, opplyses det om dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".
Talltast 6	Zoom inn. Zoomer kamerabildet inn (digitalt). Når zoomgrensen er nådd, opplyses det om dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".
Talltast *	Gå til minimum zoom. Zoomer ut til kameraets minimum zoomnivå er nådd.
Talltast #	Panorer bildet til høyre kant.
Talltast 0	Panorer bildet til venstre kant.
Bla- og valgtast	OCR. OCR behandler bildet. Etter at OCR-behandlingen er fullført (dette kan ta litt tid avhengig av hvor mye tekst det er i bildet og kvaliteten på bildet), presenteres teksten umiddelbart til brukeren.
Bla- og valgtast, opp	Panorer bildet opp. Dersom slutten på bildet er nådd opplyses dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".

Bla- og valgtast, ned **Panorer bildet ned.**
Dersom slutten på bildet er nådd opplyses dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".

Bla- og valgtast til høyre **Panorer bildet til høyre.**
Dersom slutten på bildet er nådd opplyses dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".

Bla- og valgtast mot venstre **Panorer bildet mot venstre.**
Dersom slutten på bildet er nådd opplyses dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".

Høyre valgtast **Forrige visning.**
Tilbake til forrige visning.

Venstre valgtast **Applikasjonsmeny.**
Viser applikasjonsmenyen.

3.1.3 Tekstvisning

Talltast 0 **Stopp rulling.**
Dersom teksten rulles, stopper denne tasten rulling.

Talltast 2 **Inverter filterfarge.**
Inverterer gjeldende kunstig farge. Ingen funksjon i modus for naturlig farge.

Talltast 3 **Veksle mellom kunstige farger.**
Fargene det kan veksles mellom er naturlig, hvit/svart, gul/svart, grønn/svart, rød/svart, gul/blå og hvit/blå (fargene som er tilgjengelige avhenger av brukerinnstillinger).

Talltast 5	Zoom ut. Zoomer kamerabildet ut (digitalt). Når zoomgrensen er nådd, opplyses det om dette i en talemelding dersom innstillingen "informasjon" står på "full".
Talltast 6	Zoom inn. Zoomer kamerabildet inn (digitalt). Når zoomgrensen er nådd, opplyses det om dette i en talemelding dersom innstillingen "informasjon" står på "full".
Talltast 7	Veksle mellom rulleteype. Veksle mellom kolonne- og ordrulling.
Bla- og valgtast	Start rulling/stans rulling midlertidig. Dersom rulling ikke er aktivert vil rullingene starte i siste aktive rulleteype. Dersom rulling er aktivert vil rullingene stanse midlertidig. Gjentatt trykk vil frigi den midlertidige stansen.
Bla- og valgtast, Opp	Flytt bakover i teksten.
Bla- og valgtast, Ned	Flytt forover i teksten.
Bla- og valgtast mot venstre	Når rulling er aktivert, skjer flytting ett ord bakover.
Bla- og valgtast til høyre	Når rulling er aktivert, skjer flytting ett ord forover.
Høyre valgtast	Forrige visning. Tilbake til forrige visning.
Venstre valgtast	Applikasjonsmeny. Viser applikasjonsmenyen.

KAPITTEL 4 Applikasjonsmeny

Applikasjonsmenyen er tilgjengelig fra alle visninger. Majoriteten av menypunkter er tilgjengelig fra alle visninger.

Der er alltid tilgang til menypunktene via det numeriske tastaturet (hurtigtaster) når menyen er åpen. På den måten kan du lære menyen du bruker mest utenat.

Menypunkter:

Hurtigtast:

0. Om

0

Viser applikasjonsinformasjon.

Tilgjengelig i alle visninger.

1. Åpne

1

Fra tekstvisningen kan du åpne ethvert tekstdokument (.txt). Fra alle andre visninger kan du åpne ethvert tekstdokument (.txt) og alle støttede bildefiler (.JPEG, .BMP, .PNG, .GIF, .MBM - støtte kan variere avhengig av telefonmodell). Via denne metoden kan du få applikasjonen til å lese eller OCR-behandle alle dine eksisterende dokumenter og bilder.

2. Lagre

2

Lagrer gjeldende bilde. Dersom det ikke har et filnavn, er funksjonaliteten den samme som for "Lagre som".

Tilgjengelig i Stillbilde- og Tekstvisning (ikke når tekstrulling er aktivert).

3. Lagre som

3

Lagrer gjeldende bilde med nytt filnavn.

Tilgjengelig i Stillbilde- og Tekstvisning (ikke når tekstrulling er aktivert).

4. Innstillinger

4

Åpner menyen for innstillinger.

Tilgjengelig i alle visninger (ikke når tekstrulling er aktivert).

5. Fabrikkinnstillinger

5

Tilbakestiller alle applikasjonsinnstillingene til fabrikkinnstilling.

Tilgjengelig i alle visninger (ikke når tekstrulling er aktivert).

6. Send som

6

Viser en undermeny som lar deg velge å sende den tilgjengelige teksten på en av følgende måter:

- E-post 1

For å kunne sende en e-post må du enten sette opp eller ha en gyldig e-postkonto.

- MMS 2

- SMS 3

SMS er begrenset i lengde; det kan være smartere å velge MMS eller e-post dersom teksten er lang. Sjekk med tilbyderen din og telefonens bruksanvisning for å finne ut av maksimal lengde på sammenkoblede SMS'er.

- Bluetooth

I bildevisning sendes bildet som JPEG-fil. I tekstvisning sendes bildet som TXT-fil.

9. Avslutt

9

Avslutter applikasjonen. Tilgjengelig i alle visninger.

På noen mobiltelefoner kan operativsystemet på telefonen legge til et ekstra menypunkt øverst i menylisten, punktet "Vis åpne appl.". Det menypunktet tildeles ikke en hurtigtast slik menypunktene i applikasjonen gjør.

4.1 Meny for innstillinger

Menyen kan nås fra applikasjonsmenyen i alle visninger (med unntak av når tekstrulling er aktivert).

1. OCR-språk

Velger språket som OCR-motoren klarer å oppdage. Maksimalt 4 språk kan velges samtidig.

2. OCR-leksikon

Skrur OCR-leksikonet på eller av. Dersom leksikonet er aktivert vil applikasjonen forsøke å korrigere ord som er feiltolket eller har stavefeil.

3. OCR- sekvens

Dersom aktivert, vil applikasjonen legge til tekst fra de nye OCR prosessene til de som ble utført tidligere i applikasjonen. Dersom den ikke er aktivert vil gammel tekst alltid overskrives med ny tekst. Dersom innstillingen står på "Spør", vil applikasjonen spørre deg om hva som skal gjøres etter hver OCR-prosess.

4. Talemotor

Applikasjonen kan benytte to forskjellige talemotorer, Acapela-motoren og Nokia-motoren. LVI anbefaler Acapela-talemotoren (må støttes av lisens).

5. Språk

Dette er språket, stemmen og kvaliteten å bruke for tekst til tale, når teksten leses fra OCR. Språket bør være likt dokumentetspråket for å gi best resultater. Vennligst vær klar over at dersom telefonen er i stillemodus (innstilling som f.eks. deaktiverer ringetonen), da vil også språket være deaktivert.

6. Hendelsesspråk

Dette er språket, stemmen og kvaliteten som benyttes for applikasjonens informasjon, dvs. Applikasjonsrelatert taleproduksjon. Vennligst vær klar over at dersom telefonen er i stillemodus (innstilling som f.eks. deaktiverer ringetonen), da vil også språket være deaktivert.

7. Informasjon

Styrer hvor mye som skal uttales av applikasjonen.

Full – All informasjon, menyer og dialogbokser vil bli uttalt av applikasjonen.

Vital - Kun informasjon av vesentlig informasjon vil bli uttalt, dvs. f.eks. feilmeldinger.

Ingen - Ingen informasjon vil bli uttalt av applikasjonen.

8. Filterfarge

Velger hvilke farger som er tilgjengelig ved filtrering av video, stillbilde og tekst.

9. Volum

Talevolum. Når volumet endres, opplyses det om dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".

10. Blitsinnstilling

Blitsen kan stilles inn på av, auto eller alltid på. LVI anbefaler at blitsen alltid er på.

11. Blokker skjermsparer

Angir skjermsparetiden.

12. Hastighet

Setter talehastighet. Når talehastighet endres, opplyses det om dette i en talemelding dersom innstillingen "Informasjon" står på "Full".

13. Skjermlesermodus

Setter programmet i stille modus. Slår av lyden i programmet slik at tale kan håndteres av andre programmer."

4.2 Bildetaking

Når du tar bilder med MLGO-applikasjonen anbefaler vi at du sørger for at dokumentet er justert i stående stilling med mobiltelefonen, for best og raskest mulig OCR-resultat. Applikasjonen kan likevel håndtere bilder tatt i enhver stilling, selv bilder som er feil vei.

Den interne prosedyren fra bildetaking til bildepresentasjon eller OCR er som følger. Når bildet er tatt av kameraet avgjør applikasjonen om bildet inneholder områder som kun inneholder deler av tekst, dvs. om det mangler tekst (du vil bli informert dersom det mangler tekst, f.eks. "avkuttet tekst på toppen og til høyre" eller "avkuttet tekst øverst til høyre"). Deretter avgjør applikasjonen skråstillingen av bildet og om bildet er feil vei. Etter påvisningen av rotasjonsbehov roteres bildet (ved behov) for tilpasning til både Stillbildevisning og OCR-motoren. Denne behandlingen tar litt tid, men vil øke nytten til applikasjonen din.

KAPITTEL 5 Lisensiering

MLGO-applikasjonen inneholder et lisensieringssystem som knytter applikasjonen til mobiltelefonen din. Første gang applikasjonen startes må den lisensieres, enten med en produktlisens eller med en engangs prøvelisens.

Når den ulisensierte versjonen starter, dukker visningen for lisens opp etter visning av applikasjonens velkomstskjerm. Fra denne visningen kan du enten velge å aktivere applikasjonen som vil føre til dialogboksen for lisensaktivering, eller du kan starte en 30-dagers prøveperiode (så fremt ikke prøveperioden er utgått - prøveversjonen kan kun kjøres en gang).

5.1 Lisensaktivering

Lisensen aktiveres i dialogboksen for lisensaktivering. Her kan du legge inn lisensnøkkelen på 26 tegn som du mottok fra forhandleren. For å få riktig lisens-ID fra forhandleren må du oppgi IMSI-nummeret for SIM-kortet. Du finner IMSI-nummeret i MagniLink Go!-programmet i Om-dialogboksen og når du bruker dialogboksen for aktivering av lisens.

Dersom korrekt lisensinformasjon er lagt inn vil applikasjonen fungere fra nå av uten at du må legge inn lisenskode på nytt. Dersom lisensinformasjonen er feil, vil du ikke komme lenger enn denne dialogboksen. Dersom du har mottatt feil lisensinformasjon eller du ikke har en lisens-ID, vennligsts ta kontakt med forhandleren din.

SECTION 6 Tredjeparts applikasjoner

MagniLink Go! er designet for å fungere så problemfritt som mulig med andre tilgangssapplikasjoner. Uansett kan det oppstå mindre konflikter som kan unngås dersom MagniLink Go! eller den andre tilgangssapplikasjonen settes opp på en bestemt måte.

De mest vanlige konfliktene som kan oppstå mellom MagniLink Go! og tredjeparts tilgangssapplikasjoner er de konflikter som oppstår i sammenheng med bruk av skjermlesere og skjermforstørrelser.

Når en skjermforstørrelse benyttes parallelt med MLGO vil det resultere i at video, bilde og tekst fra MLGO forstørres. Dette kan negativt påvirke ytelsen til mobiltelefonen din. Vi anbefaler at du skruer av skjermforstørrelse ved bruk av MLGO.

Samtidig bruk av en skjermleser når MLGO er aktiv kan føre til at skjermleseren og MLGO leser meny punkter, dialogbokser og applikasjonstekst samtidig.

Det er forskjellige måter å forhindre at disse problemene oppstår på avhengig av versjonen til applikasjonen du har. Det kan bli nødvendig å sette opp den assisterende applikasjonen slik at den skruer av skjermforstørrelse eller skjermlesing automatisk når MLGO er aktiv eller at du manuelt skruer av den andre applikasjonen ved hjelp av en tastatursnarvei når MLGO er i bruk. Et annet alternativ er å skru av informasjon i MLGO, hvilket vil hindre MLGO fra å lese menyer og dialogbokser, og dermed legge ansvaret over på den andre applikasjonen.

Se tips for to av de største tilgangssapplikasjonene i Smartphone-segmentet angitt nedenfor.

6.1 Nuance - Talks and Zooms

Fra versjon 4.10 av Talks and Zooms har du muligheten til å angi en applikasjonsinnstilling for MLGO-applikasjonen inne i Talks and Zooms. På den måten vil Talks and Zooms handle iht. applikasjonsinnstillinger når MLGO startes. Vennligst sjekk manualen til Zooms og Talks for mer informasjon om applikasjonsinnstillinger (gratis oppgradering fra versjon 4.0 til 4.10).

6.2 Code Factory - Mobile Speak og Mobile Magnifier

MobileSpeak (MS) og MobileMagnifier (MM) kan deaktiveres manuelt ved hjelp av hurtigtasten definert i applikasjonen eller du kan legge til en innstilling i MS og MM som automatisk vil deaktivere disse applikasjonene når MLGO er aktiv. Vennligst sjekk manualen for disse applikasjonene for mer informasjon om applikasjonsbruk og innstillinger.

KAPITTEL 7 Tekniske spesifikasjoner

Modell	MLGO
Støttede telefoner	Nokia N82, N85, N86, 6220 Classic (6220C), 6710 Navigator, 6720 Classic, Nokia Slide 6700 og E72. Oppdatert liste over telefoner som støttes, vil være tilgjengelig på www.lvi.se .
Systemkrav	Operativsystem: Symbian 9.3 S60. 3rd Ed, FP1 og FP2
Kamera	Anbefalt 5 megapiksler med autofokus. Minimum 3,2 megapiksler med autofokus.
Tale	Acapela: High Quality Text To Speech (TTS) Nokia: Built-in voices fra Nokia
Applikasjonsspråk	Dansk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, tysk, polsk, spansk og svensk
Forstørrelse	1 - 7 x (avhengig av telefonmodell)
Fargemodus	Naturlige farger, 6 forskjellige kunstige farger (positive/negative)
Oppdateringer	Gratis oppdateringer av programvare i versjonen