


Bruksanvisning

TimeGuide

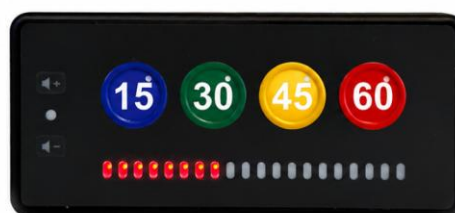

Tillverkare: LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö

Tel: 0470 - 727700

info@lvi.se
www.lvi.se

Avsedd användning och indikation

TimeGuide är en visuell timer som har utvecklats för personer som behöver stöd att bättre uppfatta och förstå tidens längd och förlopp. TimeGuide är hållbar och konstruerad för att klara stötar och tapp vid normal användning. Den är vattentät och kan användas både inomhus och utomhus.

Livslängd och säker hantering

I enlighet med förordning (EU) 2017/745 (MDR) anger tillverkaren den tidsperiod under vilken produkten förväntas upprätthålla säker och effektiv prestanda under normala användningsförhållanden. För denna produkt är den rekommenderade livslängden 5 år från inköpsdatum. Observera att den angivna livslängden inte motsvarar produktens fulla tekniska livslängd. Den avser den period under vilken tillverkaren har verifierat produktens säkerhet och funktion. Efter denna period kan produkten fortfarande fungera, men faktorer såsom yttre slitage eller tekniska förbättringar kan motivera en utvärdering för eventuellt utbyte



Produkten uppfyller alla krav för CE-märkning av medicintekniska produkter enligt förordningen MDR 2017/745.



Symbolen MD anger att produkten är en medicinteknisk produkt enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR).

Säkerhetsinformation

- För säker användning, läs alltid bruksanvisningen innan du använder TimeGuide.
- För säker och korrekt användning ska endast de medföljande remmarna med säkerhetslås, som är särskilt avsedda för TimeGuide, användas. Detta för att minska risken för kvävning och andra personskador.


Innehåll i kartongen

TimeGuide levereras i en kartong med följande innehåll:

- TimeGuide
- Lång rem
- Kort rem
- AA-batterier 1,5 V
- Bruksanvisning

Enkel att använda och ger tydligt visuellt stöd för att följa tiden.

TimeGuide har fyra knappar som motsvarar olika tidslängder. Tryck på en knapp för att starta nedräkningen. Tiden visas tydligt med hjälp av lysande prickar i en tidsstapel som slocknar efter hand. När alla prickar har slocknat är tiden slut och ett larm startar. Den inbyggda ljussensorn anpassar ljusstyrkan på prickarna i tidsstapeln efter omgivningens ljus. En lång och en kort rem medföljer som tillbehör, som enkelt kan användas för att bära med sig TimeGuide i vardagen.

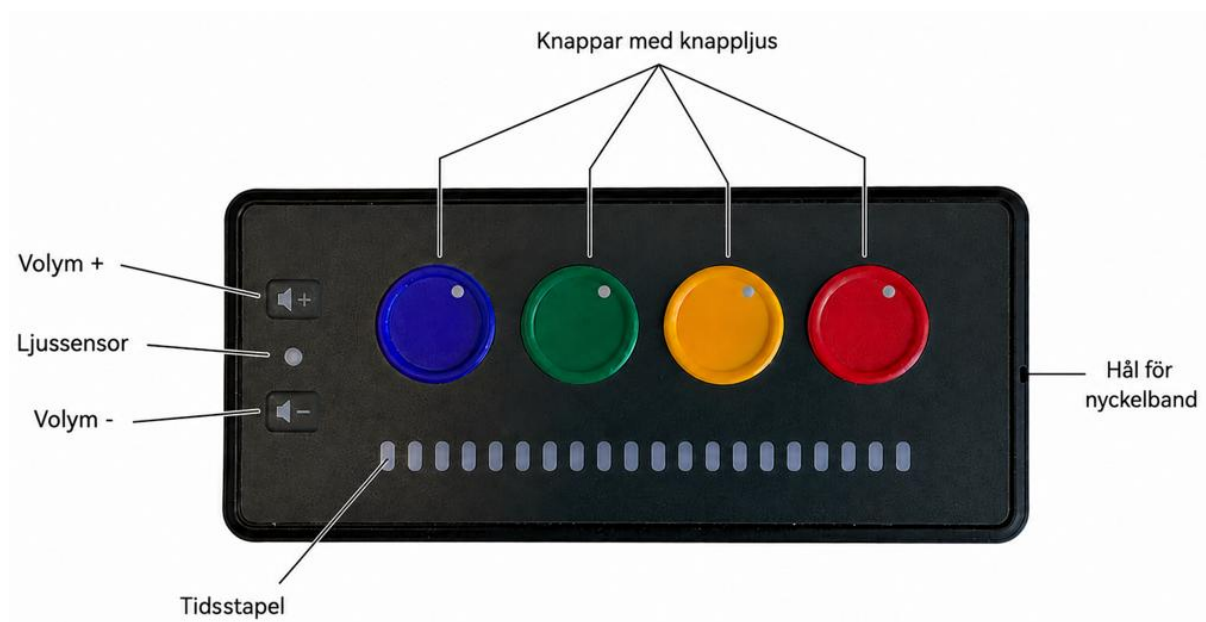

TimeGuide finns i fyra olika modeller. knapparna motsvarar olika tidsinställningar i minuter.

Modell:	TimeGuide 8	TimeGuide 20	TimeGuide 60	TimeGuide 80
	2 min	5 min	15 min	20 min
	4 min	10 min	30 min	40 min
	6 min	15 min	45 min	60 min
	8 min	20 min	60 min	80 min

Användning och inställningar

Funktion	Knappar	Information
Starta timer	Välj tid genom att trycka på knappen som motsvarar önskad tid.	Antalet prickar som tänds på tidsstapel motsvarar tiden. Om knappbelysningen är aktiverad tänds ljuset på den valda knappen. När timern avslutas aktiveras ett larm med blinkande tidsstapel, ljudsignal och vibration.
Avbryt larmsignal	Tryck på valfri knapp.	Larmsignal avbryts. (Larmsignal avbryts automatiskt efter 10 sek)
Avbryt timer	Tryck och håll ner blå + röd knapp i 2 sek. ● + ●	Nedräkning avbryts. (Inte möjligt om knapplås är aktiverat)
Ljudvolym	Tryck på Volym + / - för att höja eller sänka volymen.	Volymen har fem nivåer: 1 är lägsta ljud (tyst) och 5 är högsta (max). (Nivå 3 grundinställning)

Följande inställningar kan inte ändras när timern är aktiv.

Inställning	Knappar	Information
Larmsignal	Tryck och håll ner grön + gul knapp i 2 sek. ● + ●	Tryck på Volym + / - för att ändra ljudsignal. Inställd signal spelas vid stegning. Ljud 1 (grundinställning) Ljud 2 Ljud 3
Vibration	Tryck och håll ner grön + röd knapp i 2 sek. ● + ●	Tryck på Volym + / - för att ändra. Steg 1: Av Steg 2: På (grundinställning) Steg 3: På i tyst läge
Knappljus	Tryck och håll ner blå + gul knapp i 2 sek. ● + ●	Tryck på Volym + / - för att ändra. Steg 1: Av Steg 2: På (grundinställning)
Max ljusstyrka	Tryck och håll ner blå + grön knapp i 2 sek. ● + ●	Tryck på Volym + / - för att ändra ljusstyrka. Inställd ljusstyrka visas vid stegning. Ljusstyrka finns i fem steg: 1 = min, 5 = max. (3 = grundinställning)

Inställning	Knappar	Information
Lämna inställningar	Tryck och håll ner blå + röd knapp i 2 sek. ● + ●	Lysande prickar blinkar tre gånger. Efter 10 sekunders inaktivitet avslutas inställningsläget automatiskt.
Knapplås	Tryck och håll ned den blå knappen. Medan den blå knappen hålls nedtryckt, tryck och släpp den gröna , därefter den gula och slutligen den röda knappen. ● + (●, ●, ●)	Låst= Tidsstapel blinkar 1 gång. När knapplåset är aktiverat kan endast timern startas och larmsignal stängas av. (Larmsignal avbryts automatiskt efter 10 sek) Upplåst= Tidsstapel blinkar 2 gånger. (Grundinställning)
Återställning	Tryck och håll ner blå + grön + gul + röd knapp i 2 sek ● + ● + ● + ●	Återställer produkten till grundinställningarna


Batteridrift

- TimeGuide drivs av två AA-batterier. Batterierna ingår i leveransen.
- När det är dags att byta batterier ljuder en signal varje halvtimme.
- Om TimeGuide inte ska användas under en längre tid, ta ur batterierna.

Byt batterier (Steg för steg)

1. Skruva upp batteriluckan med en skruvmejsel.
2. Byt ut batterierna mot nya AA-batterier. Kontrollera att batterierna sätts i rätt riktning (+ och -).
3. Montera tillbaka batteriluckan och skruva fast den.

OBS! Innan batteriluckan monteras tillbaka på TimeGuide, kontrollera att tätningen på batteriluckan är ren och fri från smuts.

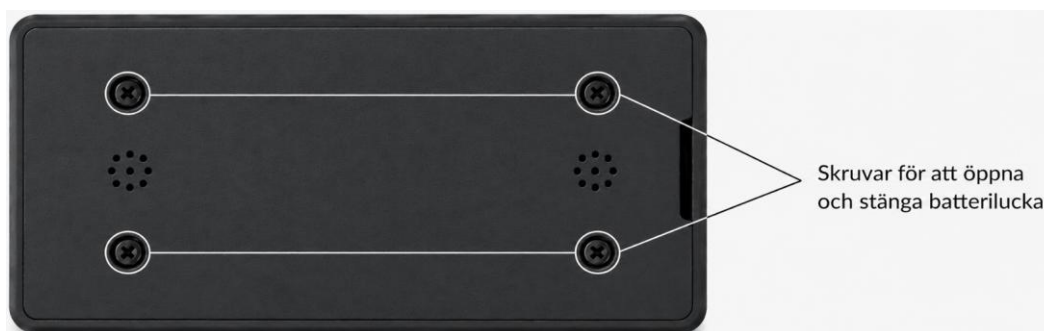

Rengöring

Vid rengöring av TimeGuide, använd en trasa fuktad med ljummet vatten och diskmedel eller andra milda rengöringsmedel.

Kassering och Återanvändning

Om produkten ska återanvändas ska den först rengöras/rekonditioneras noggrant enligt rengöringsinstruktionen samt inspekteras så att inga skador på materialet förekommer.



Bortskaffande av gamla elektriska och elektroniska apparater (gäller för EU samt andra europeiska länder med särskilda insamlingssystem)

Om produkten eller dess förpackning är försedd med denna symbol, ska den inte hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in till ett lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att svara för att denna produkt omhändertas på rätt sätt, hjälper du till att förhindra den negativa påverkan på miljö och människors hälsa, som annars skulle kunna bli en följd av olämplig avfallshantering av denna produkt.

Materialåtervinning bidrar till hushållningen av naturresurser. För att få närmare information om återvinning av denna produkt, kan du kontakta din kommun, ditt renhållningsföretag, eller den butik där du köpte produkten.

Produktspecifikation

Mått	110 x 50 x 26 mm
Vikt	0,15 kg
Batteri	2 x AA 1,5 V
IP-klass	IP67
Omgivningstemperatur	-10° C till +40° C
Förväntad livslängd	5 år

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturers name: *LVI Low Vision International AB*

Manufacturers Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*

Web: *<http://www.lviglobal.se>*

SRN (Single Registration Number): *SE-MF-000004178*

Basic UDI-DI (GMN): *7330724TGTA*

Brand name or trademark: *TimeGuide*

Product code: *TG-8, TG-20, TG-60, TG-80*

Classification: *Class 1*

Type of equipment: *A visual timer for individuals who require cognitive support in perceiving and understanding the passage and duration of time.*

Conformity assessment route: *LVI Low Vision International AB uses the procedures for the CE-labeling of their products according to Article 52(7) of Regulation MDR 2017/745.*

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of LVI Low Vision International AB. We hereby declare that the medical device(s) specified above meets the provision of the Regulation (EU) MDR 2017/745 for medical devices and Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries, where it is applicable. This declaration is supported by the Quality System approval to ISO 9001 issued by Intertek. All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.


☒ Manufacturer

☐ Manufacturer's authorized representative

Date

16-06-2026

Signature

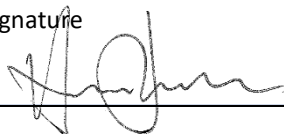

Position

Managing Director

Clarification

Henrik Blomdahl

