

Hurtigmanual MagniLink PcViewer

((MagniLink S, MagniLink Pro, MagniLink Air, MagniLink Air Duo))

Oppstart og innstillinger

Starter PcViewer	Ctrl + Alt + S
Åpne innstillinger	F9
Standardinnstillinger	F11
Åpne brukerveiledning	F12

Meny

Bytt menyfane	V
Øk menystørrelse	Ctrl + minus
Reduser menystørrelse	Ctrl + minus
Skjul meny	Ctrl + H

Forstørring

Øk forstørrelsen	Pil opp
Redusere forstørrelsen	Pil ned
Oversiktsmodus	Ctrl + O

Kontrast og fargebilde

Naturlige farger/Gråtoner	F1
Positive farger	F2
Positive farger (forrige)	Shift + F2
Negative farger	F3
Negative farger (forrige)	Shift + F3
Øk lysstyrke/kontrast	Pil høyre
Reduser lysstyrke/kontrast	Pil venstre

Lys (kun for kamera med LED-lys)

Reduser lysstyrken	Ctrl + 6
Øk lysstyrken	Ctrl + 7

Fokus

Autofokus av/på	Ctrl + J
Reduser fokusavstand	Shift + pil opp
Øk fokusavstand	Shift + pil ned

Roter og speilvend

Roter med klokka	R
Roter mot klokka	Shift + R
Roter 90° med klokka	Ctrl + R
Roter 90° mot klokka	Ctrl + Shift + R
Speilvend bilde	Ctrl + I

Hjelpelinjer og persienner

Flytt venstre/opp	Ctrl + pil venstre
Flytt høyre/ned	Ctrl + pil høyre

Bilde

Lagre bilde	F5
Lagre bilde automatisk	Shift + F5
Åpne bilde	F6
Åpne siste bilde	Shift + F6
Fryse kamerabilde	Ctrl + F
Kopier bilde	Ctrl + C

Video

Start opptak	Ctrl + F5
Start opptak automatisk	Ctrl + Shift + F5
Åpne video	Ctrl + F6
Åpne siste video	Ctrl + Shift + F6

Notisblokk

Åpne i notisblokk	F7
Åpne alle i notisblokk	Skift + F7
Nytt notat	Ctrl + N
Åpne notater	Ctrl + O
Lagre notater	Ctrl + S
Angre	Ctrl + Z
Gjør om	Ctrl + Skift + Z
Velg penneverktøy	Ctrl + P
Velg markeringsverktøy	Ctrl + L
Velg tekstverktøy	Ctrl + T
Velg viskelærverktøy	Ctrl + E
Velg panoreringsverktøy	Ctrl + F

Bildedeling med PC / SuperNova

Neste deling	F8
Forrige deling	Ctrl + F8
Alltid øverst	Ctrl + A
Mot venstre	Ctrl + Shift + pil venstre
Mot høyre	Ctrl + Shift + pil høyre
Oppover	Ctrl + Shift + pil opp
Nedover	Ctrl + Shift + pil ned

Tekst til tale

Følgende kommandoer er bare tilgjengelige sammen med kameraer som er lisensiert for OCR. Du får også tilgang til funksjonene via menyen i selve programvaren.

Start OCR -behandlingen	F4
Legg til ny side	Shift + F4
Helt bilde	Ctrl + L
Lim inn tekst	Ctrl + V
Lim inn og legg til tekst	Ctrl + Skift + V
Kolonnelvelger Av/På	Ctrl + S

Lesing

Start/Pause lesing	1
Til toppen	2
Les forrige enhet	3
Les neste enhet	4
Bytt leseenhet	5

Stemmeinnstillinger

Reduser talehastighet	6
Øk talehastighet	7
Reduser lydstyrken	8
Øk lydstyrken	9
Neste stemme	Ctrl + 0

Forstørrelse

Øke forstørrelsen	Pil opp
Redusere forstørrelsen	Pil Ned
Øk skriftstørrelse	Skift + +
Reduser skriftstørrelse	Skift + -

Visningsmodus

Endre visningsmodus	B
Stillemodus	N

Dokument behandling

Lagre dokumenter	Alt + F5
Åpne dokumenter	Alt + F6
Neste side	Page Down
Forrige side	Page Up
Slett side	Delete

Navigering (Hvis dokumentet er forstørret)

Panorer til venstre	A
Panorer til høyre	D
Panorer opp	W
Panorer ned	S

Funksjoner for løsninger med to kamera

Bytt kamera	C
Bytt delingsmodus kamera	X
Flytt delingen venstre/opp	Shift + pil venstre
Flytt delingen høyre/ned	Shift + pil høyre

Styring av avstandskamera (Air og Air Duo)

Panorer kamera til venstre	A
Panorer kamera til høyre	D
Panorer kamera opp	W
Panorer kamera ned	S
Lagre posisjon 1	Ctrl + 1
Lagre posisjon 2	Ctrl + 2
Lagre posisjon 3	Ctrl + 3
Gå til posisjon 1	Shift + 1
Gå til posisjon 2	Shift + 2
Gå til posisjon 3	Shift + 3