

MagniLink S

Premium Series



Reddot award



- **Fantastisk Full HD-bild**
– för både dator och monitor
- **TTS Textuppläsning** för
PC och Mac – skannar
sekunds snabbt en hel A4
- **Fullt kompatibel** med
SuperNova och ZoomText

MagniLink S Premium

MagniLink S – på dina villkor

MagniLink S är en mycket populär läskamera över hela världen. Den har ett prisbelönt design (reddot award), överlägsen bildkvalitet, modern teknik och smarta funktioner. Systemet är enkelt att bära med sig – t ex mellan hem, skola eller arbetsplats – och kan anslutas till både dator (PC/Mac/Chromebook) och monitor. Du väljer själv de funktioner och tillbehör som passar just dina behov.



reddot design award

2 Funktioner & tillbehör

Kraftfull TTS för textuppläsning

Med TTS (Text To Speech) kan MagniLink S användas för att omvandla tryckt text till tal. Texten kan också presenteras på skärmen på olika sätt (läs mer på s 9) eller sparas i en fil på datorn för senare redigering. Upp till en hel A4 kan omvandlas på en gång.

Röster på svenska och engelska ingår och du kan välja till fler språk. Komplettera också gärna med ett par hörlurar.



Smart dockningsstation

En dockningsstation med fördragna kablar gör anslutningen till PC, Mac, Chromebook eller monitor snabb och smidig – MagniLink S blir både portabel och stationär. Extern kontrollpanel, bildskärmskabel och strömadapter ingår. Finns med läsbord eller bordsfäste. Läsbordet har roterbar hållare, friktionsbromsar i X/Y-led och klarar upp till A3-storlek.



Funktion
för vänster-/
högerhänta

Taktila knappar



1 Grundval

HD eller Full HD?

MagniLink S kan levereras med HD- eller Full HD-kamera. Båda erbjuder ledande bildkvalitet, men Full HD ger även:

- ännu fler detaljer i texter och bilder, skarpast möjliga bild i både läs- och avståndsläge
- ännu lägre initialförstoring, vilket ger än bättre översikt på material som ska läsas samt OCR-behandling av en hel A4-sida (med tillval TTS Text to Speech)

Bilddelning (Split)

Med ett hårdvarusplit-kit (splitbox, extern kontrollpanel och split-kablar) kan en PC/Mac/Chromebook och/eller en avståndskamera anslutas och bilden kan delas mellan dessa enheter och läskameran (MagniLink S). Perfekt i skol- eller arbetsmiljö. LVI erbjuder även extern avståndskamera med SD- eller HD-kamera och som tillbehör finns även tak- och väggfästen.



Övriga tillbehör

LVI erbjuder även low vision-anpassade monitorer (18,5" eller 23") med bordsfot eller arm, externa kontrollpaneler med/utan bordshållare med mera.



MagniLink S finns med **äkta Full HD** som ger en makalöst bra bild. Bättre finns inte!

MagniLink S Premium

Individuellt **anpassningsbar**

Den prisbelönta, modulbaserade designen möjliggör anpassning för varje enskild användares unika behov. Genom att välja olika kombinationer av kameror, anslutningsmöjligheter, funktioner och tillbehör, kommer MagniLink S att tillgodose behovet för respektive användare i skolan, på arbetsplatsen – eller var som helst där tillgänglighet behövs.

Anslut till monitor



Anslut till PC, Mac eller Chromebook



Dela skärmbilden (Split)



TTS Textuppläsning till PC och Mac



Plug & play!

MagniLink S kan anslutas direkt till valfri bildskärm och är lika idealisk för arbete som för fritidssysslor. Läs en rapport eller arbeta med handarbete. Arbeta med ett dokument, skriv ett brev eller se på bilder. Det går till och med se sig själv med hjälp av spegelläget, vilket är praktiskt, t ex om man vill lägga en make-up.

MagniLink S tar minimalt utrymme på skrivbordet och kan snabbt och smidigt fällas ihop och plockas undan, eller tas med.



MagniLink S Premium

Alltid **oberoende**

MagniLink S är idealisk för studenter som behöver ett modernt och portabelt system som kan anslutas till PC, Mac eller Chromebook. Systemet kan t ex användas för att läsa skolböcker och dokument, läsa anteckningar på whiteboarden och för att spara bilder eller videosekvenser. Systemet får ström direkt via datorns USB3-uttag – batteri och extra strömadapter behövs därför inte.



Fällbenen gör att systemet kan placeras precis intill en laptop, varför MagniLink S tar upp mycket liten skrivbordsyta.



Alltid deltagande

MagniLink S uppdateras kontinuerligt för perfekt kompatibilitet med senaste operativsystemen för PC, Mac och Chromebook. Mjukvaran för PC och Mac är också anpassad för att kunna köras tillsammans med externa hjälpmedelsprogram som exempelvis SuperNova och ZoomText som är en viktig del av en anpassning – den som använder en läskamera för förstoring

och uppläsning av text behöver ofta även motsvarande funktioner i sin dator.

Se gärna www.lvi.se/produkter/programvara för mer information och gratis demoversioner av flera hjälpmedelsprogram.



MagniLink S Premium TTS

Alltid effektiv

För PC- och Macanvändare erbjuds MagniLink S TTS som inkluderar flera funktioner, exempelvis textuppläsning (Text To Speech). Att få texten uppläst möjliggör både ökad läshastighet och läsuthållighet. MagniLink S TTS läser upp text automatiskt, rad för rad, ord för ord eller tecken för tecken. Den OCR-behandlade texten presenteras på skärmen och synkroniseras med ljudet.

Texten kan också sparas och öppnas i en texteditor för korrektur eller bearbetning. Upp till **en hel A4-sida kan läsas in på en gång** och med hjälp av snabbkommandon kan du snabbt och effektivt läsa in flera

sidor inom loppet av några sekunder. Med MagniLink S TTS kan du ändra färg, förstoringsgrad och kontrast medan texten blir uppläst eller scrollas på skärmen i tyst läge. Det är också möjligt att ansluta hörlurar för att lyssna till texten utan att bli störd av, eller störa, din omgivning.

Programvaran till MagniLink S TTS är enkel att använda, bland annat tack vare inbyggt talstöd i menyerna. Talsynteser finns på engelska och de flesta lokala språk, såsom flamländska, nederländska, danska, brittisk, amerikansk och australiensisk engelska, ryska, finska, franska, italienska, tyska, norska, polska, portugisiska, spanska och svenska.



Kraftfull TTS-mjukvara för PC och Mac

- **Skanna en hel A4 på några sekunder**
Få mer gjort på mindre tid.
- **Synkroniserat text och tal**
Följ enkelt med i texten på skärmen medan du lyssnar.
- **Optimerade presentationslägen**
Välj det presentationsläge som passar dig bäst (bokstav för bokstav, ord för ord, linje för linje eller tecken för tecken).
- **Spara text och redigera den i datorn**
Med snabbkommandon kan du snabbt läsa in flera sidor på några sekunder för att sedan spara eller redigera texten.
- **Högkvalitativa röster är inkluderade**
Behagliga röster som är bekväma att lyssna till medföljer (PC).
- **Enkelt att använda**
Det är mycket enkelt att komma igång med TTS-funktionen.
- **Menyer med voice feed back**
Röstbekräftelse på valda menyalternativ – du vet att du valt rätt funktion.



The Page mode, displays text as a page with automatic line breaks.

1 Kolumnläge

This is line mode

2 Radläge

word

3 Ordläge

This is silent mode

4 Tyst läge

Läge 2-4 passar text användare som har förändringar i gula fläcken, makuladegeneration.

MagniLink S Premium



Enkel och flexibel

MagniLink S är alltid tillgänglig: Systemet fälls upp och ned på några få sekunder. Placera systemet på valfri sida om en laptop – designen gör den flexibel och systemet tål även stötar.

Färgkodade detaljer

Orangefärgade detaljer på systemet och den medföljande väskan visar var användaren ska greppa viktiga detaljer då systemet sätts upp och fälls ned.

Drivs av datorn

Användaren behöver aldrig bekymra sig om batterinivåer eller batteriladdare.

Smart 2-i-1-väska

En smart väska, med plats för både systemet och dess tillbehör samt en laptop på upp till 15,4" medföljer systemet. Den löstagbara inre väskan kan användas separat, eller för att packa ned MagniLink S i exempelvis en ryggsäck.





Överlägsen bildkvalitet

60 digitala helbilder per sekund ser till att eftersläpning på skärmen är ett minne blott. Detta, tillsammans med en hög ljusstyrka och kontrast, en högkvalitativ, ljuskänslig kamera, HDMI-anslutning och HD-/Full HD-kamera skapar en lugn och behaglig bild med skarpa kanter. Allt detta resulterar i en lika fantastisk som överlägsen bildkvalitet.

Den senaste tekniken

Supersnabb USB3.0 anslutning – tio gånger snabbare och bakåtkompatibel med USB 2.0, samt HDMI-anslutning för snabb och stabil dataöverföring.

Högkvalitativa material

Hela systemet är konstruerat av gjuten metall och avancerade plastmaterial. Detta kombineras med högkvalitativ teknologi från välkända tillverkare, vilket också inkluderar kameranlinsen. Alla delar är designade för att vara hållbara och återvinningsbara.



MagniLink S Premium



Minimalt fotavtryck

Systemet upptar en minimal skrivbordsyta tack vare infällbara stödben, som tillåter att MagniLink S placeras tätt intill en laptop.

Periskopfunktion

Periskopfunktionen, som innebär att armens övre led kan vridas upp, ökar den fria siktlinjen då avståndskameran används.

Fri arbetshöjd

Marknadsledande 31 cm fri arbetshöjd gör det enkelt att bläddra i stora böcker och pärmar under läskamerahuvudet.

Flexibelt kamerahuvud

Kamerahuvudet/armen kan rotera 330° horisontalt och ca 300° vertikalt, vilket gör det enkelt att växla mellan läskamera-, distanskamera- och spegelläget.

PC/Mac/Chromebook

Mjukvara för PC och Mac medföljer alla modeller. Mjukvara för Chromebook laddas enkelt ner från Chrome Web Store.

Kompatibilitet

MagniLink S är kompatibel med hjälpmedelsprogram som t ex ZoomText och SuperNova (gäller PC/Mac).



Innovativ mjukvara

Mjukvaran för MagniLink S inkluderar följande innovativa funktioner:

- True update (automatiska uppdateringar via Internet)
- Bild och videoinspelning
- Snabbknappar som kan konfigureras av användaren
- Anpassad för nedsatt syn: stora knappar med hög kontrast och menyknappar med inbyggt talstöd
- Split-funktion (delad skärmbild)

Automatisk språkigenkänning

Mjukvaran kan känna av vilket språk som används i texten och anpassar röster efter detta (gäller PC/Mac).



MagniLink S Premium

Smarta **tillval**

Smart dockningsstation

När MagniLink S pluggas in i dockningsstationen kan den börja användas direkt. Läsbordet har föranslutna kablar på baksidan och en stor extern kontrollpanel medföljer.

Dockningsstationen finns med A3 läsbord eller bordsfäste och är en perfekt lösning då MagniLink S ofta flyttas mellan t ex hemmet och skolan eller arbetsplatsen. Läsbordet har friktionsbromsar i sid- och djupled.



LVI Monitor

Den högkvalitativa bildskärmen från LVI är utvecklad för användare med nedsatt syn och erbjuder matt antireflekerande bildyta, utmärkt skärpa och kontrast, mjuka kanter och en design som matchar MagniLink S. Välj mellan 19" och 23" skärm. Välj till en monitorfot eller monitorarm.



Extern kontrollpanel

En extern kontrollpanel med taktila knappar för enkel användning finns som tillval. Välj mellan två olika storlekar.

MagniLink S modeller & tillval

1 Välj grundmodell

Artikelnr	Benämning
MLS-HD	HD 720p-kamera inklusive programvara för Windows/Mac OS och 2-i-1 bärväska
MLS-FHD	FHD 1080p-kamera inklusive programvara för Windows/Mac OS och 2-i-1 bärväska

2 Välj tillval och tillbehör

Artikelnr	Benämning
A (TTS-PC)*	TTS-programvara för PC/Windows.
B (TTS-MAC)*	TTS-programvara för Mac/Mac OS.
C1 (MLS-A101)*	MagniLink S dockningsstation med A3 läsbord. DVI. Inkl MLV-A110A.
C2 (MLS-A101SPLIT)*	MagniLink S dockningsstation med A3 läsbord. HDMI. Inkl MLV-A110A.
C3 (MLS-A101CLAMP)*	MagniLink S dockningsstation med bordsfäste. DVI. Inkl MLV-A110A.
D (MLV-A111A)*	MagniLink Vision hårdvarusplit-kit (splitbox, extern kontrollpanel, kablar)
E1 (MLV-A112)*	MLV avståndskamera SD (splitbox, extern kontrollpanel, kamera, kablar)
E2 (MLV-A113)*	MLV avståndskamera HD (splitbox, extern kontrollpanel, kamera, kablar)
MLV-A110A	Extern kontrollpanel, stor (beställs som separat artikel). Ingår i C1,C2,C3.

Tekniska specifikationer:

Modell	MagniLink S
Anslutningar	USB 3.0, HDMI
Upplösning, kamera	HD: 1280 x 720 (720 progressive scan) FHD: 1920 x 1080 (1080 progressive scan)
Förstoring (15,4" widescreen)	HD: 1,4x – 75x** FHD: 1,1x – 75x**
Fri arbetshöjd	31 cm, samt teleskopfunktion
Färglägen	Naturliga färger, 6 artificiella färger (positiva/negativa)
Bildlägen	Läs (vänster/höger), avstånd, spegel
Vikt	1,7 kg
Bilduppdatering	60 digitala helbilder/sekund
Kompatibilitet	PC: ZoomText 10.X eller senare, Dolphin SuperNova 12 eller senare, iZoom 4 eller senare. Mac: ZoomText Mac***
Systemkrav	PC: Windows 7 eller senare. Mac: Mac OSX 10.6 eller senare Chromebook: Chrome OS version 59 eller senare

* Ange artikelnummer inom parentes vid separat beställning. Annars tillägg enligt principen MLS-FHD-AC1 för en MLS med Full HD-kamera, TTS-programvara för PC och A3 dockningsstation med DVI-koppling.

** Minimum och maximum förstoring kan konfigureras i EUC-programvaran.

*** Förstoring i ZoomText måste avaktiveras då kameran används så att inte kamerabilden förstoras.

LVI Low Vision International är en av världens
ledande tillverkare av synhjälpmedel med
uppdrag att göra vardagen enklare för människor
med synnedsättning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE

MagniLink S_170926