

Brugsanvisning

MagniLink ChromeViewer

LVI Danmark ApS

Hørkær 24
2730 Herlev

Tel: 57 67 20 99

info@lvi.dk
www.lvi.dk

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
SE-352 46 Växjö

Tel: +46 470-727700

info@lvi.se
www.lvi.se

Inhold

1 Præsentation af MagniLink ChromeViewer.....	1
1.1 Systemkrav.....	1
1.2 Anbefalede systemkrav.....	1
2 Installation af software.....	2
3 Licensgivning.....	5
4 Brug af softwaren.....	6
4.1 LVI-kamera.....	6
4.2 Funktioner via menuer.....	6
4.2.1 Fanen kamera.....	6
4.2.2 OCR-fane.....	10
4.2.3 Notepad-fane.....	11
4.3 Funktioner via tastaturet.....	13
4.3.1 Generelt.....	13
4.3.2 Fanen kamera.....	14
4.3.3 OCR-fane.....	17
4.3.4 Notepad-fane.....	18
4.4 Styring med musen.....	19
4.5 Vindue for informationer og indstillinger.....	19
4.5.1 Om applikationen.....	19
4.5.2 Applikationsindstillinger.....	20
4.5.3 Videoindstillinger.....	21
4.5.4 Indstillinger for genvejskommandoer.....	22
4.5.5 OCR-indstillinger.....	23
4.5.6 EUC.....	23
4.6 OCR-konverteringens kvalitet.....	24

1 Præsentation af MagniLink ChromeViewer

MagniLink ChromeViewer er software, der bruges på en Chromebook til at vise billeder fra et MagniLink-kamerasystem. Softwaren styrer kameraets egenskaber, f.eks. forstørrelsesniveau, kunstige farver og lysstyrke. Med en licens er det muligt at OCR-behandle en tekst og få den læst op af en talesynteseenhed.

1.1 Systemkrav

- Chrome OS version 98
- 1 integreret USB 3.0-port.
- Intel Celeron, 2 GB RAM

1.2 Anbefalede systemkrav

- Chrome OS version 98
- 1 integreret USB 3.0-type A-port
- Intel i5-processor
- 4 GB RAM

LVI anbefaler, at du bruger en Intel-baseret Chromebook sammen med et MagniLink-kamera, fordi vi har oplevet kompatibilitetsproblemer med ARM-baserede Chromebooks.

Et USB 3.0 Y-kabel kan være nødvendigt for at kunne levere tilstrækkelig strøm til kameraet. Et USB Y-kabel gør det muligt at anvende to USB-porte til at køre MagniLink kamerasystemet.


LVI har testet softwaren på flere forskellige Intel-baserede Chromebooks uden problemer, men der er ingen garanti for, at systemet vil fungere på alle computere, der lever op til specifikationerne. LVI anbefaler, at du tester softwaren sammen med den Chromebook, som systemet skal bruges sammen med, for at sikre, at den er kompatibel. Computere med højere ydeevne giver bedre ydeevne for kameraet.

Bemærk, at der kræves en internetforbindelse til licensgivning samt at der bruges OCR i ChromeViewer.


2 Installation af software

MagniLink ChromeViewer kan downloades fra Chrome Webshop. Kan du ikke finde applikationen ved hjælp af søgefunktionen i Chrome Webshop, er der et direkte link på vores hjemmeside, som fører dig til installationssiden.


Linket åbner en ny side med Chrome Webshop, og MagniLink ChromeViewer vil automatisk være valgt.

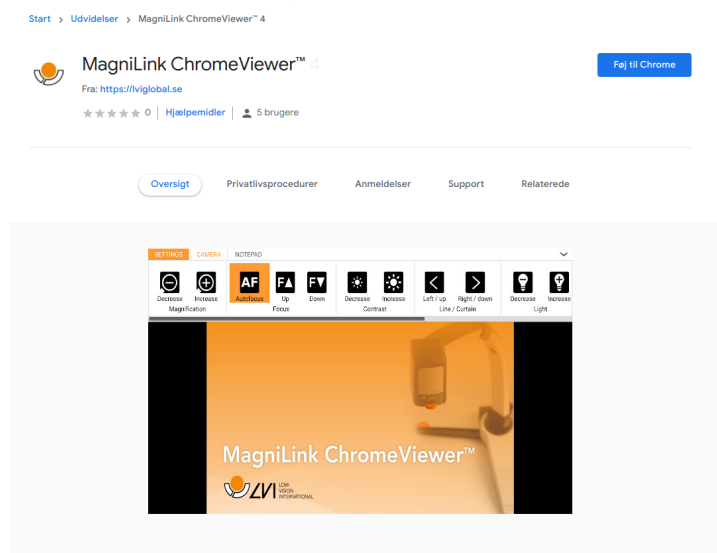

Vælg **Tilføj** for at starte installationen.

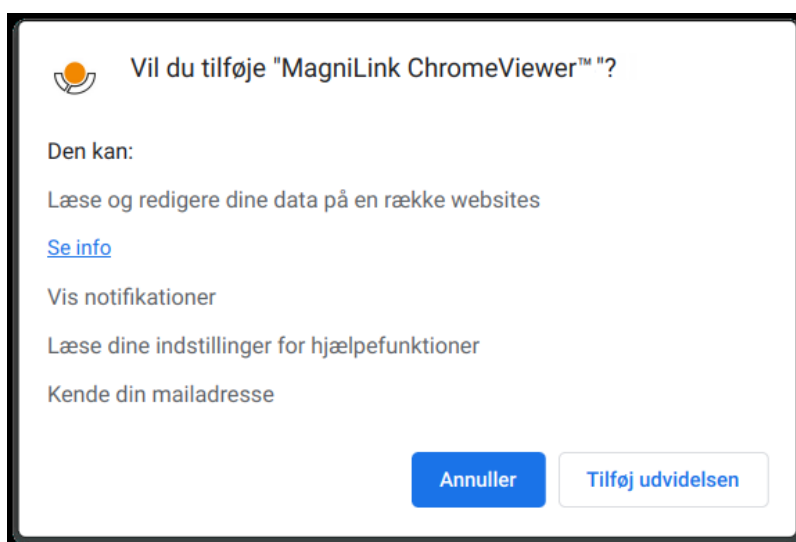


Derefter vises en informationsboks, der forklarer, hvad applikationen kan. Vælg **Tilføj app** for at fortsætte.

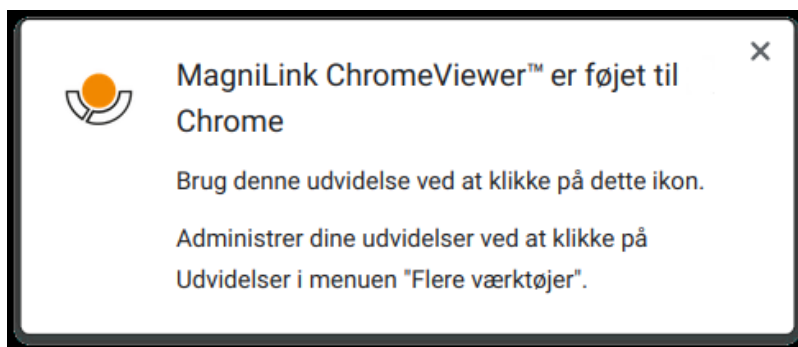


Første del af installationen er nu fuldført, og du kan starte applikationen ved at følge instruktionerne og klikke på det markerede ikon. Det er også muligt, som beskrevet i billedet ovenfor, at trykke på knappen App for at starte applikationen. Bemærk, at for at MagniLink ChromeViewer kan fungere fuldt ud med LVI-kameraer, skal du fortsætte med anden del af installationen ved at tilføje MagniLink ChromeViewer til Launcher, som beskrevet i instruktionerne nedenfor:


1. Start MagniLink ChromeViewer
2. Gå til Indstillinger.
3. Tryk på knappen **Kopiér URL** under siden Om indstillinger for at kopiere adressen til applikationen.
4. Start Google Chrome.
5. Klik på adressefeltet, og indsæt den kopierede adresse – enten ved at taste **Ctrl + V** eller højreklikke på adressefeltet og vælge Indsæt. Tryk Enter.
6. Under **Mere** øverst til højre, klik på **Cast, gem og del** og derefter på **Opret genvej**.

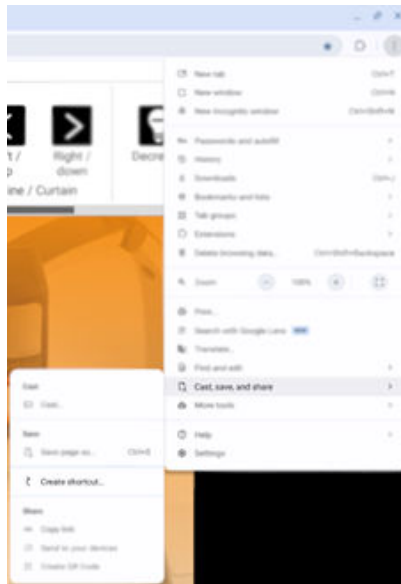

7. Vælg **Åbn som vindue** og tryk derefter på **Opret**.

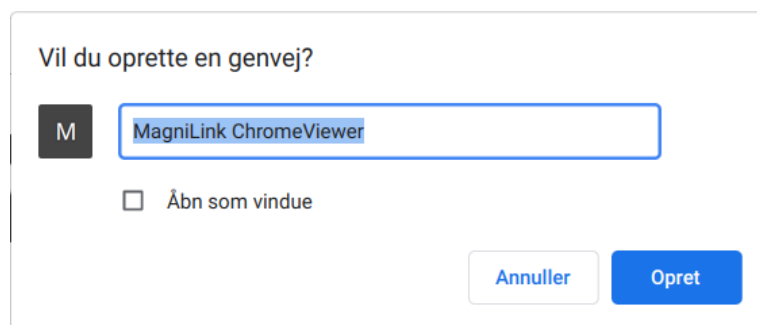

MagniLink ChromeViewer vil nu blive vist i Launcher. Sørg for altid at starte MagniLink ChromeViewer via Launcher..

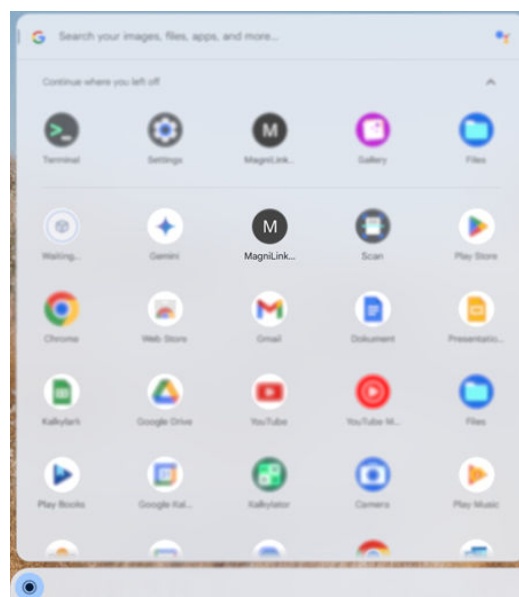

3 Licensgivning

Kamerasystemer, der bruges sammen med ChromeViewer, kan licenseres med OCR. ChromeViewer registrerer automatisk, om dit kamerasystem er licenseret til OCR.

Det er også muligt at aktivere en uafhængig OCR-licens. En sådan aktivering kræver, at du giver ChromeViewer adgang til visse oplysninger på din Google-konto, da licensnøglen anvendes på din Google-konto ved aktivering. Det betyder, at du ikke vil være begrænset til én computer, men vil kunne bruge en hvilken som helst Chromebook sammen med din Google-konto og stadig bruge OCR i ChromeViewer.

Klik på knappen Log på under Indstillinger, og følg instruktionerne. Når du er logget på, vises et indtastningsfelt, hvor du skal indtaste licensnøglen. Klik derefter på OK. Du har direkte adgang til OCR, når aktiveringen er fuldført

Bemærk, at OCR med ChromeViewer har følgende begrænsninger:

- **Der kræves en internetforbindelse både til licensering og til brug af OCR i MagniLink ChromeViewer.**

4 Brug af softwaren

4.1 LVI-kamera


Hvis du vil starte et USB LVI-kamera, skal du enten trykke på knappen Opret forbindelse yderst til venstre på menulinjen under fanen Kamera eller *L-genvejen*. Derefter vises en dialogboks med en liste over tilsluttede USB LVI-kameraer. Vælg det kamera, du vil starte, og vælg derefter Opret forbindelse.

4.2 Funktioner via menuer

Applikationen består af et vindue med faner og grupper af knapper. Der er en fane til applikationsindstillinger, en fane til håndtering af kameraet og en fane til Notepad. Afhængigt af om du har indhentet en licens, er der også et vindue til håndtering af OCR-behandlet tekst.

4.2.1 Fanen kamera

Følgende fane varierer i intervallet af knapper afhængigt af antallet af tilsluttede kamerasystemer.

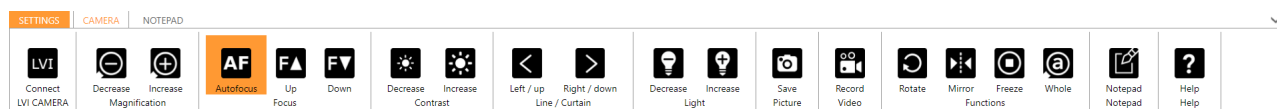

Tilslut LVI-kamera



Reducer forstørrelsen



Øg forstørrelsen



Låser autofokus

Låser autofokus-tilstand. Denne funktion er nyttig, hvis du foretrækker at skrive i hånden. Så påvirkes autofokus ikke af pennen eller din hånd. Tryk på knappen for at genaktivere autofokus.



Fokus op

Reducer fokuseringshøjden. Når denne funktion bruges, deaktiveres autofokus.

**Fokus ned**

Øg fokuseringshøjden. Når denne funktion bruges, deaktiveres autofokus

**Reducer lysstyrke/kontrast****Øg lysstyrke/kontrast****Læselinje/-bjælke venstre/op**

Justerer læselinjens position. Tryk på knappen for at flytte læselinjen mod venstre. Hold knappen inde for at ændre læselinjen til vandret og flytte den opad. Læselinjen bliver nu til en lodret bjælke, der reducerer visningsområdet. Tryk på knappen igen for at gøre bjælken vandret.

**Læselinje/-bjælke højre/ned**

Samme som den forrige kommando, men i modsat retning.

**Reducere lampens lysstyrke****Øg lampens lysstyrke****Tag et snapshot**

Dialogboksen "Gem fil som" vises. Der foreslås automatisk et filnavn (med dags dato og klokkeslæt) og en mappe (Downloads). Tryk på "Enter" for at gemme billedet. Hvis du vil gemme billedet et andet sted, kan du ændre dette manuelt.

Start/stop videooptagelse



Tryk for at åbne dialogboksen "Gem fil som". Der foreslås automatisk et filnavn (med dags dato og klokkeslæt) og en mappe (Downloads). Tryk på Enter for at gemme med det foreslåede navn. Hvis du vil gemme videoen i en anden mappe eller under et andet navn, er det muligt at ændre dette i dialogboksen. Stop optagelsen ved at trykke på knappen igen.

Roter kamerabilledet



Roterer kamerabilledet med uret. Du kan rotere mod uret ved at holde "Shift" nede, mens du trykker på knappen.

Spejlvend kamerabilledet



Tryk igen for at vende spejlbilledet tilbage.

Frys kamerabilledet



Tryk igen for at ophæve frysningen.

Hele billedet (vises kun, hvis systemet har licens til OCR)



Når dette er aktivt, vises hele kamerabilledet. Ellers kan du redigere i billedet, afhængigt af hvor stort kameravinduet er.

OCR-behandling



Udfører en OCR-konvertering af kameravinduet.

Notepad



Åbner billeder fra kameraet i Notepad.

Hjælp



Åbner brugsanvisningen i standardprogrammet til visning af PDF-filer.

4.2.1.1 MagniLink AIR

Følgende knapper er kun tilgængelige sammen med et MagniLink AIR-system.



Skift billedkilde

Bruges til at skifte billedkilder (hvis der er mere end to kilder).



Skift kamera

Bruges til at skifte kameraer.



Skift opdelt tilstand

Skifter mellem lodret og vandret opdelt tilstand.



Flyt opdelt til venstre

Flytter opdelt tilstand til venstre.



Flyt opdelt til højre

Flytter opdelt tilstand til højre.



Panorer til venstre



Panorer til højre



Vip ned



Vip op



Position 1

Hold "Ctrl" nede, mens du trykker på knappen, for at gemme positionen. Kamerabilledet vil derefter flytte ind i den gemte position, når du trykker på knappen.



Position 2

Hold "Ctrl" nede, mens du trykker på knappen, for at gemme positionen. Kamerabilledet vil derefter flytte ind i den gemte position, når du trykker på knappen.

3

Position 3

Hold "Ctrl" nede, mens du trykker på knappen, for at gemme positionen. Kamerabilledet vil derefter flytte ind i den gemte position, når du trykker på knappen.

4.2.2 OCR-fane

Følgende fane vises kun, hvis systemet har en OCR-licens.



Åbn dokument (OCR-konvertering)

Åbner en dialogboks. Vælg den fil, du vil åbne, i dialogboksen. Det er muligt at åbne billedfiler i JPEG-, PNG- og PDF-formater.



Importér dokumenter

Importér eksporterede dokumenter.



Eksportér dokumenter

Eksportér aktuelle dokumenter.



Gem dokument

Gem aktuelt dokument. Dokumentet forbliver i applikationen, selv ved genstart, indtil du vælger at slette det.



Slet dokument

Slet det aktuelle dokument.



Afspil/pause

Start/pause læsning



Stop

Stopper læsningen. Den næste læsning vil begynde fra starten af teksten.

Tilbage



Brug denne kommando til at gå trinvis tilbage gennem teksten. Hvis læsetilstand er indstillet til ord, går du tilbage gennem teksten ord for ord. Hvis læsetilstand er indstillet til sætning, går du tilbage gennem teksten én sætning ad gangen.

Fremad



Brug denne kommando til at gå trinvis fremad i teksten. Hvis læsetilstand er indstillet til ord, går du fremad i teksten ord for ord. Hvis læsetilstand er indstillet til sætning, går du fremad i teksten én sætning ad gangen.

Læsetilstand




Denne kommando skifter den læsetilstand, der skal bruges ved tryk på "**Tilbage**" og "**Fremad**". Mulige tilstande er bogstav, ord eller sætning.

Visningsindstilling



Skifter visningsindstilling for OCR-behandlet tekst. De tilgængelige visningsindstillinger er "sidevisning", "rækkevisning", "ordvisning", "billedvisning", "billede og ord" samt "billede og række".

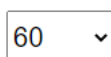

Skrifttypestørrelse

Bruges til at ændre OCRT-tekstens størrelse.



Hastighed


Ændrer talehastigheden.



Hjælp

Åbner brugsanvisningen i standardprogrammet til visning af PDF-filer.

4.2.3 Notepad-fane

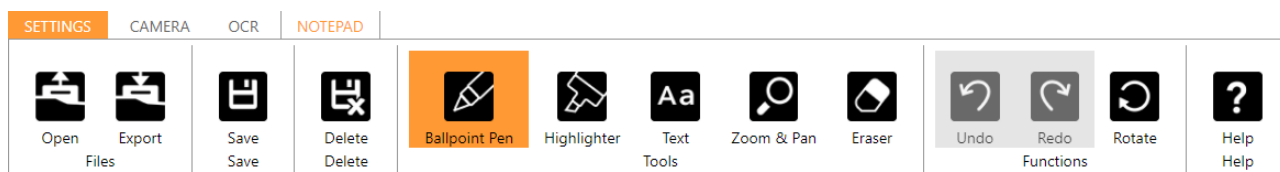

Notepad-værktøjet består af tre dele.

- Øverst er der en menulinje med knapper.
- Til venstre er der en liste over billeder. Du navigerer til et billede ved at klikke på det. Du kan slette et billede ved at klikke i øverste højre hjørne.
- En flade, hvor du kan tegne, forstørre og panorere billedet.



Åbn

Åbn billede. Det er muligt at åbne billeder i JPEG-, PNG- og PDF-formater.



Eksportér

Eksporterer note. Det er muligt at eksportere den aktive note som en billedfil eller alle noterne som en PDF.



Gem

Gemmer den aktuelle note. Noten forbliver i applikationen, selv ved genstart, indtil du vælger at slette den.



Slet

Sletter den aktuelle note.



Kuglepen

Tegner med en kuglepen.



Overstregningstusch

Tegner med en overstregningstusch.



Tekst

Indsætter tekst. Du kan flytte teksten rundt, efter du har indsat den. Du skal dog først trykke på den indsatte tekst med **Tekstværktøjet**.



Zoom og panorer

Forstørrer og panorerer billedet.



Viskelæder

Visker ud.



Fortryd
Fortryder seneste indtastning.



Annuller fortryd
Genskaber efter tryk på fortryd.



Roter
Roterer billedet. BEMÆRK! Dette sletter alle indtastninger.

4.3 Funktioner via tastaturet

4.3.1 Generelt

Globale tastaturgenveje

Følgende genveje gælder alle faner.

9

Vindue for informationer og indstillinger
I dette vindue kan der vælges forskellige indstillinger af applikationen.

Alt + 1

Gå til kamerafanen

Alt + 2

Gå til OCR-fanen

Alt + 3

Gå til Notepad-fanen

V

Skift mellem faner

Ctrl + H

Skjul eller vis menuen

8

Næste vinduesposition
Tryk flere gange på tasten 8 for at skifte mellem indstillingerne af delte billeder på den primære skærm. Vinduet kan altså styres med musen eller standardkommandoerne i Chrome OS.

Ctrl + plus

Forstør menu

Ctrl + minus Formindsk menu

4.3.2 Fanen kamera

Kommandoer til kameragenvej Følgende genveje gælder kun for kamerafanen.

- | | |
|----------------|--|
| L | Tilslut dialogboksen
LVI-kameraskærme for at starte det LVI-kamera, der er tilsluttet. |
| 1 | Naturlige farver
Skifter mellem billede med naturlige farver og gråtoner. |
| 2 | Positivt billede med forstærket kontrast
Kunstige farver: hvid/sort, gul/sort, grøn/sort, rød/sort, gul/blå, hvid/blå. Tryk flere gange på 2 for at skifte mellem de forskellige farver. (Shift + 2 for at gå tilbage) |
| 3 | Negativt billede med forstærket kontrast
Kunstige farver: hvid/sort, sort/gul, sort/grøn, sort/rød, blå/gul, blå/hvid. Tryk flere gange på 3 for at skifte mellem de forskellige farver. (Shift + 3 for at gå tilbage) |
| 4 | Start OCR
Starter OCR med automatisk oplæsning. (Shift + 4 starter OCR uden automatisk oplæsning) |
| 5 | Tilføj note
Tilføjer en note og åbner Notepad. (Shift + 5 tilføjer en note, men åbner ikke Notepad) |
| Pil op | Øg forstørrelsen |
| Pil ned | Reducer forstørrelsen |

J	Autofokus til/fra
Shift + pil op	Reducer fokuseringshøjden
Shift + pil ned	Øg fokuseringsafstanden
Højrepil	Øg lysstyrke/kontrast
Venstrepil	Reducer lysstyrke/kontrast
Ctrl + venstrepil	Læselinje venstre/op
Ctrl + højrepil	Læselinje højre/ned
Ctrl + 7	Øg lampens lysstyrke
Ctrl + 6	Reducer lampens lysstyrke
Ctrl + P	Tag et snapshot Tryk på Ctrl + P for at åbne dialogboksen “Gem fil”. Der foreslås automatisk et filnavn (dags dato og klokkeslæt) og en mappe. Tryk på Enter for at gemme billederne. Hvis du vil gemme det samme billede et andet sted eller med et andet navn, kan du ændre dette manuelt.
Ctrl + M	Start/stop videooptagelse Tryk på Ctrl + M for at starte en videooptagelse. Inden optagelsen vises en dialogboks med et forslag til filnavn (dags dato og klokkeslæt) og mappe. Tryk blot på Enter for at starte videooptagelsen. Hvis du vil gemme videooptagelsen et andet sted eller med et andet navn, kan du ændre dette manuelt. Stop optagelsen ved at trykke på Ctrl + M.

Ctrl + R	Roter kamerabilledet med uret Hver gang, du vælger denne tastekombination, vil kamerabilledet rotere 90° med uret (90°, 180°, 270° og 0°).
Ctrl + Shift + R	Roter kamerabilledet mod uret Hver gang, du vælger denne tastekombination, vil kamerabilledet rotere 90° mod uret (270°, 180°, 90° og 0°).
Ctrl + I	Spejlvend kamerabillede Spejlvender kamerabilledet. Denne funktion er praktisk, hvis du f.eks. vil anvende kameraet som kosmetikspejl med forstørrelse.
Ctrl + F	Frys kamerabillede Kamerabilledet fastfryses ved tryk på denne tastekombination. Tryk på samme tastekombination igen for at fjerne fastfrysningen.
Ctrl + L	Fuldskærm Skifter mellem fuldskærm og beskåret billede

4.3.2.1 MagniLink AIR

Følgende kommandoer er kun tilgængelige sammen med et MagniLink AIR-system.

A	Panorer til venstre
D	Panorer til højre
W	Vip op
S	Vip ned
C	Skift kamera
X	Skift opdelt tilstand

Z	Skift billedkilde
Shift + pil venstre	Flyt opdelt til venstre/op
Shift + pil højre	Flyt opdelt til højre/ned
Ctrl + Shift + 1	Gem position 1
Ctrl + Shift + 2	Gem position 2
Ctrl + Shift + 3	Gem position 3
Ctrl + 1	Gå til position 1
Ctrl + 2	Gå til position 2
Ctrl + 3	Gå til position 3

4.3.3 OCR-fane

OCR-tastaturgenveje	Følgende tastaturgenveje gælder kun for OCR-fanen
1	Afspil/pause læsning
2	Stop læsning
3	Foregående ord/sætning/bogstav
4	Næste ord/sætning/bogstav
5	Skift mellem navigering efter ord, sætninger eller bogstaver
B	Skift visningsindstilling

7 Reducer talehastighed

8 Øg talehastighed

4.3.4 Notepad-fane

Notepad-tastaturgenveje Følgende tastaturgenveje gælder kun for Notepad-fanen

Ctrl + Z Fortryd

Ctrl + shift + Z Annuller fortryd

Ctrl + S Gem note

Del (slet) Slet note

Ctrl + R Roter billede til højre

1 Vælg kuglepen

2 Vælg overstregningstusch

3 Vælg næste værktøj

4 Vælg forstørrelses- og panoreringsværktøj

5 Vælg viskelæder

Ctrl + 1 Tegneværktøjets foregående farve

Ctrl + 2 Tegneværktøjets næste farve

Ctrl + 3 Formindsk tegneværktøjets størrelse

Ctrl + 4 Forøg tegneværktøjets størrelse

Ctrl + Shift + R Roter billede til venstre

4.4 Styling med musen

Visse funktioner kan styres med musen.

I kameraindstilling.

- Hvis kameraet understøtter panorering, kan venstre museknap bruges til at panorere billedet.
- Zoom ved hjælp af højre museknap.

I OCR-indstilling

- Venstre museknap bruges til at starte aflæsningen. Du kan også vælge et ord, der skal fortsætte med at læse fra det markerede ord.
- Rullehjulet kan bruges til at forstørre eller formindske billedet.

4.5 Vindue for informationer og indstillinger

Vinduet for informationer og indstillinger består af et antal af forskellige faner, der indeholder applikationsinformationer og alternative indstillinger.


4.5.1 Om applikationen



Denne fane indeholder oplysninger om softwareversion, ophavsrettigheder og licensoplysninger.

Hvis du vil aktivere en opnået OCR-licens til din Google-konto, er det her, du logger ind og indtaster licensnøglen.

4.5.2 Applikationsindstillinger

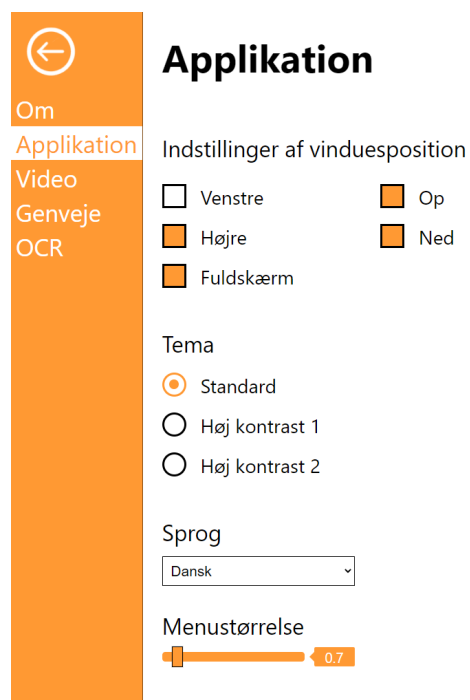

Vinduestilstande

Vælg de forskellige vinduestilstande, som skal aktiveres ved tryk på tasten 8.

Tema

Vælg det tema, som skal være aktivt. Temaet bestemmer det farvesæt, som applikationen skal have.


Sprog

Skift sprog til softwaren. Softwaren er indstillet til at bruge samme sprog som computerens standard. Hvis dette sprog ikke er tilgængeligt, vælges engelsk automatisk som standard.

Menustørrelse

Her kan du ændre menuernes og knappernes størrelse.

4.5.3 Videoindstillinger

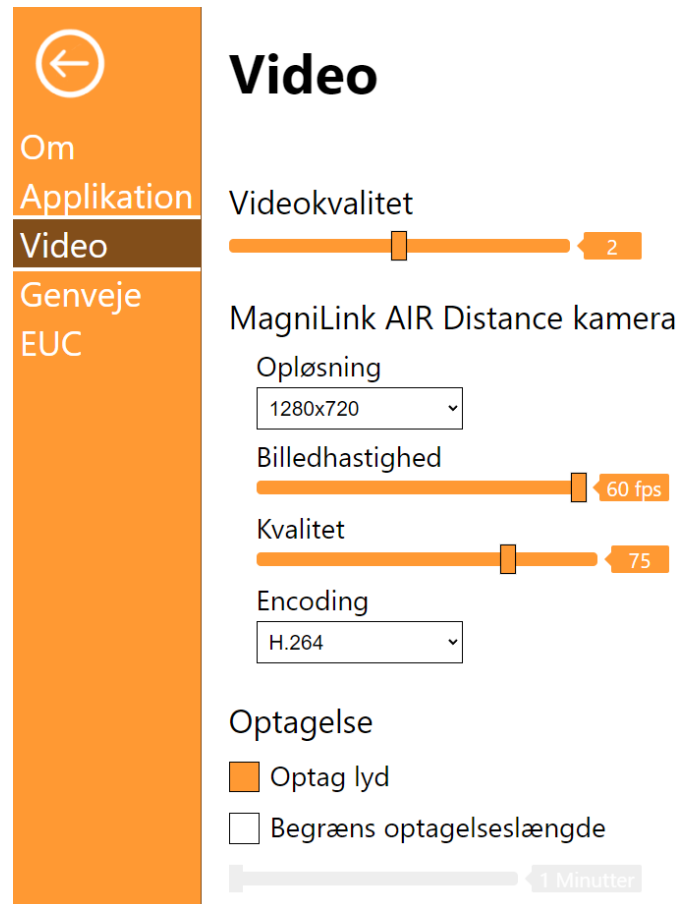



Om
Applikation
Video
Genveje
EUC

Video

Videokvalitet

2

MagniLink AIR Distance kamera

Opløsning

1280x720

Billedhastighed

60 fps

Kvalitet

75

Encoding

H.264

Optagelse

☒ Optag lyd
☐ Begræns optagelseslængde

1 Minutter

Videokvalitet

Denne indstilling giver brugeren mulighed for at øge eller reducere programmets videokvalitet. For at opnå den bedste balance mellem ydeevne og kvalitet skal indstillingen forblive uberørt, men det kan være tilrådeligt at reducere for computere med lav ydeevne.

Opløsning

Vælg mellem kameraets forskellige opløsningsindstillinger. Opløsning kan ikke vælges for alle kameraer.

Billedhastighed

Denne indstilling giver brugeren mulighed for at begrænse billedhastigheden. Billedhastigheden kan ikke ændres for alle kameraer.

Billedkvalitet

Denne indstilling giver brugeren mulighed for at begrænse kameraets billedkvalitet. Billedkvaliteten kan ikke ændres for alle kameraer.

Optag lyd

Aktivér denne funktion for at optage lyd med en tilsluttet mikrofon.

Begræns optagelseslængde

Aktivér denne funktion for at begrænse optagelsens længde.

Længde i minutter

Hvis du har valgt at begrænse optagelseslængden, kan du indstille grænsen i minutter her, fra 1 til 60 minutter.

MagniLink ChromeViewer kan optage videoklip fra et MagniLink-kamerasystem i WebM-format (.webm). Videooptagelsen startes via tastaturet (Ctrl + M). En rød indikator vises i bunden til højre for videovinduet, mens der optages.

4.5.4 Indstillinger for genvejskommandoer

	Genveje	
Om	Applikation	
Applikation		
Video		
Genveje		
OCR		
	Indstillinger	9
	Åbn kamerafanen	alt+1
	Åbn OCR-fanen	alt+2
	Åbn Notepad-fanen	alt+3
	Skift indstilling	v
	Skjul menu	ctrl+h
	Næste visning	8
	Øg menustørrelse	ctrl+plus-sign
	Reducer menustørrelse	ctrl+minus-sign

Her kan du ændre de anvendte genvejskommandoer for applikationen. Hvis du vil ændre en genvejskommando, skal du tabulere til den kommando, der skal ændres, og trykke på mellemrum eller Enter og derefter indtaste den nye tastaturkombination. Hvis der indtastes en kombination, der allerede er i brug til en anden kommando, slettes den anden kommando. Der skal indtastes en ny tastaturkombination for at ændre kommandoen.

4.5.5 OCR-indstillinger




Stemme

Vælg hvilken stemme, der skal bruges til fremtidige OCR-konverteringer.

Område

Vælg det datacenter, som skal udføre OCR-konverteringerne. Jo tættere på din aktuelle placering, desto hurtigere foregår OCR-konverteringerne.

4.5.6 EUC

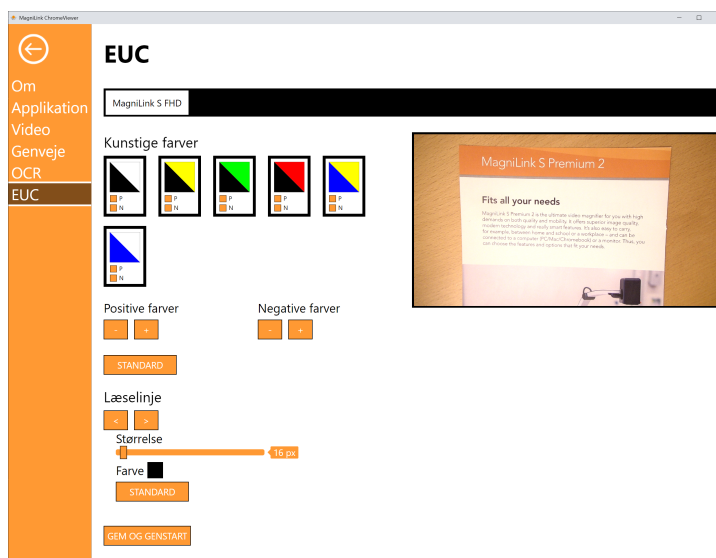

Kameraet kan konfigureres under denne fane. Hvis knappen "Gem" er nederst, skal du trykke på knappen for at gemme ændringerne. Når du gør det, genstarter kameraet, og configurationen er gemt.

Kunstige farver

Det er muligt at fjerne og ændre kameraets kunstige farver.

- Sådan fjernes enten den positive eller negative komponent. Fjern markeringen af feltet "P" eller "N".
- Hvis du vil fjerne en farvekombination, skal du fravælge både "P" og "N".
- Hvis du vil ændre en farvekombination, skal du trykke på et af trekantsfelterne, og der vises en farvedialogboks. Vælg farver, og tryk på OK.
- Tryk på "Standard" for at gendanne farverne.

Referencelinje

Angiv referencelinjens størrelse og farve. Tryk på "Standard" for at nulstille.

4.6 OCR-konverteringens kvalitet

Husk følgende, hvis du vil optimere resultaterne af OCR-konverteringen.

- Kontrollér, at forstørrelsen er tilstrækkelig. Tekst med meget små bogstaver giver dårlige resultater i OCR-softwaren. Vi anbefaler mindst 12 pt til den mindste forstørrelse på læsekameraet.
- Undgå blankt papir, da det giver refleksioner i billedet. Dette forringer resultatet af OCR-konverteringen. Hvis du vil bruge blankt papir, anbefaler vi, at lyset i enheden kobles fra.
- Bestemte skrifttyper kan være svære at fortolke for OCR-programmet.
- Det er vigtigt, at tekstkontrasten er tilstrækkelig.

Alfabetisk indeks

Anbefalede systemkrav	1
Applikationsindstillinger	20
Brug af softwaren	6
EUC	23
Fanen kamera	6, 14
Funktioner via menuer	6
Funktioner via tastaturet	13
Generelt	13
Indstillinger for genvejskommandoer	22
Installation af software	2
Licensgivning	5
LVI-kamera	6
MagniLink AIR	8, 16
Notepad-fane	11, 18
OCR-fane	10, 17
OCR-indstillinger	23
OCR-konverteringens kvalitet	24
Om applikationen	19
Præsentation af MagniLink ChromeViewer	1
Styring med musen	19
Systemkrav	1
Videoindstillinger	21
Vindue for informationer og indstillinger	19