

Snabbguide

Handhållen läskamera Nara 7



1 Närläge/avstånd*

5 Öka förstoring

2 Lägesknapp*

6 Frysknapp*

3 Panorering ned*

7 Minska förstoring

4 Smartknapp

8 Av/på

I fryst läge används dessa knappar för att panorera upp (1), ned (3), vänster (2), höger (6).

Snabbguide

Handhållen läskamera Nara 7



- 1 Närläge/avstånd.** Tryck på knappen för att växla mellan närläge och avståndsläge.
- 2 Lägesknapp.** Tryck på knappen för att växla färgläge.
- 3 Panorering ned.** Tryck på knappen för panorera nedåt i fryst bild
- 4 Smartknapp.** Tryck på knappen för att visa batterinivå samt datum och tid
- 5 Öka förstoring.** Tryck på knappen för ökad förstoring.
- 6 Frysknapp.** Tryck på knappen för frysa bilden och tryck igen för att återgå till rörlig bild och släppa frys bilden.
- 7 Minska förstoring.** Tryck på knappen för minskad förstoring.
- 8 Av/på.** Tryck för att slå på/av enheten (rund knapp på höger sida)

För mer detaljer, se kapitlet om funktioner och kapitlet om Inställningar i bruksanvisningen.