

Snabbguide

Handhållen läskamera Nara 5



1 Närläge/avstånd

2 Färgläge

3 Foto(Sparabild)

4 Av/på

5 Öka förstoring

6 FrysBild

7 Minska förstoring

8 Fokusknapp

Snabbguide

Handhållen läskamera Nara 5



- 1 Närläge/avstånd.** Tryck på knappen för att växla mellan närläge och avståndsläge.
- 2 Växla färgläge.** Tryck på knappen för att växla färgläge.
- 3 Foto (Spara bild).** Tryck på knappen för att ta och spara bilder och tryck ett långt tryck för att titta på sparade bilder
- 4 Av/på.** Tryck på knappen för slå på/av enheten.
- 5 Öka förstoring.** Tryck på knappen för ökad förstoring.
- 6 Frys bild.** Tryck på knappen för frys bilden och tryck igen för att återgå till rörlig bild och släppa frysbilden.
- 7 Minska förstoring.** Tryck på knappen för minskad förstoring.
- 8 Fokusläge.** Tryck ett långt tryck på knappen för att växla mellan autofokus och manuell fokus. Tryck ett kort tryck på knappen för att gå till engångsfokusering.

För mer detaljer, se kapitlet om funktioner och kapitlet om Inställningar i bruksanvisningen.