

SNOW 12

12" Läckamera



Bruksanvisning

V1.0

ZOOMAX Technology Co., Limited

9F, Building D, Paradise Software Park, No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, China 310012

Copyright© 2019 ZOOMAX Technology Co., Limited. Med ensamrätt. ZOOMAX® är ett varumärke för ZOOMAX Technology Co., Limited i USA och andra länder.

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. Ingen del av detta dokument får kopieras eller översändas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller fysiskt, i något som helst syfte, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från ZOOMAX.

För e-postkontakt, sänd dina frågor till sales@zoomax.com. För sökning i kunskapsbasen, gå in på www.zoomax.com och välj relevanta länkar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Introduktion.....	1
2. Säkerhet och underhåll.....	2
3. Lär känna din Snow 12.....	3
3.1 Vad finns i förpackningen?.....	3
3.2 Allmän beskrivning.....	3
3.3 Ladda batteriet.....	5
3.4 På/Av-lampan.....	5
4. Grundläggande funktioner.....	6
4.1 Grundläggande introduktion.....	6
4.2 Ström på/av.....	9
4.3 Standby-läge.....	9
4.4 Närbildsläge/Avståndsläge.....	10
4.5 Zoomning.....	10
4.6 Flytta bilden med analog spak.....	11
4.7 Välja färgläge.....	11
4.8 Frysa och spara.....	12
5. Avancerade funktioner.....	15
5.1 Huvudmeny.....	15
5.1.1 Öppna/stänga huvudmeny.....	15

5.1.2 Talsyntes.....	16
5.1.3 Öppna album	16
5.1.4 Avståndskamera(SnowLink)	16
5.1.5 Inställningsmeny.....	17
5.1.6 Systeminformation.....	22
5.2 Överföra filer med dator.....	25
5.3 Anslutning till TV eller bildskärm.....	27
6. Maskinläsning och talsyntes.....	29
6.1 Aktivera/Avsluta talsyntes.....	29
6.2 Komma igång.....	30
6.2.1 Textgränssnitt.....	32
6.2.2 Bildgränssnitt.....	34
7. Felsökning.....	37
8. Tekniska specifikationer.....	39

1. Introduktion

1.1 Om Snow 12

Grattis till din nya Snow 12, en läskamera med kraftfulla funktioner som är enkel att använda.

Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Bruksanvisningen hjälper dig att förstå funktionerna hos Snow 12 bättre och gör att du får mer ut av din nya läskamera.

OBS:

Snow 12 finns i TVÅ versioner: en version UTAN talsyntes och en version MED talsyntes.

Ikonen



på förpackningens

övre högre hörn anger produktversion.

1.2 Om bruksanvisningen

Vi arbetar ständigt med att förbättra Zoomax produkter. Det kan därför vara så att den här bruksanvisningen inte är den senaste tillgängliga versionen. Du kan ladda ner den senaste bruksanvisningen under Support på <https://www.zoomax.com>

Om du fortfarande har frågor efter att du läst bruksanvisningen, kontakta återförsäljare för att få hjälp.

2. Säkerhet och underhåll

- För att hålla din Snow 12 Pro i optimalt skick är det viktigt att du läser följande säkerhetsregler noggrant:
- För att undvika brandrisk, låt inte Snow 12 utsättas för stark hetta eller direkt solljus.
- För att undvika risk för elektrisk skada ska produkten hållas på avstånd från vätskor och kemikalier.
- För att undvika elchocker får produkten ej tas isär. Service ska utföras av behörig reparatör.
- Koppla alltid ur Snow 12 före rengöring. Rengör utsidan med rengöringsduk eller mjuk, fuktig disktrasa. Använd inte rengöringsmedel eller sträva material, då dessa kan skada läskameran.
- Om skärmskydd används kan det påverka pekskärmens funktion.
- Snow 12 kan användas i temperaturer mellan 10°C and 40°C.

3. Lär känna din Snow 12

3.1 Vad finns i förpackningen?

Följande tillbehör medföljer i

förpackningen:

- Snow 12
- Hopfällbart stativ
- Fodral
- Fodralväska
- Bruksanvisning
- Instruktionsblad
- Strömadapter
- USB-kabel
- HDMI-kabel
- Konverterare USB 3.0 till USB-C
- Rengöringsduk

Om något tillbehör saknas i förpackningen, kontakta återförsäljare.

3.2 Allmän beskrivning

Hopfällbart stativ är standardtillbehör till Snow 12. Snow 12 kan användas ensamt eller med stativ för större skrivutrymme.




Snow 12



Snow 12 med
hopfällbart stativ

Hem
Frys
Analog
spak

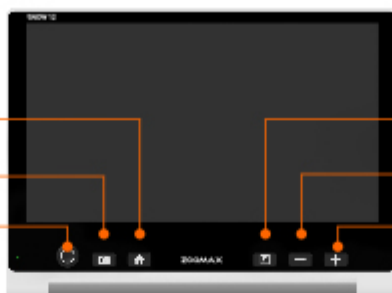

Läge
Zooma ut
Zooma in



HDMI ut
Port för hörlurar

På/Av-knapp

USB-C
HDMI in



På/Av-lampa
Port för strömsladd

3.3 Ladda batteriet

- Batteriet MÅSTE vara fulladdat innan du använder Snow 12 för FÖRSTA gången.
- Du laddar batteriet genom att ansluta medföljande strömadapter till ett eluttag och koppla den till produkten. Observera att på/av-lampan lyser RÖTT när produkten laddas.
- När batteriet är fulladdat blir på/av-lampan grön. Det tar cirka 2 timmar att ladda ett urladdat batteri helt.
- Snow 12 går att använda cirka 2,5-3 timmar i sträck. När batterinivån är låg visas ikonen för lågt batteri  i det nedre vänstra hörnet. Ladda batteriet om produkten stängs av oväntat.

3.4 På/Av-lampan

RÖTT: Lampan lyser rött när batteriet laddas, oavsett om enheten är på eller av.

GRÖNT: När batteriet inte laddas, eller är fulladdat med ansluten strömadapter, lyser lampan grönt.

LAMPAN SLÄCKT: Lampan släcks automatiskt när enheten är avstängd utan ansluten strömkälla.

4. Grundläggande funktioner

4.1 Grundläggande introduktion


OBS:

Alla grundläggande funktioner finns för båda versionerna av Snow 12 (med och utan talsyntes). För versionen med talsyntes kan dessa funktioner endast användas när talsyntesen ej är påslagen.


Öppna/stänga stativet till Snow 12

Tryck ner **“TRYCKKNAPPEN”** längst ner på bakstycket för att öppna stativet.

Tryck tillbaka **“FÖTTERNA”** för att stänga stativet.

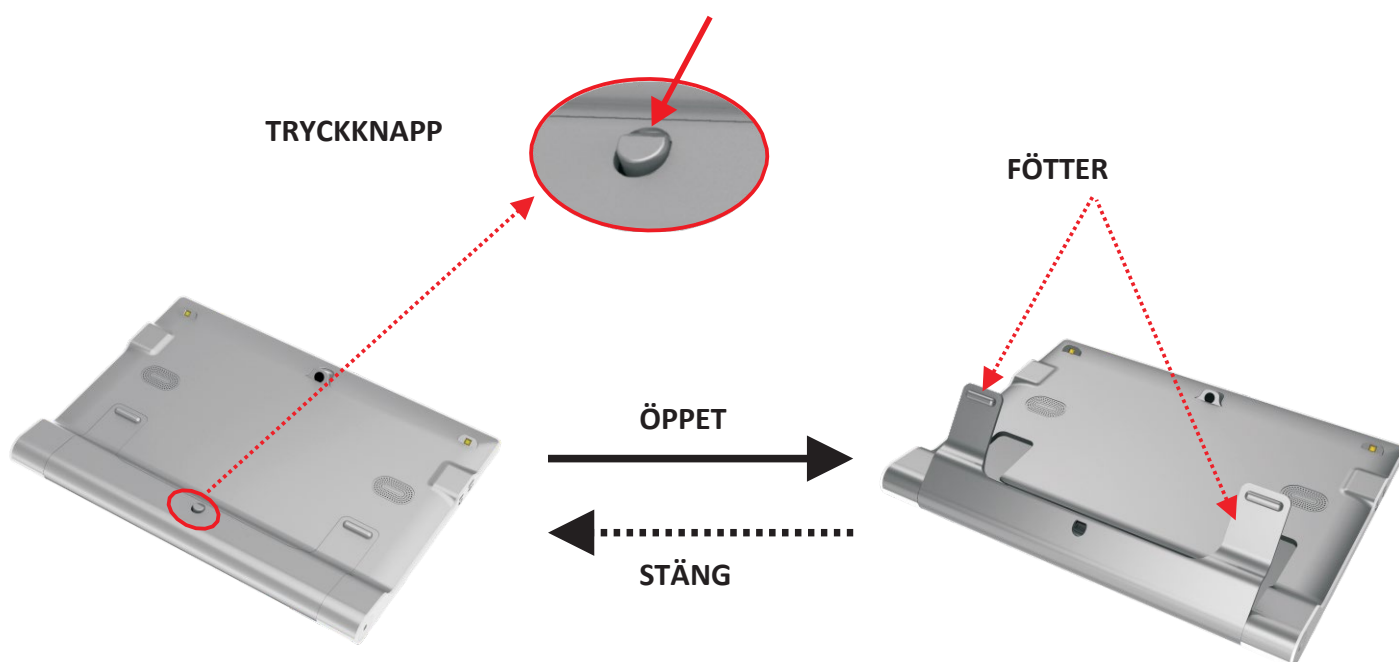

Att öppna det hopfällbara stativet

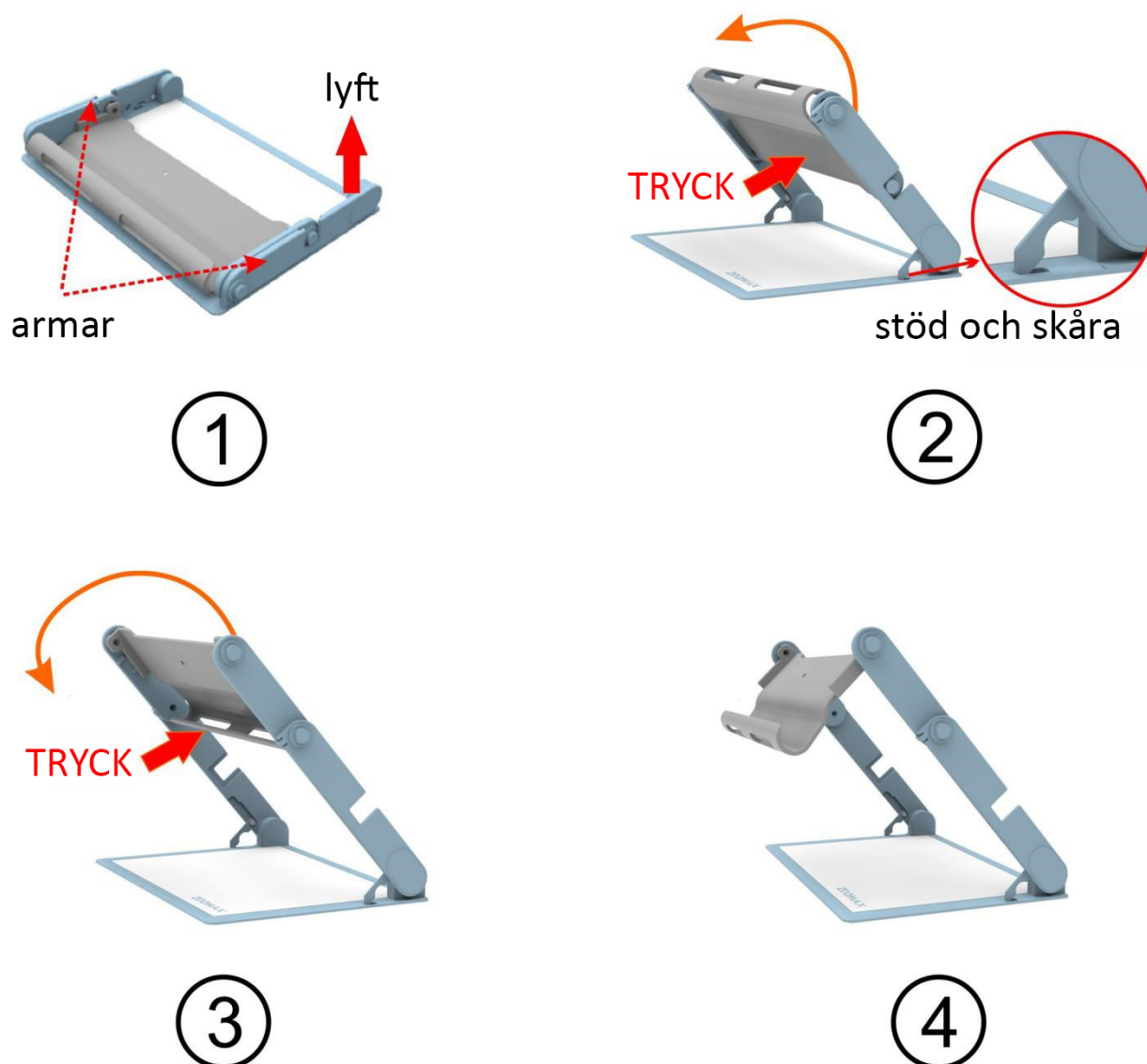

STEG 1

Lyft upp armarna och passa in stödet i skåran.


STEG 2

Tryck och rotera brickan uppåt.

STEG 3

Tryck och rotera brickan uppåt igen.

Att öppna det hopfällbara stativet

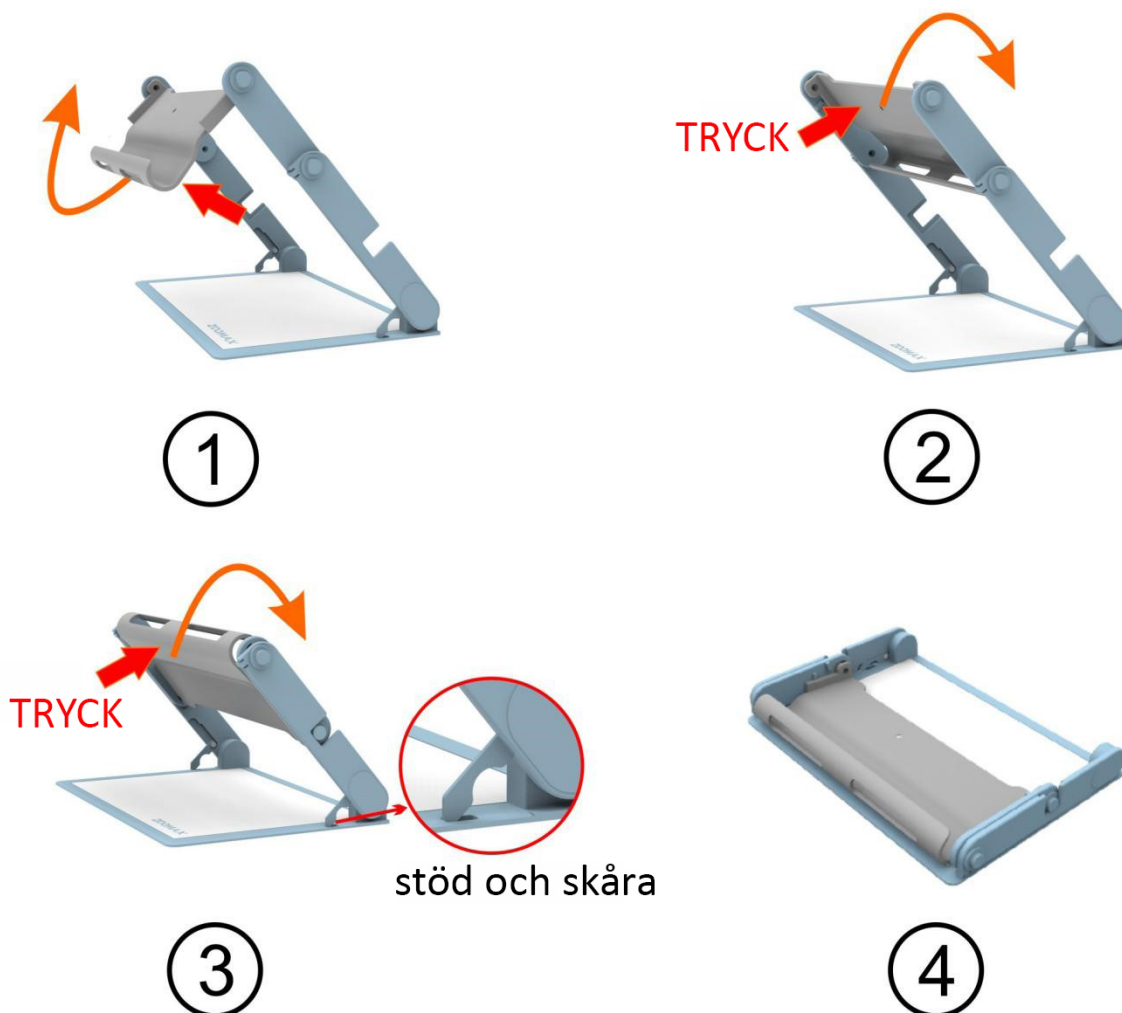

STEG 1

Lyft av Snow 12 från stativet.

STEG 2

Tryck och rotera brickan uppåt.

STEG 3

Tryck och rotera brickan uppåt igen.

STEG 4

Lyft stativets armar och frigör stödet från skåran med två händer. Håll sedan i armarna och lägg ner dem försiktigt.

4.2 Ström på/av

- Håll nere på/av-knappen i 3 sekunder tills på/av-lampan blir GRÖN.
- Efter några sekunder visas realtidsbilden på skärmen.
- Observera att Snow 12 använder operativsystemet ANDROID. Det tar därför en liten stund att starta enheten. Använd det särskilda standby-läget för att slippa stänga av och slå på enheten hela tiden.
- Stäng av Snow 12 genom att trycka och hålla nere på/av-knappen i några sekunder tills på/av-lampan släcks.

4.3 Standby-läge

- I standby-läget stängs skärmen av medan enheten förblir påslagen. Funktionen är till för att spara batteri och underlätta användningen. Enheten går in i standby-läge när:
 - A. den inte har använts på 3 minuter
 - B. du trycker snabbt på strömknappen.
- I standby-läge stängs enheten av automatiskt efter 30 minuters inaktivitet.
- Avsluta standby-läge: tryck snabbt på på/av-knappen igen för att gå tillbaka.



På/Av-knapp

4.4 Närbildsläge/Avståndsläge

Veckla ut och fäll ihop stativet för att byta mellan närbildsläge och avståndsläge.

Tryck ner tryckknappen längst ner på bakstycket för att öppna stativet.



- Veckla ut stativet för att byta till närbildsläge. LED-lampan tänds.
- Fäll ihop stativet för att byta till avståndsläge. I avståndsläge, välj fokus genom att trycka på skärmen om du inte får ett bra fokus under de första sekunderna.

4.5 Zoomning



- Tryck på "+"-knappen för att zooma in och på "-"-knappen för att zooma ut.
- När stativet är utfällt och läsmaterialet placeras platt nedanför, är förstoringen 2,7X till 19X (2,5X till 19X på stativ).
- Du kan öka förstoringen ännu mer genom att ansluta enheten till en TV eller bildskärm. Se kapitel 5.3.

4.6 Flytta bilden med analog spak

Rör den analoga spaken upp/ner/vänster/höger för att flytta realtidsbilden vid hög förstoring.

Tryck spaken upp/ner/vänster/höger två gånger i snabb följd för att flytta bilden till skärmens kant.

4.7 Välja färgläge

Normalläge

Tryck på lägesknappen för att växla mellan fyrfärgsläge och 10 kontrastlägen. Standardläget är fyrfärgsläge. Snow 12 har följande färgvisningsalternativ:

- Fyrfärg
- Vit text på svart bakgrund
- Svart text på vit bakgrund
- Vit text på blå bakgrund
- Blå text på vit bakgrund

- Gul text på svart bakgrund
- Svart text på gul bakgrund
- Grön text på svart bakgrund
- Svart text på grön bakgrund
- Gul text på blå bakgrund
- Blå text på gul bakgrund

Byta snabbt till fyrfärgsläge

I kontrastläge, håll in lägesknappen i 1 sekund för att snabbt återgå till fyrfärgsläge.

Favoritfärgsläge

Du kan välja favoritfärg i inställningarna. Se kapitel 5.1.5.

4.8 Frysa och spara

Autofokus/Pekfokus

- Kamerans standardinställning är autofocus.
- Du kan även peka på skärmen för att fokusera på den detalj du vill titta på. Efter att du bytt mellan lägen (till exempel mellan närbild och avstånd), peka på skärmen för att fokusera.


Frysa bild

- Placera Snow 12 över materialet som du tittar på.

Tryck snabbt på frysknappen för att frysa en realtidsbild. I det

nedre högra hörnet finner du knappen ””.

Tryck på den för att veckla ut knappmenyn enligt nedan.

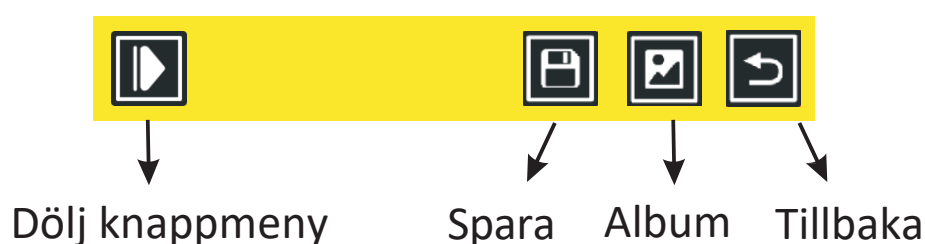

Dölj knappmeny

Tryck på ikonen ”dölj”  för att dölja knappmenyn.

Spara frusen bild

Tryck på ikonen ”spara”  för att spara en frusen bild i albumet. En förbockad ikon visas på skärmen, vilket betyder att dokumentet har sparats.

Öppna/stäng album

Tryck på ikonen ”album”  för att öppna albumet. Tryck på ikonen ”tillbaka”  eller på frysknappen för att gå tillbaka.

Se kapitel 5.1.3 för mer information.

Visa frusen bild

Du kan zooma in och ut på bilden och du kan även byta färgläge.

- Flytta runt på bilden genom att svepa med fingret över pekskärmen eller flytta den analoga spaken för att visa dolda delar av bilden vid inzoomning.
- Tryck på frysknappen för att återgå till visning i realtid. Du

kan även trycka på ikonen "tillbaka"  för att gå tillbaka.


5. Avancerade funktioner

5.1 Huvudmeny

5.1.1 Öppna/stänga huvudmeny

Öppna huvudmenyn

I realtidsvisning, tryck snabbt på “hemknappen” för att öppna huvudmenyn enligt figur nedan.

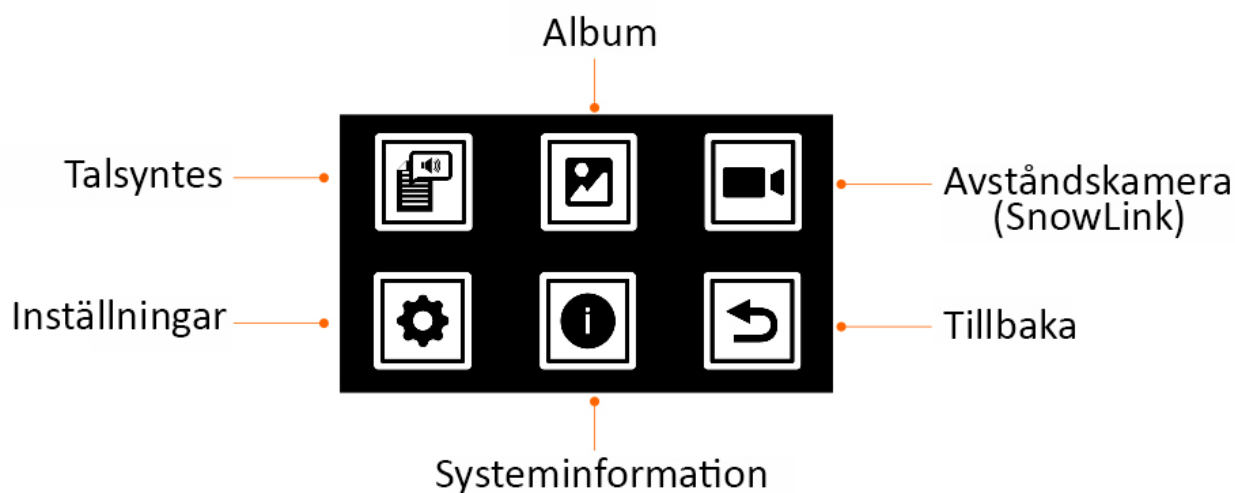

Tryck den analoga spaken upp/ner/vänster/höger för att växla mellan de sex ikonerna: talsyntes, album, avståndskamera, inställningar, systeminformation och tillbaka. För att välja en funktion, tryck ner den analoga spaken, och tryck sedan på lägesknappen för att aktivera, eller rör vid ikonerna om pekskärmfunktion är på.

Stänga huvudmenyn

Tryck på hemknappen för att stänga huvudmenyn.

Eller tryck på ikonerna “gå tillbaka” för att stänga huvudmenyn.

5.1.2 Talsyntes

Se kapitel 6.

5.1.3 Öppna album

Välj ikonen Album , och välj sedan ikonen Foto och PDF för att öppna albumet. Notera att en tredje ikon, TXT/RTF, visas om du öppnar albumet i talsyntesläge.

Tryck på frysknappen för att stänga albumet. Eller tryck på ikonen "gå tillbaka"  för att avsluta.

5.1.4 Avståndskamera (SnowLink)

Snow 12 kan anslutas till avståndskameran SnowLink genom HDMI-porten på enhetens vänstra sida.

Kontakta din återförsäljare eller Zoomax om du vill prova avståndsvisning med SnowLink.




5.1.5 Inställningsmeny

Välj ikonen “inställningar” och tryck på lägesknappen för att öppna inställningsmenyn.

Tryck den analoga spaken upp/ner/vänster/höger för att växla mellan ikonerna.

Tryck på lägesknappen för att bekräfta eller ändra en inställning. Du kan även trycka direkt på ikonerna.

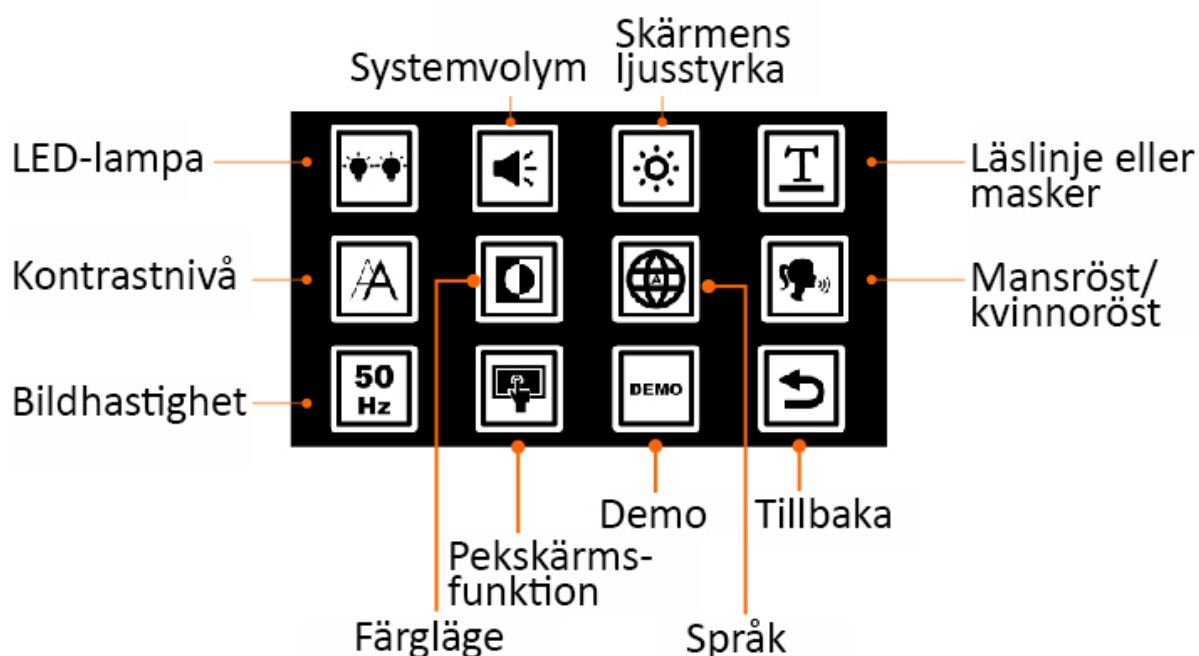

LED-lampa på/av


Välj ikonen “LED-lampa” och tryck på lägesknappen för att växla mellan fyra ljuslägen: vänster-på & höger-på, vänster-på & höger-av, vänster-av & höger-på, vänster-av & höger-av. Du kan även trycka direkt på ikonerna för att växla mellan lägena.

I standardläget är LED-lamporna på i närbildsläge. LED-lamporna stängs av för avståndsläge, maskinläsning och talsyntesläge.

Ljudvolym

Välj ikonen "ljudvolym" och tryck på lägesknappen eller direkt på ikonen för att ställa in volym. Tryck den analoga spaken till höger eller vänster för att höja eller sänka volymen.

Du kan även trycka på rektangelrutorna för att ställa in volymen.

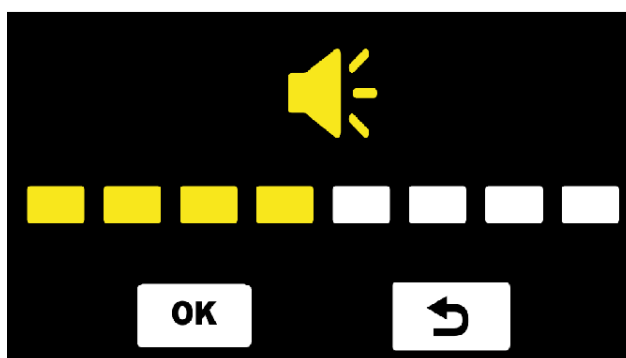

Tryck på "**OK**" för att bekräfta, eller "↶" för att gå tillbaka om pekskärmsfunktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att bekräfta, eller frysknappen för att gå tillbaka.


Det finns 8 volymnivåer. Standardvolymen är medium.

Skärmens ljusstyrka

Välj först ikonen för ljusstyrka och tryck på lägesknappen eller direkt på ikonen för att ställa in ljusstyrka.

Tryck den analoga spaken till höger eller vänster för att höja eller sänka skärmens ljusstyrka.

Du kan även trycka på rektangelrutorna för att ställa in ljusstyrkan.

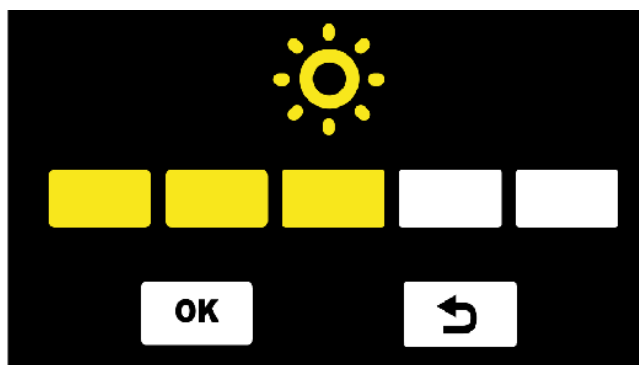

Tryck på “**OK**” för att bekräfta, eller “↶” för att gå tillbaka om pekskärmfunktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att bekräfta, eller frysknappen för att gå tillbaka.

Det finns 5 nivåer av ljusstyrka: 5, 4, 3, 2, 1.

Standardnivån är 3.

Läslinje och masker

Aktivera läslinje och masker genom att samtidigt trycka på knapparna Zooma in och Zooma ut, utan att öppna huvudmenyn. För att växla mellan läslinje och masker, upprepa kommandot.

Läslinjens position och bredden mellan maskerna ställer du in på inställningsmenyn.

Välj ikonen “läslinje och masker” i inställningsmenyn och tryck på lägesknappen för att göra inställningar. Tryck den analoga spaken höger eller vänster för att ställa in läslinje eller masker.

Tryck den analoga spaken upp eller ner för att ställa in läslinjens position och bredden mellan masker.

Du kan även trycka direkt på ikonen för att välja läslinje och masker, och flytta linjens eller maskernas position genom att trycka på skärmen.


Tryck på “**OK**” för att bekräfta, eller “↶” för att gå tillbaka om pekskärmfunktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att bekräfta, eller frysknappen för att gå tillbaka.

Välj kontrastnivå

Lämplig kontrastnivå varierar med läsmaterialet.

Välj ikonen "kontrastnivå" och tryck på lägesknappen för att göra inställningar. Tryck den analoga spaken upp/ner för att ställa in kontrastnivån.

Tryck på "**OK**" för att bekräfta, eller "" för att gå tillbaka om pekskärmfunktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att bekräfta, eller frysknappen för att gå tillbaka.

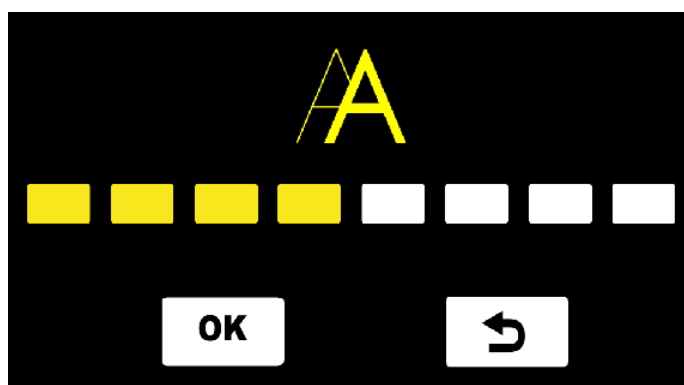

Du kan även ändra kontrastnivån utan att öppna inställningarna. Håll ner lägesknappen och tryck på Zooma in-knappen "+" eller Zooma ut-knappen "-" för att justera kontrastnivån.

Välj favoritfärgsläge

Välj ikonen "färgsläge" och tryck på lägesknappen för att öppna inställningarna. Tryck den analoga spaken höger/vänster/upp/ner för att byta färgsläge. Tryck på lägesknappen för att markera eller avmarkera färgsläge. Du kan även trycka direkt på ikonerna för att markera eller avmarkera färgslägen.

Tryck på "**OK**" för att bekräfta, eller "" för att gå tillbaka om pekskärmfunktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att bekräfta, eller frysknappen för att gå tillbaka. Det finns totalt 10 kontrastlägen. Samtliga är markerade som standard.

Språk

Välj ikonen “språk” och tryck på lägesknappen för att göra inställningar. Tryck den analoga spaken upp/ner för att ställa in språk. Tryck på lägesknappen för att bekräfta. Tryck på ikonen “gå tillbaka” för att gå tillbaka.

Du kan även svepa upp/ner på skärmen för att ställa in språk.

Standardspråk är engelska.

OBS:

1. Språk för röstprompt är detsamma som språket för maskinläsning och talsyntes. När språket för röstprompt är auto är röstprompten på engelska, och automatisk språkidentifiering i maskinläsning och talsyntes aktiveras.
2. Automatisk språkidentifiering inaktiveras om språk för röstprompt ställs in på ett visst språk.

Kvinnoröst/Mansröst

Välj ikonen “Kvinnoröst/mansröst” och tryck på lägesknappen för att växla mellan “kvinnoröst” och “mansröst”.

Du kan även trycka direkt på ikonen för att växla mellan lägena. Standard är kvinnoröst.

OBS:

Följande språk finns endast med KVINNORÖST: English (IND) /Français (CA) / Norsk / Limba română / Türk dili / Svenska.

Bildhastighet: 50/60Hz

Välj "50/60Hz" och tryck på lägesknappen för att växla mellan 50Hz och 60Hz. Du kan även trycka direkt på ikonerna för att växla mellan lägena.

Pekskärmsfunktion av/på

Tryck på ikonerna för pekskärmsfunktion eller på lägesknappen för att stänga av pekskärmsfunktionen.

Tryck på lägesknappen för att slå på funktionen.

Pekskärmsfunktion är påslagen som standard.

Demoläge

Tryck på ikonerna "Demo", så demonstrerar Snow 12 huvudfunktionerna automatiskt.

5.1.6 Systeminformation

Välj ikonerna "Systeminformation" och tryck på lägesknappen för att göra inställningar. Du kan även trycka direkt på ikonerna för att öppna sidan.



Programversion

Välj ikonen Programversion och tryck på lägesknappen eller direkt på ikonen för att visa programversion. Tryck på tillbaka-ikonen eller på frysknappen för att gå tillbaka.

Aktivera maskinläsning och talsyntesfunktion

Om du har köpt Snow 12 utan maskinläsning och talsyntes och vill uppgradera till maskinläsningsversionen, kontakta återförsäljare eller Zoomax.

För återförsäljare:

För att aktivera maskinläsning krävs en QR-kod för aktivering på hemsidan:

<http://zoomaxupgrade.com>. Välj ikonen "Aktivera maskinläsning" på Snow 12 för att skanna mottagen QR-kod.

3 minuter automatisk standby på/av

Tryck på den här ikonen  för att aktivera automatisk standby efter 3 minuter. I det här läget går enheten inte in i standby före avstängning. Om demoläge är avstängt går enheten in i standby om den inte används på 3 minuter.

Automatisk standby efter 3 minuter är aktiverat som standard. Markera ikonen och tryck på lägesknappen för att stänga av automatisk standby. Du kan även trycka direkt på ikonen för att aktivera och inaktivera inställningen.

Programuppdatering med USB-minne

För att uppgradera programvaran, förbered ett USB-minne med den senaste programvaran från Zoomax. Se till att programmet har lagrats i USB-minnets rotkatalog.

Anslut först USB-minnet till "USB-C"-porten med hjälp av konverteraren USB 3.0 till USB-C (medföljer).

Välj sedan ikonen "Programuppdatering" och tryck på lägesknappen för att bekräfta. Du kan även trycka direkt på ikonen för att bekräfta. Uppgraderingen tar ett antal sekunder.

Enheten startas om automatiskt efter slutförd uppdatering.

Återställ fabriksinställningar


Välj ikonen "Återställ fabriksinställningar" och tryck på lägesknappen för att bekräfta. Du får välja om du vill radera alla bilder eller ej. Om du väljer ja kommer alla bilder raderas automatiskt när fabriksinställningarna återställs. Enheten startas sedan om.

5.2 Överföra filer med dator

Filer som sparats på Snow 12 kan föras över till dator med hjälp av medföljande USB-kabel. Filer på datorn kan också föras över från datorn till Snow 12.

Gör så här:

1. Se till att både Snow 12 och datorn är påslagna.
2. Anslut enheten till datorn med USB-kabeln: anslut USB-C (den mindre änden) till USB-C-porten på Snow 12, och anslut USB 3.0 (den större änden) till USB-porten på datorn.

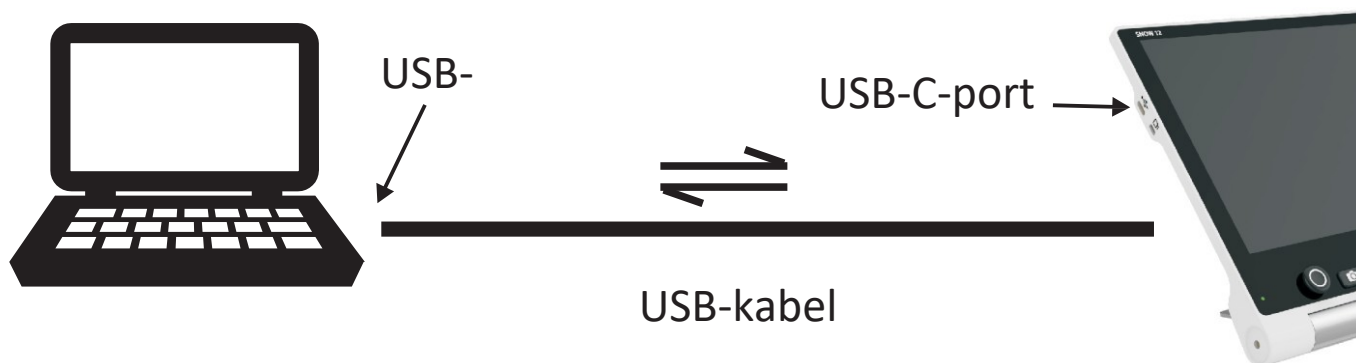

OBS:


Snow 12 kan för närvarande endast anslutas till datorer med Microsoft Windows. Stöd för Mac är under utveckling. Om du behöver koppla läskameran till en Mac, kontakta din Zoomax-återförsäljare eller Zoomax huvudkontor för senaste nytt.

1. När du har anslutit Snow 12 händer följande:

- Strömlampan blir röd.
- Snow 12 går att hitta som extern enhet.
- Öppna mappen "Snow 12" genom att dubbelklicka på den.

2. Att föra över filer:

I mappen "Snow 12" finns ett flertal delmappar (se figur nedan). Öppna mappen "DCIM." Du ser nu mapparna Photo, PDF, TXT/RTF och Photo (OCR).

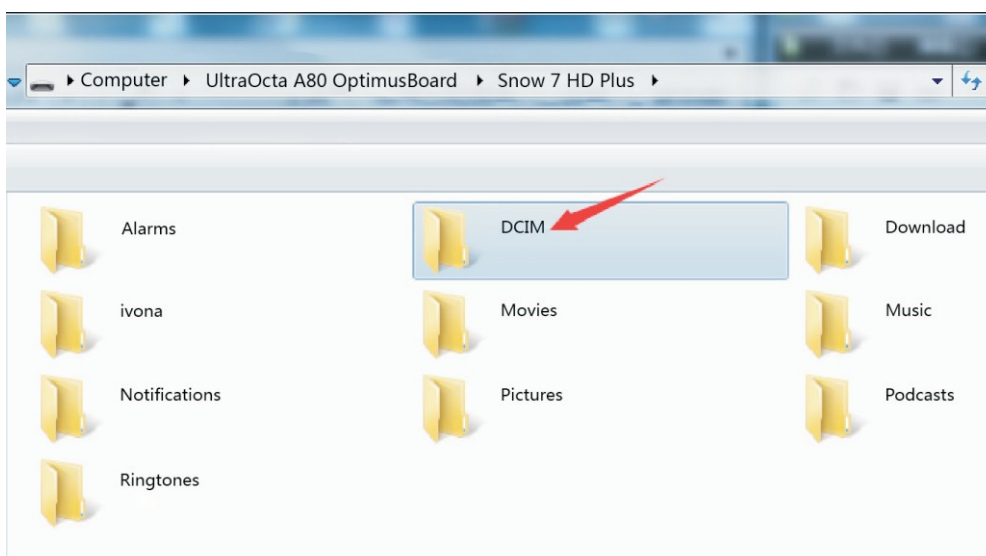

Välj en mapp och markera sedan den fil som du vill föra över. Du kan kopiera eller klippa ut filen och föra över den från läskameran till datorn eller från datorn till läskameran.

OBS:

Bilderna i mappen Photo kan endast visas när maskinläsning och talsyntes är avstängda.

Bilderna i mapparna Photo (OCR) och TXT/RTF kan endast visas när maskinläsning och talsyntes är aktiverade.

OBS:

Byt inte namn på mapparna. Om du gör det kan enheten inte hitta sparade bilder eller bilder som förts över från datorn.

5.3 Anslutning till TV eller bildskärm

Du kan ansluta enheten till en TV eller bildskärm om du vill visa läsmaterialet på en ännu större skärm.

1. Se till att TV:n eller bildskärmen är påslagen.
2. Anslut läskameran till TV:n eller bildskärmen med medföljande HDMI-kabel. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till Micro HDMI-porten på Snow 12, och den andra änden till en ledig HDMI-port på TV:n eller bildskärmen



När enheten har anslutits stängs skärmen på Snow 12 av automatiskt och går in i HDMI-läge. Kamerabilden visas istället på bildskärmen eller TV:n. Skärmen slås på igen om du rör vid den. Om du inte rör skärmen igen på 30 sekunder stängs den av automatiskt.

OBS:

Du kan även ansluta Snow 12 till TV eller bildskärm som saknar HDMI-port. Kontakta din återförsäljare för mer information om konverterare för att ansluta Snow 12 till TV eller bildskärm utan HDMI-port.

6. Maskinläsning och talsyntes

OBS:

En ikon  på förpackningens övre högra hörn anger huruvida produkten i förpackningen har talsyntesfunktion.

Om du köper versionen utan talsyntes får du prova på att använda funktionen gratis totalt 30 gånger.

Kontakta din återförsäljare för versionsuppgradering om du vill ha permanent talsyntesfunktion. Notera att uppgraderingen medför extra kostnad.

6.1 Aktivera/Avsluta talsyntes

Aktivera maskinläsning och talsyntes

I realtidsvisning (inte frusen bild eller sparad bild), håll nere frysknappen i 3 sekunder för att aktivera talsyntes.

Talsyntesikonen  visas nu på skärmen.

Du kan även aktivera talsyntes genom huvudmenyn.

Avsluta talsyntes

För att avsluta talsyntes i realtidsvisning, håll nere frysknappen i 3 sekunder.

Du kan även trycka på ikonen i skärmens nedre högra  hörn för att avsluta funktionen.

Zoomning med talsyntes

OBS:

I talsyntesläge går standardinställningen för förstoring och färg inte att ändra. Snow 12 kan skanna en helsida på det hopfällbara stativet.

6.2 Komma igång

1. Se till att du har aktiverat talsyntes (se sidan 6.1 om hur talsyntes aktiveras).
Ikonen för talsyntes  syns på skärmen och visas alltid i det nedre vänstra hörnet när funktionen är aktiverad.
2. Placera dokumentet platt under Snow 12.
3. Tryck på skärmen för att fokusera.
4. Tryck snabbt på frysknappen för att skanna dokumentet.

Frysknapp



5. Efter några sekunder börjar enheten läsa upp det skannade dokumentet.


➤ OBS:

Standardinställningen är att LED-belysningen stängs av i talsyntesläge. Du kan tända/släcka lamporna genom att trycka på LED-ikonen i övre vänstra hörnet för att anpassa efter omgivningens belysning.

➤ OBS:

Standardinställningen är att språk detekteras automatiskt förutom för dessa fyra språk: Limba română / Magyar / 日本語 / 中文. För dessa fyra språk, ställ in språk under inställningar först innan du startar uppläsning med talsyntes. För mer information se kapitel 6.4. Annars fungerar inte funktionen korrekt och resultatet blir förvrängd text eller “ ⓘ ”.

6.2.1 Textgränssnitt

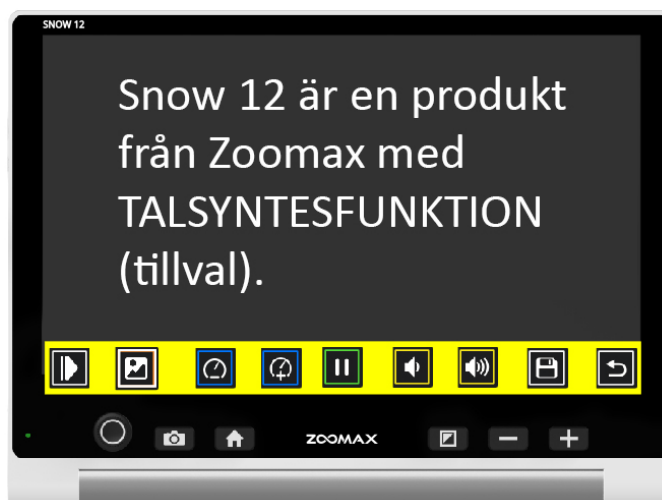

Zoomning i textvy

Medan du läser kan du trycka på “+” eller “-”-knappen för att ändra textens förstoringsgrad.

- Tryck på “+”-knappen för att öka textens förstoring.
- Tryck på “-”-knappen för att minska textens förstoring.

Trycka på ett ord för att läsa från det

Tryck på ett ord för att starta uppläsning från och med det.

Knappmenyn

Knappmenyn i textvisning är densamma som för bildvisning förutom . Tryck på den här ikonen för att gå tillbaka till bildvisning.

Spara dokument

Om du vill spara ett dokument i bildvisning, tryck på ikonen "spara" på knappmenyn. Du får sedan välja om du vill spara i formatet "txt" eller "rtf".

Tryck på ikonen "txt" eller "rtf" för att bekräfta om pekskärmfunktionen är på. Rör annars den analoga spaken vänster/höger för att välja "txt" eller "rtf". Tryck sedan på lägesknappen för att bekräfta, eller frysknappen för att gå tillbaka.

Textfärg

Tryck på lägesknappen medan du läser för att byta

kontrastfärg. Det finns 4 färglägen:

- Vit text på svart bakgrund
- Svart text på vit bakgrund
- Gul text på svart bakgrund
- Svart text på gul bakgrund

Standardinställningen är vit text på svart bakgrund.

OBS:


Färgläge kan inte ändras i bildvisning.

6.2.2 Bildgränssnitt



Knappmenyn

Figuren nedan visar knappmenyn för talsyntes. Du kan använda knappmenyn för att starta eller pausa uppläsning, justera läshastigheten, ändra volymen, byta till textvisning och visa/dölja knappmenyn.

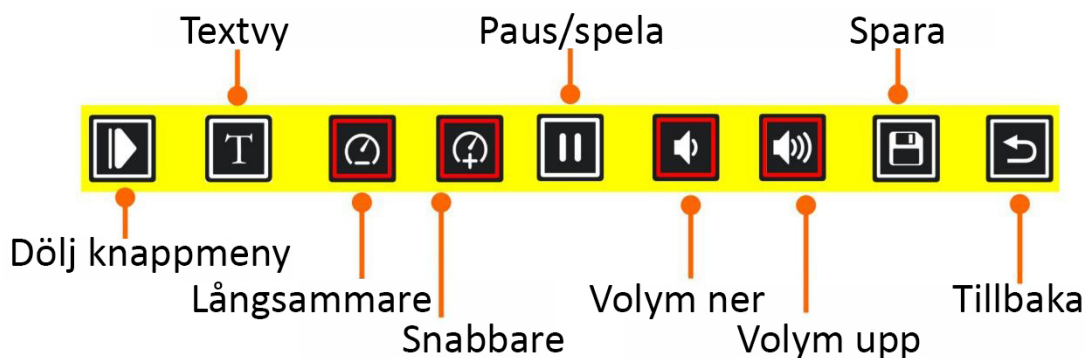

- Tryck på för att justera läshastigheten. Tryck på för att justera ljudvolymen.
- Tryck på för att pausa uppläsningen. Tryck på för att spela upp uppläsningen.
- Tryck på för att dölja knappmenyn. Ikonen byts då till . Tryck på för att visa knappmenyn.
- Tryck på för att byta till textvy (se kapitel 6.2). Tryck på för att spara en bild.

Läsa sparade dokument i album

Med talsyntes aktiverad, tryck på hemknappen, markera albumikonen och tryck på lägesknappen för att öppna albumet. Du kan även trycka direkt på ikonen. Välj ikonen "JPG" för att visa sparade bilder i listform.

- Svep på skärmen för att bläddra i dokumentregistret om pekskärmsfunktionen är påslagen. Annars bläddrar du genom att röra den analoga spaken höger/vänster.

- Tryck på ett dokument för att markera det. Eller tryck på lägesknappen för att bekräfta.

- Det finns en uppspelningsikon  mitt på dokumentet. Tryck på den ikonen för att starta uppläsningen.

För att öppna PDF-filer, välj knappen "PDF" för att visa en lista på PDF-filer.

För att öppna TXT- eller RTF-filer, välj knappen "TXT/RTF" för att se listan på sparade filer.

Radera sparade dokument

OBS:

Diagram och tabeller kan inte konverteras till exakt text.

Använd inte den här funktionen för att läsa diagram och tabeller.

Ställ Snow 12 i det hopfällbara stativet för att registrera en större del av läsmaterialet med maskinläsning och talsyntes. Snow 12 kan avbilda helsidor med hjälp av stativet.

OBS:

Om teckenstorleken är för liten för hela A4-sidor kan det hända att talsyntesen misslyckas. “” visas då på skärmen.

När du lyfter upp kameran för att fota ett dokument, se till att belysningen är god

7. Felsökning

Problem	Lösning
Svart skärm	- Se till att enheten är påslagen och inte befinner sig i standby-läge. - Ladda batteriet. - Sänk förstöringsgraden.
Enheten är avstängd	- Ladda batteriet.
Bilden är mörk eller förvrängd.	- Se till att enheten placeras platt på det material som ska visas.
Smuts eller fläckar på skärmen.	- Rengör kameran och skärmen med en mjuk trasa.
Enheten är ansluten till en TV, men ingen bild syns på TV-skärmen.	- Se till att TV:n är påslagen. - Se till att HDMI-kabeln är korrekt ansluten till TV:n - Håll ner på/av-knappen i 2 sekunder för att tvångsavsluta. Starta sedan om enheten.
Talsyntes misslyckas eller "Not found" visas på skärmen	- Flytta inte läskameran eller textmaterialet medan dokumentet skannas.
Fel språk inställt	- Se till att talsyntesen är inställd på samma språk som textmaterialet är på.

Annat problem som inte nämns i bruksanvisningen.	- Håll nere på/av-knappen och “+”-knappen tillsammans för att tvångsavsluta. Starta sedan om enheten. Om metoden inte fungerar, kontakta din Zoomax-återförsäljare eller Zoomax huvudkontor för att få hjälp.
---	---

8. Tekniska specifikationer

- Förstoringsgrad:

 - 2,7X - 19X (närbildsvisning)

 - 25X - 19X (på hopfällbart stativ)

- Färglägen: Fyrfärg och 10 kontrastlägen

- Skärm: 12-tums pekskärm; skärmupplösning: 1920*1080p

- Kamera: Autofokus/Pekfokus; 13 megapixlar

- Mått:

 - 29*22*2,4 cm — Snow 12

 - 35*23*4 cm — hopfällt stativ

- Vikt:

 - Snow 12: 960 g Hopfällbart stativ:

 - 1230 g

- Kontinuerlig användning: cirka 2,5 till 3 timmar (beroende på LED-belysning, ljusstyrka och hur ofta inskanning sker)

- Uppladdningstid: 2 timmar

- Strömadapter: Input: 100-240V; Output: 15V/4A

- Minne: cirka 1,5 G. Till exempel, om bilder sparas enbart utan talsyntes, rymmer enheten upp till 1000 bilder. Om du endast sparar bilder med talsyntes rymmer upp till 200 bilder