

Brugsanvisning

MagniLink Viewer - iPad



LVI Danmark ApS

Hørkær 24
2730 Herlev

Tel: 57 67 20 99

info@lvi.dk

www.lvi.dk

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
SE-352 46 Växjö

Tel: +46 470-727700

info@lvi.se

www.lvi.se

Inhold

1	Introduktion til MagniLink Viewer.....	1
1.1	Systemkrav.....	1
1.2	Anbefalede systemkrav.....	1
2	Installation af software.....	2
3	Kamerasystem.....	4
3.1	MagniLink USB-kameraer.....	4
3.1.1	Aktivér driver.....	4
3.2	MagniLink AIR.....	4
3.2.1	Slut til netværk.....	4
3.2.2	iPad-indstillinger.....	4
4	Brug af softwaren.....	5
4.1	Funktioner via menuer.....	5
4.1.1	Kameravisning.....	5
4.1.2	OCR-visning.....	10
4.1.3	Notepad-visning.....	13
4.1.4	AI-visning.....	15
4.2	Funktioner via bevægelser.....	17
4.2.1	Kameravisning.....	17
4.2.2	OCR-visning.....	18
4.3	Funktioner via tastaturet.....	19
4.3.1	Generelt.....	19
4.3.2	Kamera-visning.....	20
4.3.3	OCR-visning.....	22
4.3.4	Notepad-visning.....	23
4.4	Vindue for informationer og indstillinger.....	24
4.4.1	Om applikationen.....	24
4.4.2	Programindstillinger.....	25
4.4.3	Kameraindstillinger.....	26
4.4.4	Taleindstillinger.....	26
4.4.5	AI-indstillinger.....	27
4.4.6	Bevægelser.....	28
4.4.7	Genvejskommandoer.....	28
4.4.8	EUC.....	29

1 Introduktion til MagniLink Viewer

MagniLink Viewer er en software, som er udviklet til iPad. Software kan vise billeder fra et MagniLink kamerasystem og de indbyggede kameraer. Softwaren kan styre kameraets egenskaber, f.eks. forstørrelsesniveau, kunstige farver og lysstyrke.

1.1 Systemkrav

- iPad med USB-C-stik og M2-chip eller nyere.
- iPadOS 17.0 eller nyere.


1.2 Anbefalede systemkrav

- iPad Pro 13" med M2-chip eller nyere.
- iPadOS 18.0 eller nyere.


LVI har testet softwaren på flere forskellige iPads uden problemer, men der er ingen garanti for, at systemet vil fungere på alle iPads, der lever op til specifikationerne. LVI anbefaler, at du tester softwaren på den iPad, som systemet skal bruges på, for at sikre kompatibilitet. Se under funktionen for at reducere billedhastighed og billedkvalitet under kameraindstillinger af hensyn til at reducere forsinkelser.

2 Installation af software


Gå ind på **App Store**, og klik på **Søg** i nederste højre hjørne.

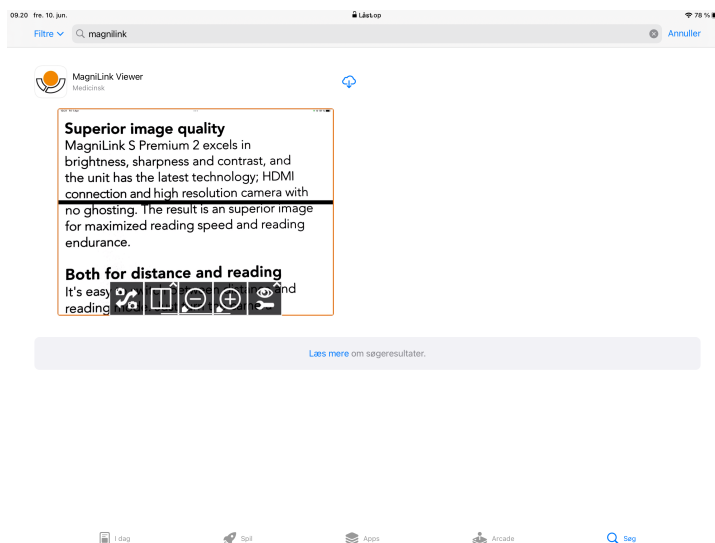

Klik på download-ikonet for at installere softwaren.

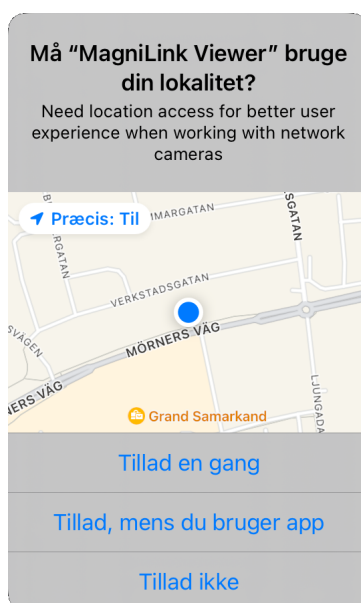

Klik på **Tillad, mens du bruger appen**.

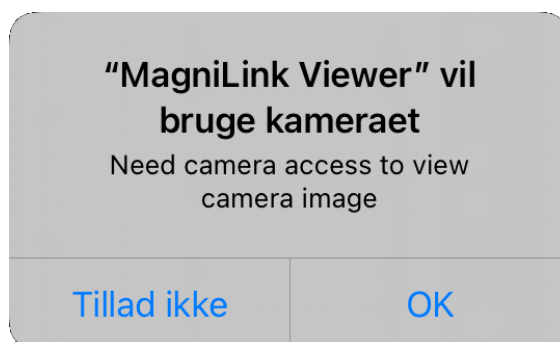

Klik på **OK**.

3 Kammersystem

3.1 MagniLink USB-kameraer

3.1.1 Aktivér driver

Driveren være aktiveret for at styre kamerafunktionerne. Hvis driveren ikke er aktiv, vises der en meddelelse. Du kan aktivere driveren under "Indstillinger" på din iPad.

3.2 MagniLink AIR

3.2.1 Slut til netværk

For at kunne streame video fra MagniLink AIR Uno eller Duo skal du kobles på dets netværk. Åbn iPad'ens wi-fi-indstillinger, og opret forbindelse til **ML_AIR**-netværket. Indtast den oplyste adgangskode.

For at kunne streame video fra en MagniLink AIR Distance skal du gå til iPad'ens Ethernet-indstillinger. Vælg manuel IP-konfiguration, og indtast følgende.

- 192.168.100.99 som IP-adresse.
- 255.255.255.0 som undernetmaske.
- 192.168.100.1 som router.

3.2.2 iPad-indstillinger

For at applikationen kan finde et AIR-kamera, skal indstillingen "**Søg efter MagniLink AIR-kameraer**" være markeret i iPadens **Indstillinger > Apps > MagniLink Viewer**.

4 Brug af softwaren

4.1 Funktioner via menuer

4.1.1 Kameravisning

Følgende menu vises, når applikationen starter op.



Skift visninger

Skifter til OCR-visningen. Tryk og hold nede for at skifte til Notepade-visning.



Skift kamera

Skift mellem LVI-kameraet og front- og bagkameraerne.



Opdelt tilstand

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge opdelt tilstand.



Lås autofokus

Låser autofokustilstanden. Dette kan bruges, når du vil skrive i hånden. På denne måde påvirkes autofokus ikke af pennen eller din hånd. Tryk på knappen igen for at genaktivere autofokus.



Fokus op

Reducerer fokuseringsafstanden. Når denne funktion bruges, deaktiveres autofokus.



Fokus ned

Øger fokuseringsafstanden. Når denne funktion bruges, deaktiveres autofokus.



Lampe

Ændrer lampens lysstyrke. Der er fem indstillinger: Slukket, 25, 50, 75 og 100 procent.



Skift mellem bag- og frontkamera

Denne funktion findes på iPhone og ældre iPads, hvor man ikke kan få vist de to indbyggede kameraer samtidigt.



Skift billedkilde

Bruges til at skifte billedkilder (hvis der er mere end to kilder).



Skift opdelt tilstand

Skifter mellem lodret og vandret opdelt tilstand.



Flyt opdelt til venstre

Flytter opdelt tilstand til venstre.



Flyt opdelt til højre

Flytter opdelt tilstand til højre.



Reducer forstørrelsen



Øg forstørrelsen



OCR

Starter OCR. Når OCR-processen er fuldført, skifter programmet til OCR-visningen, og læsningen begynder. Du kan ikke skifte ved hjælp af tryk og hold.



AI (licens påkrævet)

Tager et billede og skifter til AI-visning. Det er så muligt at stille spørgsmål til billedet. Med et langt tryk skifter applikationen uden at tage et billede.



Tag billede og optag video

Åbner en undermenu med følgende knapper.



Scan QR-kode

Scanner en QR-kode. Hvis QR-koden indeholder et link, åbnes en dialogboks, hvor du kan åbne linket. Det er også muligt at aktivere en licens ved at scanne en QR-kode.



Frys

Fryser kamerabilledet. Et nyt tryk ophæver frysningen.



Tag billede

Der kommer et hørbart klik, og billedet gemmes. Billedet kan derefter åbnes i appen "Billeder". Filnavnet vil være dags dato og det aktuelle klokkeslæt.



Optag video

Starter optagelse. Programmet viser et ikon, der angiver, at optagelsen er i gang. Stop optagelsen ved at trykke på knappen igen. Klippet kan derefter åbnes i appen "Billeder". Filnavnet vil være dags dato og det aktuelle klokkeslæt.



Notesblok

Åbner kameravisningen i notesblokken.



Videoindstillinger

Åbner en undermenu med følgende knapper.



Avanceret zoom

Aktivér eller deaktiver avanceret zoom. Når det er aktiveret, kan billedet zoomes og panoreres digitalt.



Videostabilisering

Aktivér eller deaktiver videostabilisering.



Hele billedet

Skifter mellem hele billedet og det beskårne billede. Ved fuld billevisning skales billedet, så hele billedet vises. Ved visning af beskåret billede skales billedet, så det dækker hele skærmen.



Skift naturlige farver

Skift mellem billede med naturlige farver og gråtoner.



Skift kunstige farver

Skifter mellem kunstige farver. Tryk og hold nede for at skifte tilbage.



Reducer lysstyrke/kontrast



Forøg lysstyrke/kontrast



Spejlvend kamerabillede

Tryk igen for at vende spejlbilledet.



Roter kamerabillede

Roterer kamerabilledet med uret. Tryk og hold nede for at rotere mod uret.



Læselinje/lodret bjælke venstre/op

Justerer læselinjens position. Tryk på knappen for at flytte læselinjen mod venstre. Hold knappen inde for at ændre læselinjen til vandret og flytte den opad. Læselinjen bliver nu til en lodret bjælke, der formindsker visningsområdet. Tryk på knappen igen for at gøre bjælken vandret.



Læselinje/bjælke højre/ned

Samme som den forrige kommando, men i modsat retning.



Indstillinger

Indstillinger Åbner visningen Indstillinger.

4.1.1.1 MagniLink AIR

Følgende knapper er kun tilgængelige sammen med et MagniLink AIR-system.



Panorer

Åbner en undermenu med følgende indstillinger.



Panorer til venstre



Panorer til højre



Vip op



Vip ned

1

Position 1

Flytter kamerabilledet til position 1. Tryk og hold nede for at gemme positionen.

2

Position 2

Flytter kamerabilledet til position 2. Tryk og hold nede for at gemme positionen.

3

Position 3

Flytter kamerabilledet til position 3. Tryk og hold nede for at gemme positionen.

4

Position 4

Flytter kamerabilledet til position 4. Tryk og hold nede for at gemme positionen.

5

Position 5


Flytter kamerabilledet til position 5. Tryk og hold nede for at gemme positionen.

6

Position 6

Flytter kamerabilledet til position 6. Tryk og hold nede for at gemme positionen.

4.1.2 OCR-visning

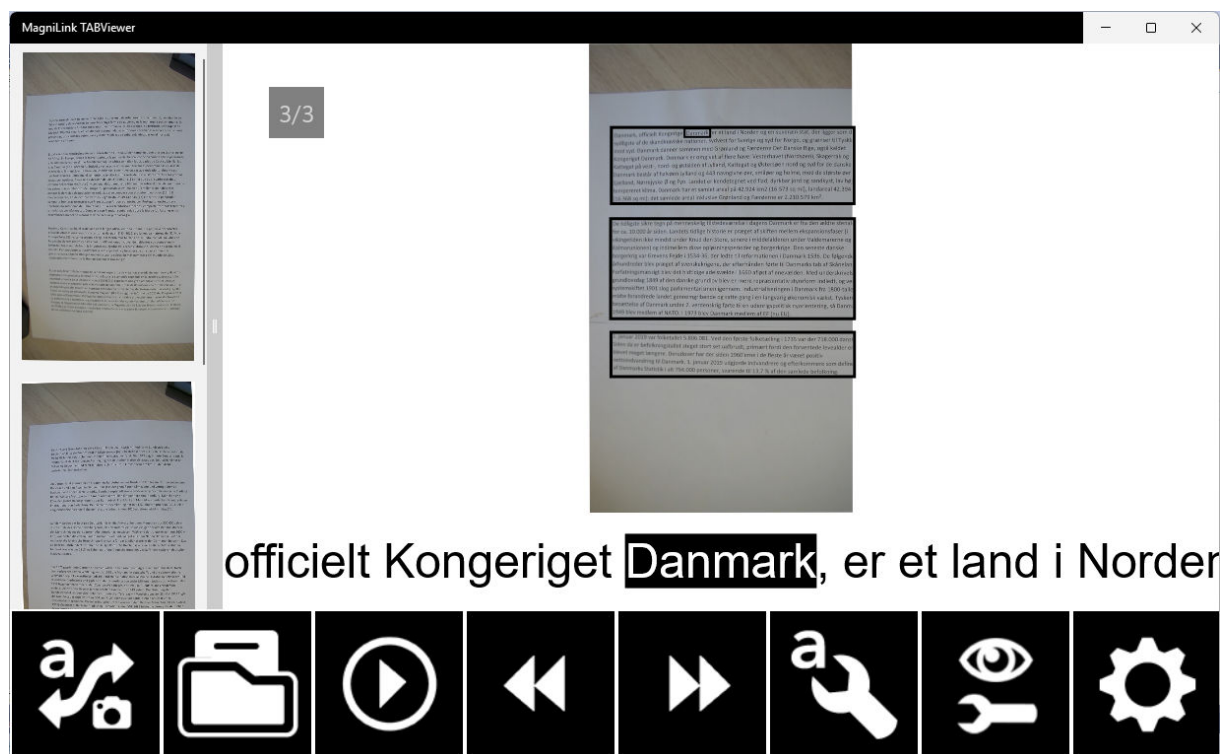

officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norder

OCR-visningen består af tre dele.

- Nederst er der en menulinje med knapper.
- Til venstre er der en liste over sider, der tidligere er blevet OCR-behandlet. Du navigerer til en side ved at klikke på den.
- Et område, der viser den OCR-behandlede side. Det aktuelle sidetal vises øverst til højre.



Skift visninger

Skifter til kamera-visningen. Tryk og hold nede for at skifte til Notepade-visning.



Håndter dokumenter

Åbner en undermenu med følgende to muligheder.



Skjul sidepanel

Skjuler listen i venstre side, hvor tidligere OCR-behandlede sider vises.



Åbn dokument

I dialogboksen skal du vælge den fil, du ønsker at åbne. Det er muligt at åbne PDF-filer og gemte ZIP-filer.



Gem dokument

Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge filformatet (pdf, zip og rtf). Du kan derefter vælge, hvor du vil gemme filen.



Fjern

Fjerner den aktuelle side.



Notepad

Åbner OCR-behandlede sider i Notepad-værktøjet.



AI (licens påkrævet)

Åbner den OCR-behandlede tekst i AI-værktøjet.



Start læsning

Starter læsning. Tryk igen for at stoppe læsningen.



Tidligere

Springer tilbage i teksten. Afhængigt af hvilken læsetilstand der er valgt, vil du springe tilbage til forrige tegn, ord, sætning eller blok. Tryk og hold nede for at skifte til tidligere side.



Næste

Springer fremad i teksten. Afhængigt af hvilken læsetilstand der er valgt, vil du springe frem til næste tegn, ord, sætning eller blok. Tryk og hold nede for at skifte til næste side.



Tekstindstillinger

Åbner en undermenu med følgende indstillinger.



Skift læseindstilling

Skifter til næste læsetilstand. De tilgængelige indstillinger er: tegn, række, sætning og blok.



Skift visningstilstand

Skifter visningstilstand. De tilgængelige visningsindstillinger er "sidevisning", "rækkevisning", "ordvisning", "billedvisning", "billede og ord" og "billede og række".



Øg skriftstørrelse



Reducer skriftstørrelse.



Billedindstillinger

Åbner en undermenu med følgende knapper.



Skift naturlige farver

Skift mellem billede med naturlige farver og gråtoner.



Skift kunstige farver

Skifter mellem kunstige farver. Tryk og hold nede for at skifte tilbage.



Forøg lysstyrke/kontrast



Reducer lysstyrke/kontrast



Indstillinger

Indstillinger Åbner visningen Indstillinger.

4.1.3 Notepad-visning



Notepad-værktøjet består af tre dele.

- Til venstre er der en liste over billeder, der tidligere har været åbnet. Du navigerer til et billede ved at klikke på det.
- Et område, hvor du kan tegne, forstørre og panorere gennem billedet.
- Nederst er der en menulinje med knapper.



Skift visninger

Skifter til kamera-visningen. Tryk og hold nede for at skifte til OCR-visningen.



Håndter dokumenter

Åbner en undermenu med følgende to muligheder.



Skjul sidepanel

Skjuler listen i venstre side, hvor tidligere OCR-behandlede sider vises.



Nyt billede

Åbner et nyt tomt billede, som du kan tegne i.



Gem dokument

Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge filformatet (pdf og jpeg). Du kan derefter vælge, hvor du vil gemme filen.



Åbn dokument

I dialogboksen skal du vælge den fil, du ønsker at åbne. Det er muligt at åbne PDF-filer og gemte ZIP-filer.



Fjern

Fjerner den aktuelle side.



Pen

Tegn med en pen. Tryk og hold nede for at åbne en dialogboks, hvor du kan vælge farve og størrelse.



Fremhæv

Fremhæver med en overstregningspen. Tryk og hold nede for at åbne en dialogboks, hvor du kan vælge farve og størrelse.



Tekstværktøj

Indsætter tekst. Tryk og hold nede for at åbne en dialogboks, hvor du kan vælge farve og størrelse og skrifttype. Du kan flytte teksten rundt, efter du har indsat den. Dobbeltklik på teksten for at ændre den.



Slet



Forstør og panorer i billedet.



Fortryd



Gendan

Gendanner efter tryk på Fortryd.



Roter

Alle ændringer, du har foretaget i billedet, fjernes, hvis du roterer.



Indstillinger

Indstillinger Åbner visningen Indstillinger.

4.1.4 AI-visning

For at bruge AI-værktøjet skal du have en internetforbindelse og en gyldig licens..

Ved hjælp af AI-værktøjet kan du blandt andet opsummere lange dokumenter og læse dem hurtigere, oversætte tekst mellem flere sprog og få detaljerede svar på spørgsmål om forskellige emner.



AI-værktøjet består af tre komponenter.

- En liste med samtaler. Ved at klikke på en samtale kan man aktivere den. Listen er som standard skjult og kan vises ved at trykke på en knap.
- Et område, hvor beskeder vises som chatbobler.
- Nederst findes en menulinje med knapper og et indtastningsfelt.



Tilbage

Tilbage til kameravisningen.



Opret samtale

Opretter en ny samtale og føjer den til eksisterende samtaler.



Indstillinger

Åbner indstillingerne.



Start oplæsning

Start oplæsning. Når du trykker igen, stopper oplæsningen.



Stemmeangivelse

Angivelsen starter, når der trykkes på knappen. Angivelsen stopper, når du slipper knappen.



Ryd

Rydder indtastningsfeltet.



Send

Sender teksten i indtastningsfeltet.



Kopi

Kopierer teksten i chatboblen til udklipsholderen.



Stop med at læse højt

Den næste oplæsning vil begynde fra starten af teksten.

Bemærk

Dette program bruger AI-drevne tjenester til at give svar og forslag. Selvom vi bestræber os på nøjagtighed, kan AI-genereret indhold være forkert eller forældet. Kontrollér altid vigtig information fra uafhængige kilder.



Del ikke følsomme personlige oplysninger med AI'en, da vi ikke kan garantere fortrolighed.

Vi er ikke ansvarlige for konsekvenser, der opstår ved at stole på AI-genereret indhold. Rapportér gerne eventuelle problemer eller bekymringer.

4.2 Funktioner via bevægelser

Nogle funktioner kan styres med bevægelser på tabletten. “At trykke” og “At holde” betyder at man holder fingrene på stedet i mere end et halvt sekund. Det er muligt at vælge hvilke bevægelser du ønsker at frakoble i indstillingerne.

4.2.1 Kameravisning

Knib

Skift forstørrelse

Roter med to fingre

Roter billedet

Tryk med to fingre øverst på skærmen

Naturlige farver

Stryg med to fingre lodret hen over skærmen foroven

Kunstige farver

Stryg med to fingre lodret hen over skærmen foroven

Kontrast

Tryk og hold nede med en finger øverst på skærmen

Start OCR

Tryk og hold med to fingre øverst på skærmen

Start OCR (uden at skifte visning)

Tryk og hold nede med tre fingre øverst på skærmen

Tag billede til Notepad-værktøjet

Tryk og hold nede med en finger nederst på skærmen

Skift til fuldskærm

Dobbeltklik med to fingre nederst på skærmen

Skift visninger

Dobbeltklik med en finger nederst på skærmen

Skjul menuer

Dobbeltklik med en finger øverst på skærmen

Skift kamera

Tryk med tre fingre øverst på skærmen

Skift opdelt tilstand

Tryk med tre fingre nederst på skærmen

Åben indstillinger

4.2.2 OCR-visning

Knib

Skift forstørrelse

Stryg med en finger

Panorer gennem billedet

Tryk med to fingre øverst på skærmen

Naturlige farver

Stryg med to fingre lodret hen over skærmen foroven

Kunstige farver

Stryg med to fingre lodret hen over skærmen foroven

Kontrast

Dobbeltklik med en finger nederst på skærmen

Skjul menuer

Dobbeltklik med en finger øverst på skærmen

Skjul sidepanel

Dobbeltklik med to fingre nederst på skærmen

Skift visninger

Stryg med to fingre lodret over bunden af skærmen

Skift læseindstilling

Tryk med tre fingre nederst på skærmen

Åben indstillinger

Tryk og hold med to fingre nederst på skærmen

Skift visningsindstilling

4.3 Funktioner via tastaturet

Du kan oprette forbindelse til et USB- eller Bluetooth-tastatur og styre nogle af programmets funktioner via tastaturet.

Genvejskommandoerne kan ændres under Indstillinger. Herunder følger standardindstillingerne for genvejskommandoer.

4.3.1 Generelt

fn + F1

Naturlige farver

fn + F2

Positivt billede med øget kontrast

Kunstige farver: hvid/sort, gul/sort, grøn/sort, rød/sort, gul/blå, hvid/blå

Tryk på F2 for at skifte mellem de forskellige farvevalg . (Shift + fn + F2 skifter baglæns.)

fn + F3

Negativt billede med øget kontrast

Kunstige farver: Sort/Hvid, Sort/Gul, Sort/Grøn, Sort/Rød, Blå/Gul, Blå/Hvid

Tryk på F3 for at skifte mellem de forskellige farvevalg . (Shift + fn + F3 skifter tilbage.)

Pil op	Zoom ind
Pil ned	Zoom ud
Pil venstre	Mindsk lysstyrke
Pil højre	Øg lysstyrke
Cmd + ,	Åbn dialogboksen Præferencer Med denne tastekombination åbner man dialogboksen Preferences (Præferencer) i en Mac-applikation.
Option + H	Skjul menuer
V	Skift mellem kameravisning og tekstvisning Hvis der er blevet OCR-behandlet en tekst, skifter denne kommando mellem kameravisning og tekstvisning.

4.3.2 Kamera-visning

Option + pil venstre	Læselinje venstre/op
Option + pil højre	Læselinje højre/ned
Option + R	Roter kamerabilledet mod uret Hver gang du trykker på denne tastekombination, roteres billedet 90° (90°, 180°, 270°, 0°).
Shift + Option + R	Roter kamerabilledet modsat uret Hver gang du trykker på denne tastekombination, roterer billedet 90° (til 270°, 180°, 90°, 0°).
R	Roter billede trinløst med uret
Shift + R	Roter billede trinløst mod uret

Option + I	Spejlvend kamerabillede Ved at taste Option + I kan du spejlvende kamerabilledet. Denne funktion er nyttig hvis du f.eks. vil anvende kameraet som forstørrende makeupspejl.
fn + F5	Tag et snapshot Der kommer et hørbart klik, og billedet gemmes. Filnavnet vil være dags dato og det aktuelle klokkeslæt.
fn + Option + F5	Start/stop af videooptagelse Start optagelse. Programmet viser et ikon, der angiver, at optagelsen er i gang. Stop optagelsen ved at trykke på knappen igen. Filnavnet vil være dags dato og det aktuelle klokkeslæt.
C	Skift kamera
Z	Skift billedkilde
X	Skift opdelt tilstand
Shift + pil venstre	Flyt opdelt til venstre/op
Shift + pil højre	Flyt opdelt til højre/ned

4.3.2.1 MagniLink AIR

Følgende kommandoer er kun tilgængelige sammen med et MagniLink AIR-system.

A	Panorer til venstre
D	Panorer til højre
W	Vip op
S	Vip ned

Ctrl + 1 **Gem position 1**

Ctrl + 2 **Gem position 2**

Ctrl + 3 **Gem position 3**

Option + 1 **Gå til position 1**

Option + 2 **Gå til position 2**

Option + 3 **Gå til position 3**

4.3.3 OCR-visning

FN + F4 **OCR-proces**
Denne kommando tager et billede til OCR-behandling. Programmet skifter derefter til tekstvisning, og den OCR-behandlede tekst læses højt.

Minus **Reducer skriftstørrelse**

Plus **Øg skriftstørrelse**

1 **Start/pause læsning**
Hvis der ikke er læsning i gang i øjeblikket, starter læsningen, ellers sættes læsning på pause.

2 **Stop læsning**
Denne kommando stopper læsningen. Den næste læsning vil begynde fra starten af teksten.

3 **Læs forrige**
Med denne kommando, kan brugeren gå tilbage i teksten. Hvis læseindstillingen er sat på sætning, bevæger du dig tilbage i teksten sætning for sætning. Hvis læseindstillingen er sat på ord, bevæger du dig tilbage i teksten ord for ord. Hvis læseindstillingen er indstillet på tegn, læses et tegn for hvert anslag.

4 **Læs næste**
 Med denne kommando, kan brugeren gå frem i teksten. Hvis læseindstillingen er sat på sætning, bevæger du dig fremad i teksten sætning for sætning. Hvis læseindstillingen er sat på ord, bevæger du dig frem i teksten ord for ord. Hvis læseindstillingen er indstillet på tegn, læses et tegn for hvert anslag.

5 **Skift læseindstilling**
 Denne kommando vælger den læseindstilling, der skal anvendes, når kommandoen "Read previous/next" eller "Read next" indtastes. Indstillingerne er: tegn, ord, sætning, visning og blok. De indstillinger, der kan vælges, afhænger af visningsindstillingen.

B **Visningstilstand**
 Skifter visningsindstilling for OCR-behandlet tekst. De tilgængelige visningsindstillinger er "sidevisning", "rækkevisning", "ordvisning", "billedvisning", "billede og ord" og "billede og række".

4.3.4 Notepad-visning

fn + F7 **Tag et billede, og åbn det i Notepad**

Option + N **Ny side**

Mulighed + O **Åbn billede**

Mulighed + S **Gem billede**

Cmd + Z **Fortryd**

Skift + Cmd + Z **Annuler fortryd**

Option + R **Drej med uret**

Skift + Option + R **Drej mod uret**

- Option + P** **Vælg penværktøj**

- Option + L** **Vælg overstregningsværktøj**

- Option + T** **Vælg tekstværktøj**

- Option + E** **Vælg sletteværktøj**

- Option + F** **Vælg panoreringsværktøj**

4.4 Vindue for informationer og indstillinger

Vinduet for informationer og indstillinger består af et antal af forskellige faner, der indeholder applikationsinformationer og alternative indstillinger.


4.4.1 Om applikationen



Under denne fane finder du oplysninger om kameraet og softwareversionen.

Hvis du vil aktivere AI-funktionen, kan du gøre det ved at indtaste en licenskode og klikke på "Aktiver".

4.4.2 Programindstillinger

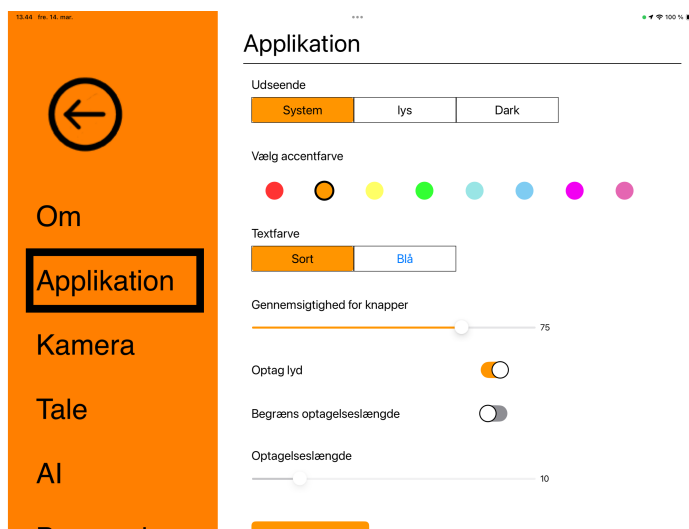

Udseende

Vælg mellem lys, mørk eller systemlook.

Accentfarve

Vælg accentfarve.

Tekstfarve

Vælg tekstfarve

Knap gennemsigtighed

Indstil gennemsigtigheden af kameraknapperne.

Optag lyd

Vælg, om der skal optages video med lyd.


Begræns optagelseslængde

Aktivér denne funktion for at begrænse optagelsens længde.

Længde i minutter

Hvis du har valgt at begrænse optagelseslængden, kan du indstille grænsen i minutter her, fra 1 til 60 minutter.

4.4.3 Kameraindstillinger

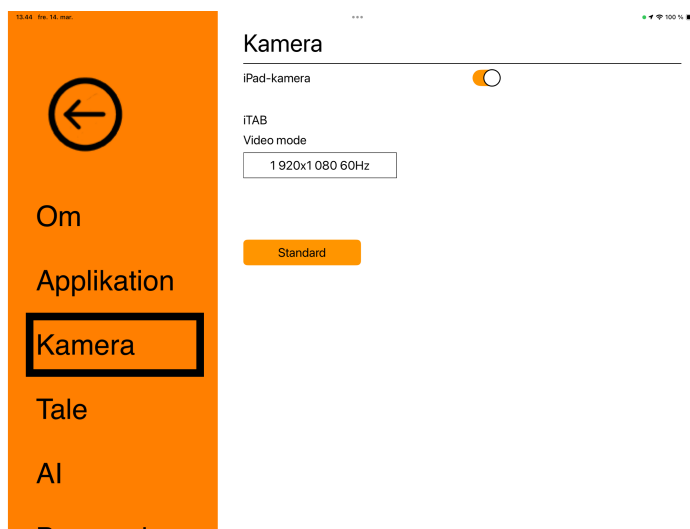


iPad-kamera

Når dette er deaktiveret, er det ikke muligt at anvende de integrerede kameraer.

Videotilstand

Vælg mellem kameraets forskellige videotilstande.

4.4.4 Taleindstillinger

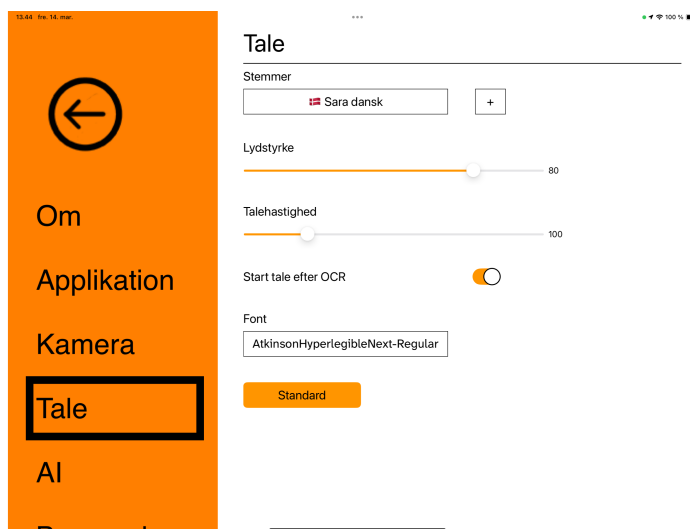

Stemmer

Hvis flere stemmer er tilgængelige, kan brugeren vælge mellem dem. Du kan få andre stemmer ved at downloade sprog i iPad'ens indstillinger. OCR-programmet understøtter kun sprog, der bruger det latinske alfabet.

Volumen

Indstilling af stemmens lydniveau.

Talehastighed

Indstilling af talehastigheden.


Start tale efter OCR

Hvis denne boks er afkrydset, læses teksten automatisk højt, efter et billede er blevet OCR-behandlet.

Skrifttype

: Her kan brugeren indstille skrifttypen til visning af den OCR-behandlede tekst. Valget af skrifttype har ingen betydning for OCR-resultatet.

4.4.5 AI-indstillinger

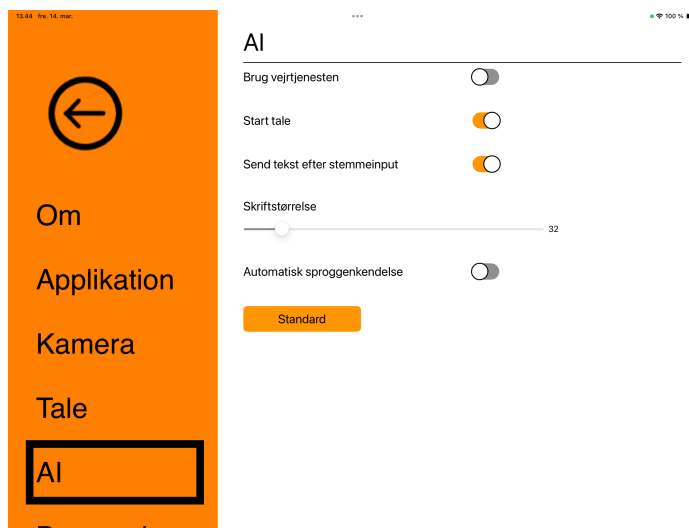

Start oplæsning

Når dette er markeret, starter aflæsningen med det samme, du modtager en besked.

Send tekst efter stemmeinput

Når dette er markeret, sendes teksten automatisk efter et stemmeinput.

Skriftstørrelse

Her kan du indstille skriftstørrelsen.

Automatisk sproggenkendelse

Når denne funktion er aktiveret, forsøger applikationen at identificere sproget og ændre stemmen i overensstemmelse hermed.

4.4.6 Bevægelser




Her kan du vælge hvilke bevægelser der bliver anvendt. Du kan fravælge den relevante boks for at afbryde en bevægelse.

4.4.7 Genvejskommandoer



Her kan du ændre de anvendte genvejskommandoer for applikationen. Hvis du vil ændre en genvejskommando, skal du gå med tabulatoren til den kommando, der skal ændres og indtaste den nye tastaturkombination. Hvis der indtastes en kombination, der allerede er i brug til en anden kommando, slettes den anden kommando. Der skal indtastes en ny tastaturkombination for den anden kommando.

4.4.8 EUC

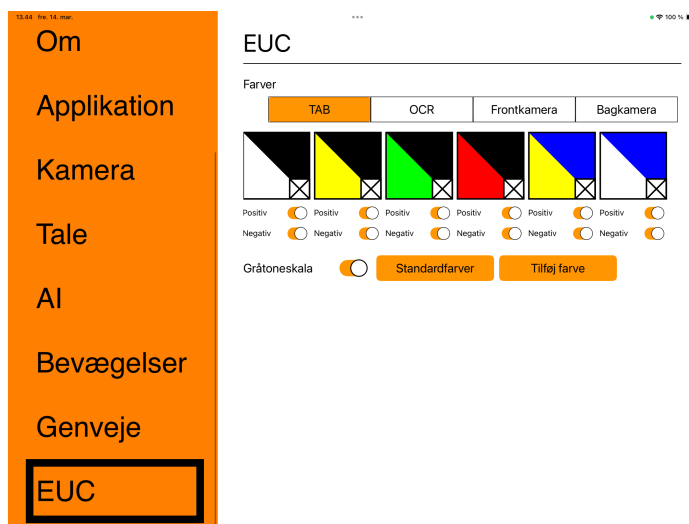

Kameraet kan konfigureres under denne fane.

Farvevalg

Det er muligt at fjerne og ændre kameraets kunstige farver.

- Tryk på X for at fjerne en farvekombination.
- Tryk på Tilføj for at tilføje en farvekombination.
- Hvis du vil ændre en farvekombination, skal du trykke på et af trekantsfelterne, og der vises en farvedialogboks. Vælg farver, og tryk på OK.
- Sådan fjernes enten den positive eller negative komponent. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne "Positiv" eller "Negativ".
- Tryk på "Standardfarver" for at gendanne farverne.

Gråtoneskala

Vælg, om du ønsker gråtoneskala eller ej.

Alfabetisk indeks

AI-indstillinger	27
AI-visning	15
Aktivér driver	4
Anbefalede systemkrav	1
Bevægelser	28
Brug af softwaren	5
EUC	29
Funktioner via bevægelser	17
Funktioner via menuer	5
Funktioner via tastaturet	19
Generelt	19
Genvejskommandoer	28
Installation af software	2
Introduktion til MagniLink Viewer	1
iPad-indstillinger	4
Kameraindstillinger	26
Kamerasystem	4
Kameravisning	5, 17
Kamera-visning	20
MagniLink AIR	4, 8, 21
MagniLink USB-kameraer	4
Notepad-visning	13, 23
OCR-visning	10, 18, 22
Om applikationen	24
Programindstillinger	25
Slut til netværk	4
Systemkrav	1
Taleindstillinger	26
Vindue for informationer og indstillinger	24