


MagniLink Programvara

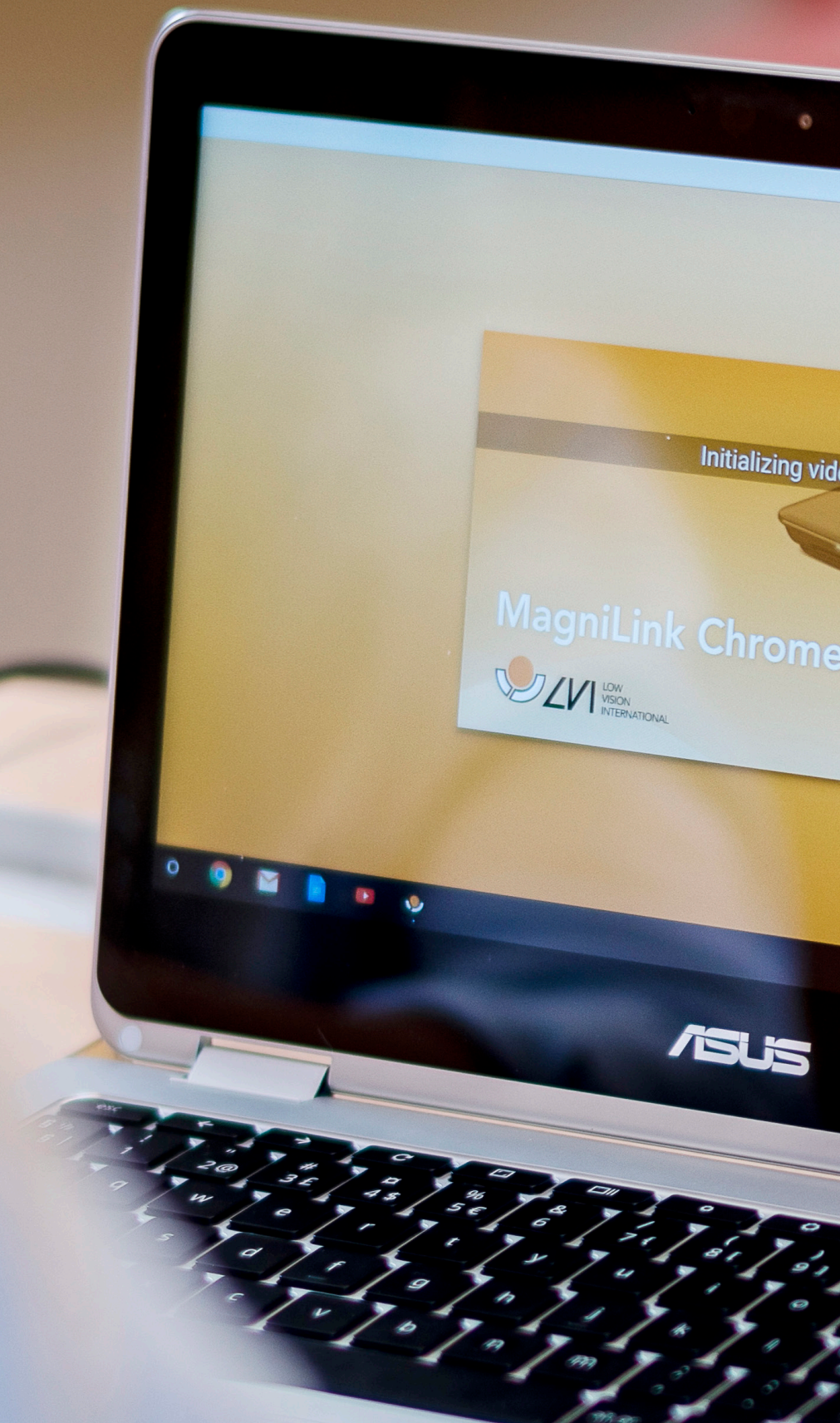

Anpassa bäst du vill!

Programvaran används för att visa bild från din MagniLink läskamera, och du väljer programvara utifrån vilken dator du har – PC, Mac eller Chromebook. Det är med programvaran du styr läskamerans egenskaper som exempelvis förstoringsgrad, artificiella färger och ljusnivå. Programvaran ger dig också möjlighet till individuella anpassningar för bästa upplevelse!

Funktionalitet

De tre programvarorna MagniLink PCViewer, MagniLink MacViewer och MagniLink ChromeViewer är inte helt identiska men har många funktioner som är desamma, som exempelvis:

- Olika färg- och ljusinställningar.
- Olika förstoringsgrad.
- Låsbar autofokus.
- Ta och visa bilder.
- Spela in och visa videoinspelning.
- Spegla, rotera och frysa bilder.
- Olika hjälplinjer som underlättar läsning.
- Styrning av funktionerna på olika sätt. Antingen via menyer, kortkommandon på tangentbordet eller knappar på läskamerans kontrollpanel.
- Konfigurering av egna kortkommandon.
- Kamerabilden placerad överst/längst fram bland alla öppnade applikationer.
- Välj och växla mellan flera vyer.
- Stöd för motoriserade kameror i MagniLink AIR familjen.
- Stöd för flera videoströmmar och delad bild mellan dessa, tex samtidigt användning av flera MagniLink kameror.
- Anteckningsverktyg med möjlighet att rita, förstora och panorera i bilden (ej MacViewer)

Tillval TTS

Med tillvalet TTS (Text To Speech) för PC, Mac och Chromebook är det möjligt att OCR-behandla en text och få den uppläst. Den OCR-behandlade texten kan visas i flera olika bildvisningslägen synkroniserat med tal. Det går att OCR-behandla text från en bild som tas med den anslutna MagniLink kameran och det är möjligt att förstora och navigera i OCR-bilden. För PC och Mac går det även att dra in andra dokument eller klistra in texter rakt in i programmet för att få dem OCR-behandlade och upplästa.

MagniLink PCViewer Standalone

Programvaran MagniLink PCViewer Standalone används på en Windows-baserad PC utan att den är kopplad till en läskamera. Med mjukvaran kan du OCR-behandla dokument och få dessa upplästa av den inbyggda talsyntesen. Du kan även visa den OCR-behandlade texten med eller utan tal i olika visningslägen. Vid köp av läskameran MagniLink PRO och MagniLink S Premium 2 ingår "vanliga" PCViewer och om man väljer till TTS ingår också standalone-funktionen.

Kompatibelt för PC-användare

MagniLink PCViewer är kompatibel med andra hjälpmedelsprogram som ZoomText och SuperNova.



Rekommenderade systemkrav

MagniLink PCViewer


- Microsoft Windows 7
- En integrerad USB 3.0-port
- i5 eller i7 processor, 4 GB RAM-minne, externt grafikkort med minst 512 MB inbyggt minne

MagniLink MacViewer

- Mac Os 10,14 eller senare
- En integrerad USB 3.0-port
- i5 eller i7 processor, 4 GB RAM-minne, externt grafikkort med minst 512 MB inbyggt minne

MagniLink ChromeViewer

- En integrerad USB 3.0-port
- i5 processor
- 4 GB RAM-minne

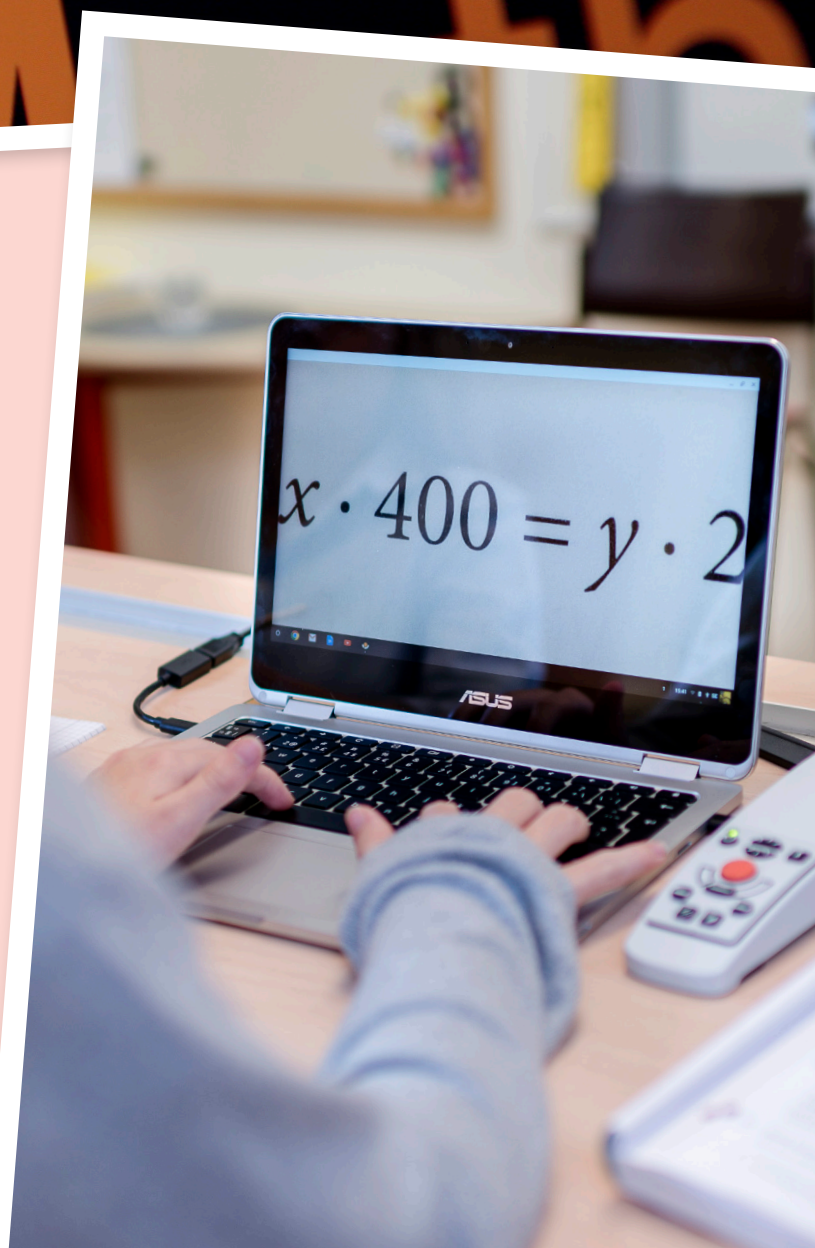

MagniLink Programvara

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor med synnedsättning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE