


MagniLink Logiciel

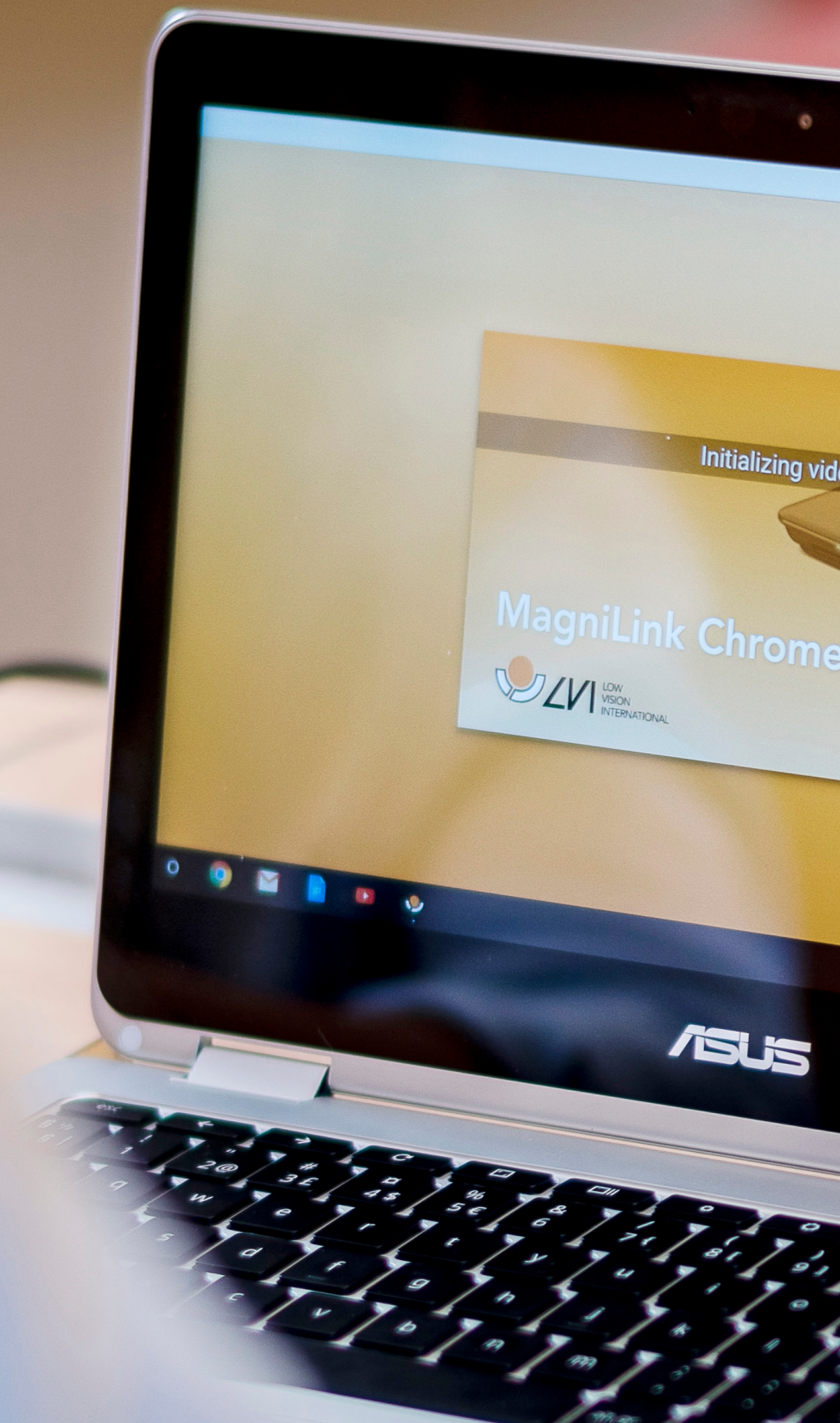

Un logiciel innovant !

Le logiciel permet d'afficher l'image captée par votre caméra de lecture MagniLink. et le choix du logiciel se fait en fonction de votre type d'ordinateur : PC, Mac ou Chromebook. Le logiciel commande les propriétés de la caméra de lecture comme par exemple, le grossissement, les couleurs artificielles, la luminosité et donne également à l'utilisateur la possibilité d'adapter individuellement les documents pour la meilleure expérience.

Fonctions

Les logiciels MagniLink PCViewer, MagniLink MacViewer et MagniLink ChromeViewer ne sont pas totalement identiques mais ont beaucoup de fonctions en commun. Par exemple :

- Différents paramètres de couleur et luminosité.
- Différents degrés de grossissement.
- Autofocus verrouillable.
- Prenez et montrez des photos.
- Enregistrez et montrez des films.
- Inversez, faites tourner et figez des photos.
- Différentes lignes-guides.
- Commande des fonctions de différentes manières. Soit par le biais des menus, raccourcis sur le clavier soit par les boutons sur la caméra de lecture.
- Configurez vos propres raccourcis sur le clavier.
- Sélectionnez un mode d'affichage et basculez d'un mode à l'autre.
- Prise en charge des caméras motorisées dans la famille MagniLink AIR.
- Prise en charge de plusieurs flux vidéo et partage d'image entre eux, par ex. Bascule entre plusieurs caméras MagniLink.
- Outil de prise de note avec la possibilité de dessiner, de déplacer et d'agrandir l'image (pas disponible sur MacViewer).

Synthèse vocale (TTS) en option

L'option TTS (Text To Speech) pour PC, Mac et Chromebook permet de traiter le texte par OCR et de le faire lire à haute voix. Le texte traité par OCR peut être affiché dans plusieurs modes d'affichage synchronisés avec la parole. Il est possible de traiter le texte OCR à partir d'une photo prise avec la caméra MagniLink, il est alors possible d'agrandir et de naviguer dans l'image OCR. Pour PC et Mac, il est également possible d'importer d'autres documents ou de coller des textes directement dans l'application pour les faire lire à haute voix.

MagniLink PCViewer Standalone

MagniLink PCViewer™ Standalone est un logiciel utilisable sur un PC avec Windows sans que celui-ci ne soit connecté à une caméra MagniLink. Avec ce logiciel, vous pouvez traiter vos documents avec OCR et l'écouter avec l'aide de la synthèse vocale. Vous pouvez lire un texte traité avec OCR avec ou sans synthèse vocale dans différents modes d'affichage pour les malvoyants. Le logiciel PCViewer est inclus lors de l'achat de la caméra MagniLink S Premium 2 ou MagniLink Pro et en optant pour TTS, la fonction standalone est également incluse.

Compatibilité

Le logiciel pour PC, MagniLink PCViewer, inclus est compatible avec plusieurs autres logiciels de grossissement, tels que ZoomText et SuperNova.



Configurations requises

MagniLink PCViewer


- Microsoft Windows 7
- Un port USB 3.0 intégrée
- Processeur i5 ou i7, mémoire RAM 4 Go, carte graphique externe avec au moins 512 Mo de mémoire intégrée

MagniLink MacViewer

- Mac Os 10,14 eller senare
- Un port USB 3.0 intégrée
- Processeur i5 ou i7, mémoire RAM 4 Go, carte graphique externe avec au moins 512 Mo de mémoire intégrée

MagniLink ChromeViewer

- Un port USB 3.0 intégrée
- Processeur Intel i5
- 4 Go RAM

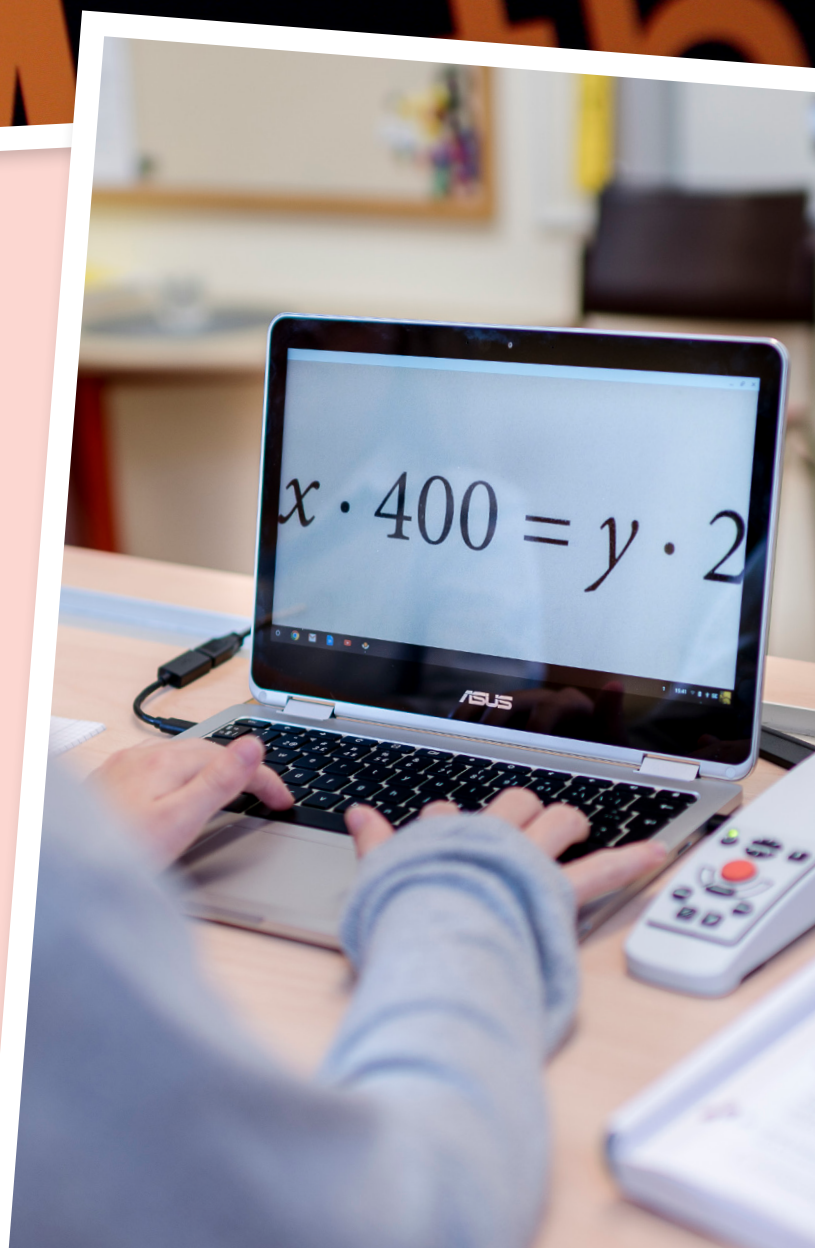

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SUISSE
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsgratan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE