

Bruksanvisning

MagniLink ChromeViewer

Tillverkare: LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5

352 46 Växjö

Tel: 0470 - 727700

Fax: 0470 - 727725

info@lvi.se

www.lvi.se

Innehållsförteckning

1	Om LVI.....	5
2	Introduktion av MagniLink ChromeViewer	6
2.1	Minimala systemkrav	6
2.2	Rekommenderade systemkrav.....	6
3	Installation av mjukvaran	7
4	Licensiering	11
5	Använda mjukvaran	12
5.1	LVI-kamera.....	12
5.2	Funktioner via menyer	12
5.3	Funktioner via tangentbordet.....	21
5.4	Styrning via musen.....	25
5.5	Informations- och inställningsfönster	25
5.6	Kvalitet på OCR-behandling.....	32

1 Om LVI

LVI Low Vision International AB grundades 1978 och är en av världens ledande tillverkare av förstörande TV- och datorsystem för synsvaga. Utveckling av nya produkter sker i nära samarbete med användare och professionell personal inom synrehabiliteringen. LVI är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Informationen i denna bruksanvisning har noga kontrollerats och anses vara korrekt. LVI tar inget ansvar för några felaktigheter som denna bruksanvisning kan innehålla. LVI är inte ansvarig för några direkta eller indirekta skador som resultat från informationen i denna bruksanvisning. Eftersom produktutveckling ständigt sker, förbehåller sig LVI rätten att när som helst utan föregående information göra förbättringar i denna bruksanvisning och den produkt som beskrivs i densamma.

2 Introduktion av MagniLink ChromeViewer

MagniLink ChromeViewer är en mjukvara som används till en Chromebook för att visa bild från ett MagniLink kamerasystem. Mjukvaran kan styra kamerans egenskaper som förstoringsgrad, artificiella färger och ljusnivå. Vid erhållen licens är det möjligt att OCR-behandla en text och få den uppläst av en talsyntes.

2.1 Minimala systemkrav

- Chrome OS version 98
- 1 integrerad USB 3.0 portar.
- Intel Celeron, 2 GB RAM-minne

2.2 Rekommenderade systemkrav

- Chrome OS version 98
- 1 integrerad USB 3.0 typ A-port
- Intel i5 processor
- 4 GB RAM-minne

LVI rekommenderar att använda en Intel-baserad Chromebook tillsammans med en MagniLink-kamera då vi har sett kompatibilitetsproblem med vissa ARM-baserade Chromebooks.

En USB 3.0 Y-kabel kan komma att behövas för att leverera tillräckligt med ström åt kamerasystemet. En USB Y-kabel tillåter användningen av 2 USB-portar för att driva ett MagniLink kamerasystem.

LVI har testat mjukvaran på ett flertal Intel-baserade Chromebooks utan problem, men det är ingen garanti för att systemet kommer fungera på samtliga Chromebooks som följer specifikationen. LVI rekommenderar att testa mjukvaran med den Chromebook som systemet ska användas med, för att säkerställa komabiliteten. Högre datorprestanda möjliggör högre kameraprestanda.

Observera att det krävs internetuppkoppling för licensiering samt användning av OCR i ChromeViewer.

3 Installation av mjukvaran

MagniLink ChromeViewer finns tillgänglig för nedladdning via Chrome Web Store. Utifall ni inte skulle hitta applikationen via sökfunktionen på Chrome Web Store så finns det en direktlänk på vår hemsida som tar er till installationssidan.

Länken kommer att öppna upp en ny sida med Chrome Web Store och MagniLink ChromeViewer kommer att väljas automatiskt.

[Startsida](#) > [Tillägg](#) > MagniLink ChromeViewer



MagniLink ChromeViewer

Lägg till

Erbjuds av: <https://lviglobal.se>

★★★★★ 0 | [Tillgänglighet](#) | 2 användare


Översikt

Integritetspraxis


Recensioner

Support


Relaterat

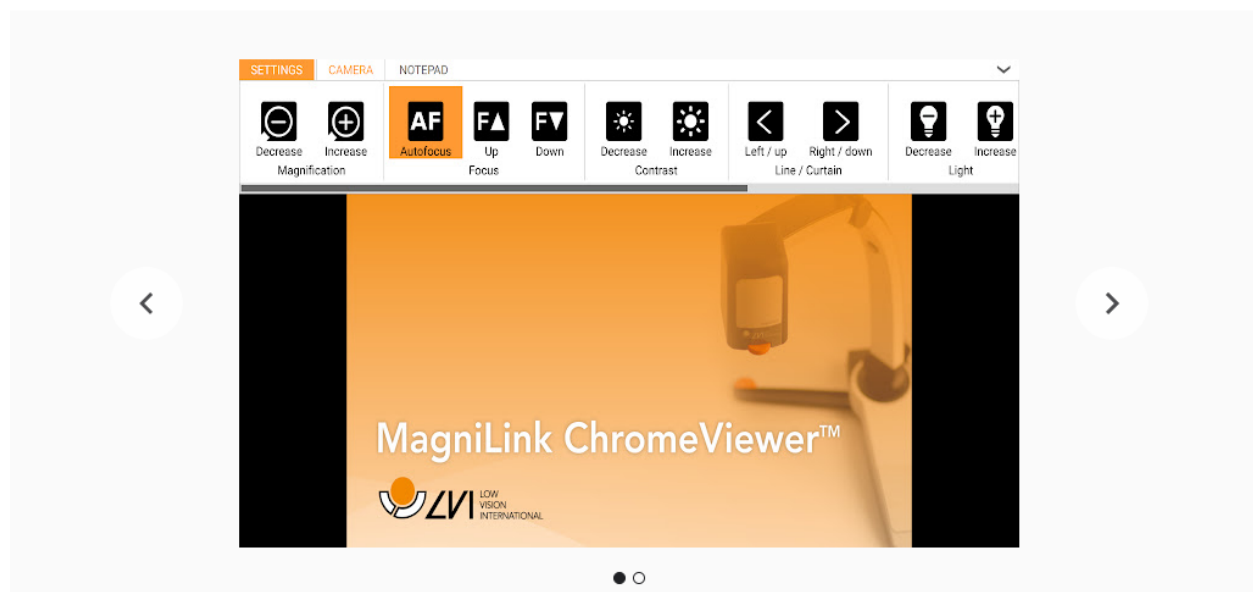


Tryck på **Lägg till** för att påbörja installationen.

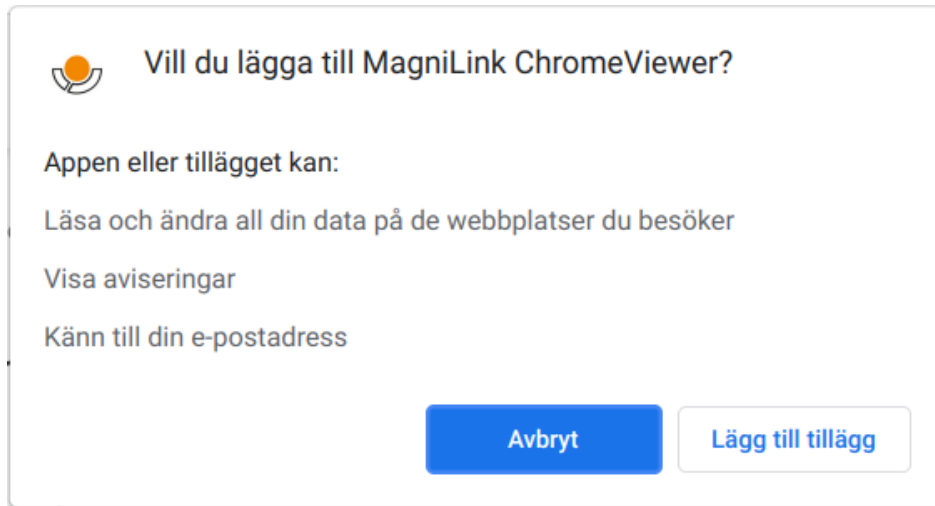

Därefter möts du av en informationsruta som förklarar vad applikationen har tillgång till att göra, tryck **Lägg till tillägg** för att gå vidare.

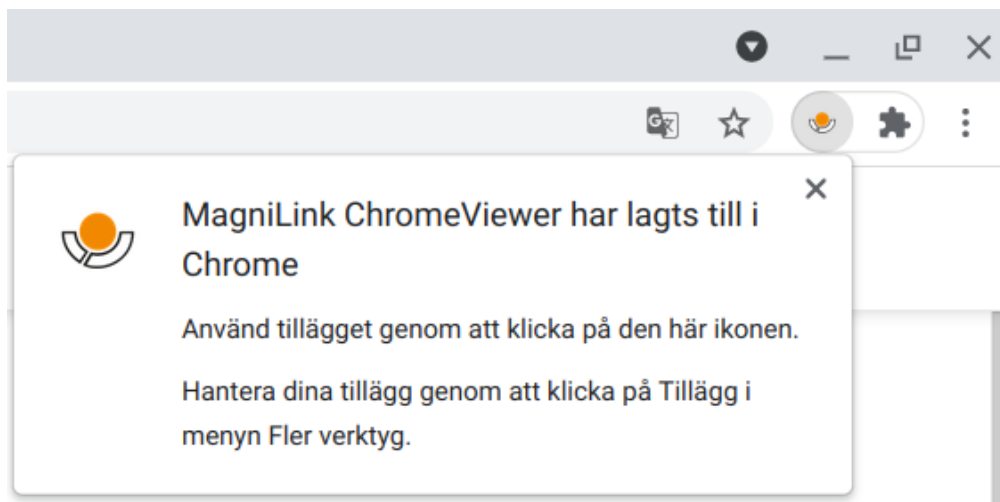


Nu är installationen klar och du kan starta applikationen genom att följa hänvisningarna och trycka på ikonen som markeras. Det går även som det beskrivs i ovan bild att trycka på Tilläggs-knappen för att starta applikationen.

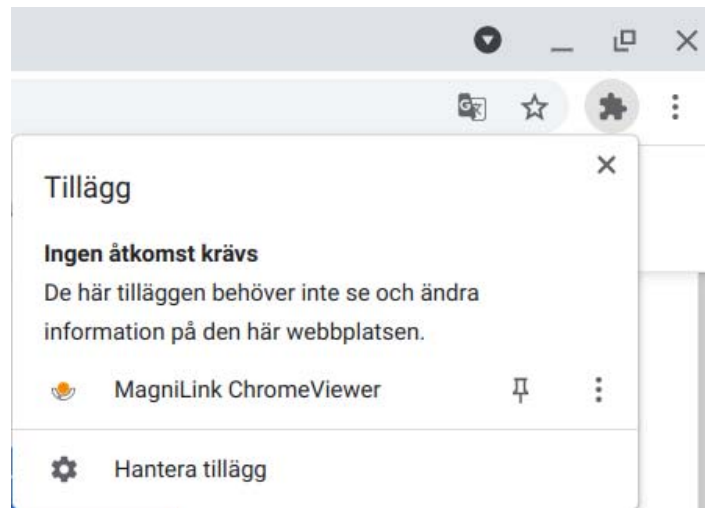


Vill man ha tillgång till MagniLink ChromeViewer i App Launcher med möjlighet att fästa applikationen på startfältet så behövs följande göras.

1. Starta MagniLink ChromeViewer.
2. Gå in i inställningar.
3. Tryck på knappen **Copy URL** som befinner sig under Om-inställningssidan för att kopiera adressen till tillägget.
4. Starta webbläsaren Google Chrome.
5. Markera adressfältet och klistra in den kopierade adressen antingen genom att trycka **Ctrl + V** eller genom att högerklicka på adressfältet och välja **Klistra in**. Tryck Enter.
6. Under **Mer** högst upp till höger, tryck på **Fler verktyg** och sedan **Skapa genväg**.

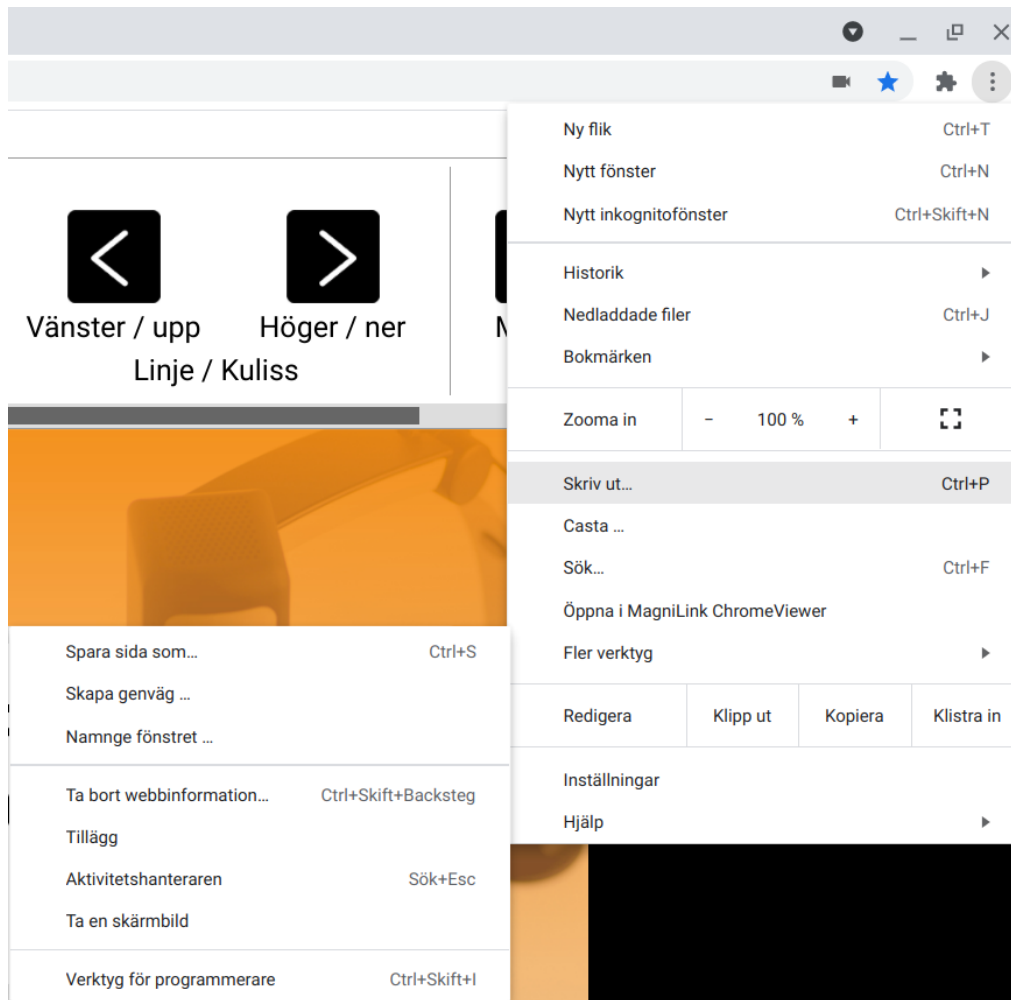

7. Markera **Öppna som fönster** och tryck sedan **Skapa**.

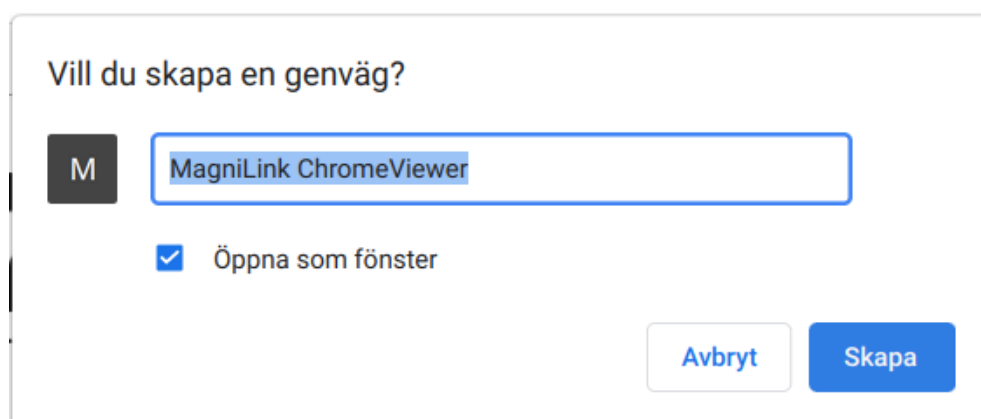

Via App Launcher kan du även fästa fast MagniLink ChromeViewer på startfältet.

4 Licensiering

De kamerasystem som används med ChromeViewer kan licensieras med OCR. ChromeViewer kommer automatiskt upptäcka om ditt kamerasystem är licensierat för OCR.

Det är även möjligt att aktivera en fristående OCR-licens. En sådan aktivering kräver att du ger ChromeViewer tillgång till vissa uppgifter på ditt Google-konto då licensnyckeln appliceras mot ditt Google-konto vid aktivering. Det betyder att du inte blir låst till någon dator utan kan använda vilken Chromebook som helst med ditt Google-konto och fortfarande använda OCR i ChromeViewer.

För att ge ChromeViewer tillgång till ditt Google-konto, tryck på Logga in-knappen som återfinns under inställningar och följ sedan instruktionerna. Vid lyckad inloggning visas en inmatningsruta där licensnyckeln skall matas in, tryck sedan OK. Vid lyckad aktivering skall du direkt få tillgång till OCR.

Observera att OCR med ChromeViewer har följande begränsningar:

- Det krävs internetuppkoppling för licensiering samt användning av OCR i MagniLink ChromeViewer.

5 Använda mjukvaran

5.1 LVI-kamera

För att starta en USB LVI-kamera krävs att du antingen trycker på Anslut-knappen, längst till vänster i menyraden under kamera-fliken, eller på kortkommandot L. Därefter öppnas en dialogruta innehållande en lista med inkopplade USB LVI-kameror. Markera vilken kamera du vill starta och välj sedan Anslut.

5.2 Funktioner via menyer

Applikationen består av ett fönster med flikar och grupper av knappar. Det finns en flik för applikationens inställningar, en flik för att hantera kameran och en flik för Notepad. Beroende om du har erhållit en licens, finns det även en flik för att hantera OCR-behandlad text.

5.2.1 Kamera-flik

Följande flik varierar i utbud av knappar beroende på antal inkopplade kamerasystem.




Anslut LVI-kamera




Minska förstoringen




Öka förstoringen

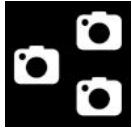**Växla bildkällor**


Växlar mellan bildkällor (Om det finns fler än två källor).

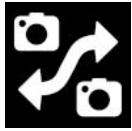**Växla kamera**


Växlar mellan kameror.

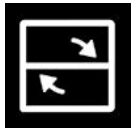**Ändra splitläge**

Ändra mellan vertikalt och horisontellt splitläge.

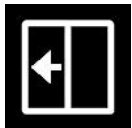**Flytta split vänster**

Flyttar splitläget åt vänster.

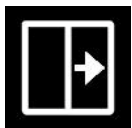**Flytta split höger**

Flyttar splitläget åt höger.

**Panorera vänster****Panorera höger****Tilta ner****Tilta upp**

**Position 1**

För att spara positionen, håll in "Ctrl" medans du trycker på knappen. När du sedan trycker på knappen, förflyttas kamerabilden till den sparade positionen.

**Position 2**

För att spara positionen, håll in "Ctrl" medans du trycker på knappen. När du sedan trycker på knappen, förflyttas kamerabilden till den sparade positionen.

**Position 3**

För att spara positionen, håll in "Ctrl" medans du trycker på knappen. När du sedan trycker på knappen, förflyttas kamerabilden till den sparade positionen.

**Lås autofokus**


Låser det autofokuserande läget. Detta kan användas när man önskar skriva för hand. Man påverkar då inte autofokus med pennan eller handen. Vid ny intryckning erhålls åter det autofokuserande läget.


**Fokus upp**

Minska fokusavståndet. När denna funktion används stängs autofokus av.

**Fokus ner**

Öka fokusavståndet. När denna funktion används stängs autofokus av.

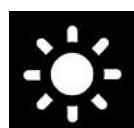**Minska ljusstyrka/kontrast****Öka ljusstyrka/kontrast**

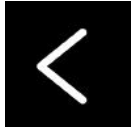**Referenslinje/kuliss vänster/upp**

Justerar läget på referenslinjen. Vid tryck på knappen förflyttas referenslinjen åt vänster. Vid fortsatt intryckning växlar referenslinjen till horisontellt läge och förflyttas uppåt. Därefter blir referenslinjen en vertikal kuliss som minskar synområdet. Ytterligare nedtryckning gör att kulissen blir horisontell.

**Referenslinje/kuliss höger/ner**

Samma som föregående kommando fast åt motsatt håll.

**Minska lampans ljus****Öka lampans ljus****Ta ögonblicksbild**


En dialogruta "Spara filen som" öppnas. Ett filnamn (dagens datum och tid) och en mapp (Nedladdningar) föreslås automatiskt. Tryck bara "Enter" för att spara bilden. Om du vill spara bilden någon annanstans kan du ändra detta manuellt.

**Starta/avsluta videoinspelning**

Tryck för att öppna dialogrutan "Spara filen som". Ett filnamn (dagens datum och tid) och en mapp (Nedladdningar) föreslås automatiskt. Tryck på "Enter" för att spara med det föreslagna namnet. Om du önskar spara videofilmen i en annan mapp eller med ett annat namn, kan du ändra detta i dialogrutan. Avsluta inspelningen genom att trycka på knappen igen.

**Rotera kamerabilden**

Roterar kamerabilden medurs. För att rotera moturs, håll ner Shift när du trycker på knappen.

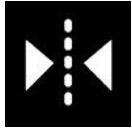**Spegla kamerabilden**

Ett nytt tryck återställer speglingen.

**Fryser kamerabilden**

Ett nytt tryck släpper frysningen.

**Helbild**

När denna är aktiv visas hela kamerabilden. Annars klipper man i bilden beroende på hur stort kamerafönstret är.

**OCR-behandla**

Gör en OCR-behandling på kamerafönstret.

**Notepad**

Öppnar bild från kamera i anteckningsverktyget.

**Hjälp**

Öppnar bruksanvisningen i standardapplikationen för att visa PDF-filer.

5.2.2 OCR-flik

Följande flik visas endast om systemet har licens för OCR.



Öppna dokument (OCR-behandla)

Öppnar en dialogruta. Välj i dialogrutan den fil som skall öppnas. Det är möjligt att öppna bildfiler i JPEG, PNG och PDF format.



Importera dokument

Importera exporterade dokument.



Exportera dokument

Exportera nuvarande dokument.



Spara dokument

Spara nuvarande dokument. Dokumentet kommer att finnas kvar i applikationen och kvarstå vid omstarter tills du väljer att radera dokumentet.



Radera dokument

Radera nuvarande dokument.



Spela / Pausa

Starta/pausa uppläsning.



Stopp

Stoppa uppläsning. Nästa uppläsning sker ifrån textens början.



Bakåt

Med detta kommando kan användaren stega bakåt i texten. Om läsläget är valt till ord så stegar man ord för ord bakåt i texten. Är läsläget mening så stegar man en mening bakåt.



Framåt

Med detta kommando kan användaren stega framåt i texten. Om läsläget är valt till ord så stegar man ord för ord framåt i texten. Är läsläget mening så stegar man en mening framåt.



Läsläge

Med detta kommando växlas läsläge som skall användas när kommandona "**Bakåt**" och "**Framåt**" trycks in. De lägen som finns är bokstav, ord eller mening.



Vyläge

Växlar visningsläge för OCR-behandlad text. De visningslägen som finns tillgängliga är "sidläge", "radläge", "ordläge", "bildläge", "bild och ord" samt "bild och rad".



Textstorlek

Ändrar storleken för den OCR-behandlade texten.



Hastighet

Ändrar talhastigheten.



Hjälp

Öppnar bruksanvisningen i standardapplikationen för att visa PDF-filer.

5.2.3 Notepad-flik



Anteckningsverktyget består av tre komponenter.

- Överst finns en menyrad med knappar.
- Till vänster finns en lista med bilder. Genom att klicka på en bild, kan man navigera till denna. Man kan ta bort en bild genom att klicka i det övre högra hörnet.
- En yta där man kan rita, förstora och panorera i bilden.



Öppna

Öppna bild. det är möjligt att öppna bildfilerna JPEG, PNG och PDF.



Exportera

Exportera anteckning. Det är möjligt att exportera den aktiva anteckningen som en bildfil eller alla anteckningarna som en PDF.



Spara

Spara nuvarande anteckning. Anteckningen kommer att finnas kvar i applikationen och kvarstå vid omstarter tills du väljer att radera anteckningen.



Radera

Radera nuvarande anteckning.



Kulspetspenna

Rita med en kulspetspenna.

**Överstrykningspenna**

Rita med en överstrykningspenna.

**Text**

Infoga text. Efter att man infogat text, kan man flytta runt på denna. Det kräver dock att man trycker på den infogade texten med Text-verktyget.

**Zooma & Panorera**

Förstora och panorera i bilden.

**Suddgummi**

Radera.

**Ångra**

Ångrar senaste inmatning.

**Gör om**

Återskapar efter att man har tryckt ångra.

**Rotera**

Rotera bilden. OBS att det här raderar alla inmatningar.

5.3 Funktioner via tangentbordet

Globala kortkommandon	Nedan kortkommandon gäller för alla flikar.
9	Informations- och inställningsfönster Under detta fönster kan olika inställningar för applikationen göras.
Alt + 1	Gå till kamera-fliken
Alt + 2	Gå till OCR-fliken
Alt + 3	Gå till Notepad-fliken
V	Växla mellan flikar
Ctrl + H	Dölj eller visa menyn
8	Nästa fönsterposition Tryck på tangenten 8 upprepade gånger för att växla mellan de förinställda bilddelningslägena på den primära skärmen. Fönstret kan också kontrolleras via musen eller Chrome OS standardkommandon.
Ctrl + Plus	Förstora meny
Ctrl + Minus	Förminska meny
Kamera-kortkommandon	Nedan kortkommandon gäller enbart för kamera-fliken.
L	Anslut LVI-kamera Visar dialog för att starta inkopplad LVI-kamera.
1	Naturliga färger Växlar mellan naturliga färger och gråskala.
2	Positiv bild med förhöjd kontrast Artificiella färger; Vit/Svart, Gul/Svart, Grön/Svart, Röd/svart, Gul/Blå, Vit/blå. Tryck på tangenten 2 flera gånger för att växla mellan de olika färgerna. (Shift + 2 stegar negativt)
3	Negativ bild med förhöjd kontrast Artificiella färger; Vit/Svart, Svart/Gul, Svart/Grön, Svart/Röd, Blå/Gul, Blå/Vit. Tryck på tangenten 3 flera gånger för att växla mellan de olika färgerna. (Shift + 3 stegar negativt)

4	Starta OCR Starta OCR med automatisk uppläsning. (Skift + 4 startar OCR utan automatisk uppläsning)
5	Lägg till anteckning Lägg till anteckning och öppna Notepad. (Skift + 5 lägger till anteckning men öppnar inte Notepad)
Pil upp	Öka förstoringen
Pil ned	Minska förstoringen
J	Autofokus Av/På
Skift + Pil upp	Minska fokuseringsavstånd
Skift + Pil ner	Öka fokuseringsavstånd
Pil höger	Öka ljusstyrka/kontrast
Pil vänster	Minska ljusstyrka/kontrast
Ctrl + Pil vänster	Referenslinje vänster/upp
Ctrl + Pil höger	Referenslinje höger/ned
Ctrl + 7	Öka lampans ljus
Ctrl + 6	Minska lampans ljus
Ctrl + P	Ta "snapshot" Tryck på tangenterna Ctrl + P för att öppna dialogrutan "Spara fil". Ett filnamn (dagens datum och tid) och mapp föreslås automatiskt. Tryck bara Enter för att spara bilden. Om du vill spara bilden någon annanstans eller med annat namn kan du ändra detta manuellt.
Ctrl + M	Starta/avsluta videoinspelning Tryck på tangenterna Ctrl + M för att starta videoinspelning. Innan inspelningen påbörjas visas en dialogruta med föreslaget filnamn (dagens datum och tid) och mapp. Tryck bara Enter för att starta videoinspelningen. Om du vill spara videoinspelningen någon annanstans eller med annat namn kan du ändra det manuellt. Avsluta inspelning genom att trycka Ctrl + M.
Ctrl + R	Rotera kamerabilden medurs Varje gång denna tangentkombination trycks kommer kamerabilden att roteras 90° medurs (90°, 180°, 270° och 0°).

Ctrl + Skift + R	Rotera kamerabilden moturs Varje gång denna tangentkombination trycks kommer kamerabilden att roteras 90° moturs (270°, 180°, 90° och 0°).
Ctrl + I	Spegla kamerabild Speglar kamerabilden. Detta är en användbar funktion ifall du t ex vill använda kameran som en förstörande sminkspegel.
Ctrl + F	Frys kamerabild Genom att trycka denna tangentbordskombination fryses kamerabilden, för att släppa bildfrysningen tryck åter igen tangentkombinationen.
Ctrl + L	Helbild Växlar mellan helbild och beskuren bild.
A	Panorera vänster
D	Panorera höger
W	Panorera upp
S	Panorera ned
C	Växla kamera
X	Växla splitläge
Z	Växla bildkällor
Shift + Pil vänster	Flytta split vänster/upp
Shift + Pil höger	Flytta split höger/ner
Ctrl + Skift + 1	Spara position 1
Ctrl + Skift + 2	Spara position 2
Ctrl + Skift + 3	Spara position 3
Ctrl + 1	Gå till position 1
Ctrl + 2	Gå till position 2
Ctrl + 3	Gå till position 3
OCR-kortkommandon	Nedan kortkommandon gäller enbart för OCR-fliken
1	Spela / pausa uppläsning
2	Avsluta uppläsning
3	Föregående ord/mening/bokstav
4	Nästa ord/mening/bokstav

5	Växla mellan navigering med ord, mening eller bokstäver
B	Växla visningsläge
7	Minska talhastighet
8	Öka talhastighet
Notepad-kortkommandon	Nedan kortkommandon gäller enbart för Notepad-fliken
Ctrl + Z	Ångra
Ctrl + Skift + Z	Gör om
Ctrl + S	Spara anteckning
Del (Delete)	Ta bort anteckning
Ctrl + R	Rotera bild höger
Ctrl + Skift + R	Rotera bild vänster
1	Välj kulspetspenna
2	Välj överstrykningspenna
3	Välj text-verktyget
4	Välj förstörings- och panoreringsverktyget
5	Välj suddgummi
Ctrl + 1	Föregående färg på ritverktyg
Ctrl + 2	Nästa färg på ritverktyg
Ctrl + 3	Minska storlek på ritverktyg
Ctrl + 4	Öka storlek på ritverktyg

5.4 Styrning via musen

Viss funktionalitet kan styras med musen.

I kameraläge.

- Om kameran stödjer panorering så kan vänster musknapp användas för att panorera i bilden.
- Höger musknapp kan användas för att zooma i bilden.

I OCR-läge

- Vänster musknapp används för att starta talet. Du kan även markera ett ord för att fortsätta uppläsning från markerat ord.
- Genom att rulla på skrollhjulet kan man förstora eller förminska bilden.

5.5 Informations- och inställningsfönster

Informations- och inställningsfönstret består av ett antal olika flikar som innehåller applikationsinformation och inställningsalternativ.

5.5.1 Om applikationen



Under den här fliken finns information om mjukvarans version, upphovsrättigheter och licensinformation.

Vill du aktivera en erhållen licens med OCR mot ditt Google-konto är det här du loggar in och matar in licensnyckeln.

5.5.2 Applikationsinställningar



Fönsterlägen

Välj vilka olika fönsterlägen som kan väljas med tryck av tangenten 8.

Tema

Välj vilket tema som skall vara aktivt. Temat styr vilken färguppsättning applikation skall ha.


Språk

Ändra språk på mjukvaran. Mjukvaran är inställd att använda samma språk som datorns standard. Om inte språket är tillgängligt väljs engelska automatiskt som standard.

Menystorlek

Här kan man ändra storlek på menyerna och knapparna.

5.5.3 Videoinställningar

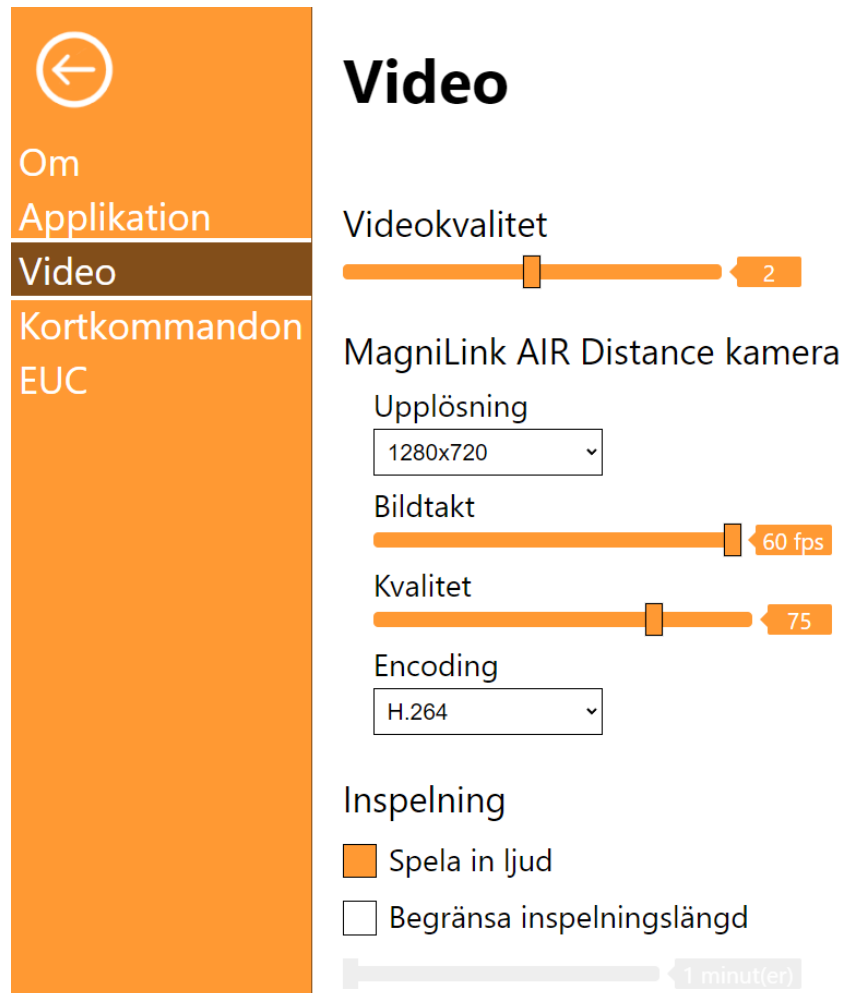

Videokvalitet

Denna inställning låter användaren öka eller minska videokvaliteten i applikationen. För den bästa balansen mellan prestanda och kvalitet bör inställningen lämnas oberörd men det kan vara lämpligt att sänka för datorer med låg prestanda.

Upplösning

Välj mellan kamerans olika upplösningar. Det går inte att välja upplösning på alla kameror.

Bildtakt

Denna inställning låter användaren begränsa bildtakten. Det går inte att ändra bildtakt på alla kameror.

Bildkvalitet

Denna inställning låter användaren begränsa kamerans bildkvalitet. Det går inte att ändra bildkvalitet på alla kameror.

Spela in ljud

Aktivera den här funktionen om du vill spela in ljud med inkopplad mikrofon.

Begränsa inspelningslängd

Aktivera den här funktionen om du vill begränsa inspelningslängden.

Längd i minuter

Om du valt att begränsa inspelningslängden kan du här ställa in begränsningen i antal minuter från en minut till 60 minuter.

MagniLink ChromeViewer kan spela in videosekvenser ifrån ett MagniLink kamerasystem till WebM (.webm) format. Videoinspelningen startas med tangentbordet(Ctrl + M) och medans videoinspelning sker så visas en röd indikator längst nere till höger i videofönstret.

5.5.4 Inställningar för kortkommandon

←

Om

Applikation

Video

Kortkommandon


OCR

Kortkommandon

Applikation	
Öppna inställningar	9
Gå till kameravyn	alt+1
Gå till OCR	alt+2
Öppna notepad	alt+3
Växla mellan att visa eller dölja menyn	ctrl+h
Nästa fönsterposition	8
Förstora meny	ctrl+plus-sign
Förminska meny	ctrl+minus-sign

Här kan de kortkommandon som applikationen använder ändras. För att ändra ett kortkommando, tabba till det kortkommando som skall ändras och tryck sedan Mellanslag eller Enter följt av den nya tangentbordskombinationen. Om en kombination som redan används för ett annat kommando trycks in så kommer det andra kommandot att nollställas. Det blir då nödvändigt att trycka in ny tangentbordskombination för det andra kommandot.

5.5.5 OCR-inställningar

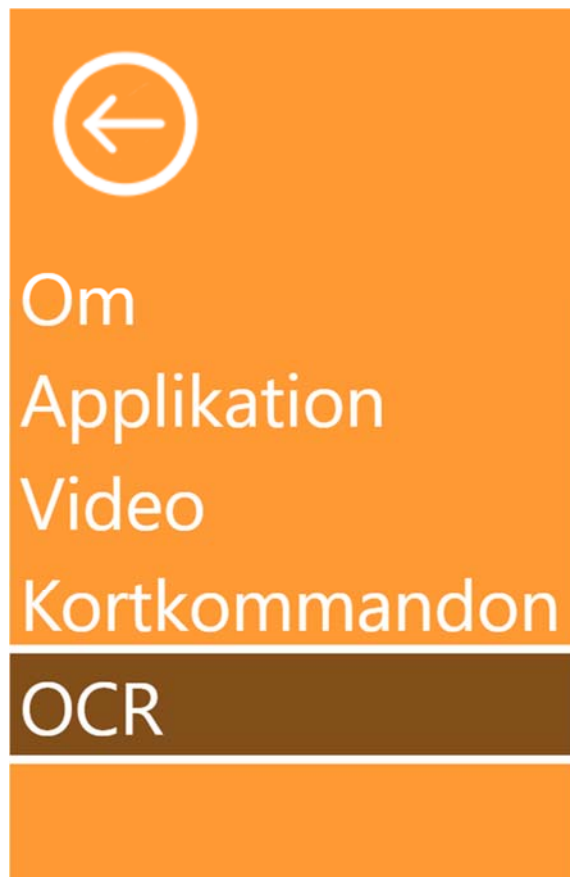

OCR

Röst

Astrid, Svensk



Region

Europe (Ireland)




Röst

Välj vilken röst skall användas vid framtida OCR-behandlingar.

Region

Välj vilket datacenter som skall utföra OCR-behandlingarna. Ju närmare din nuvarande plats, desto snabbare kommer OCR-behandlingarna att utföras.

5.5.6 EUC

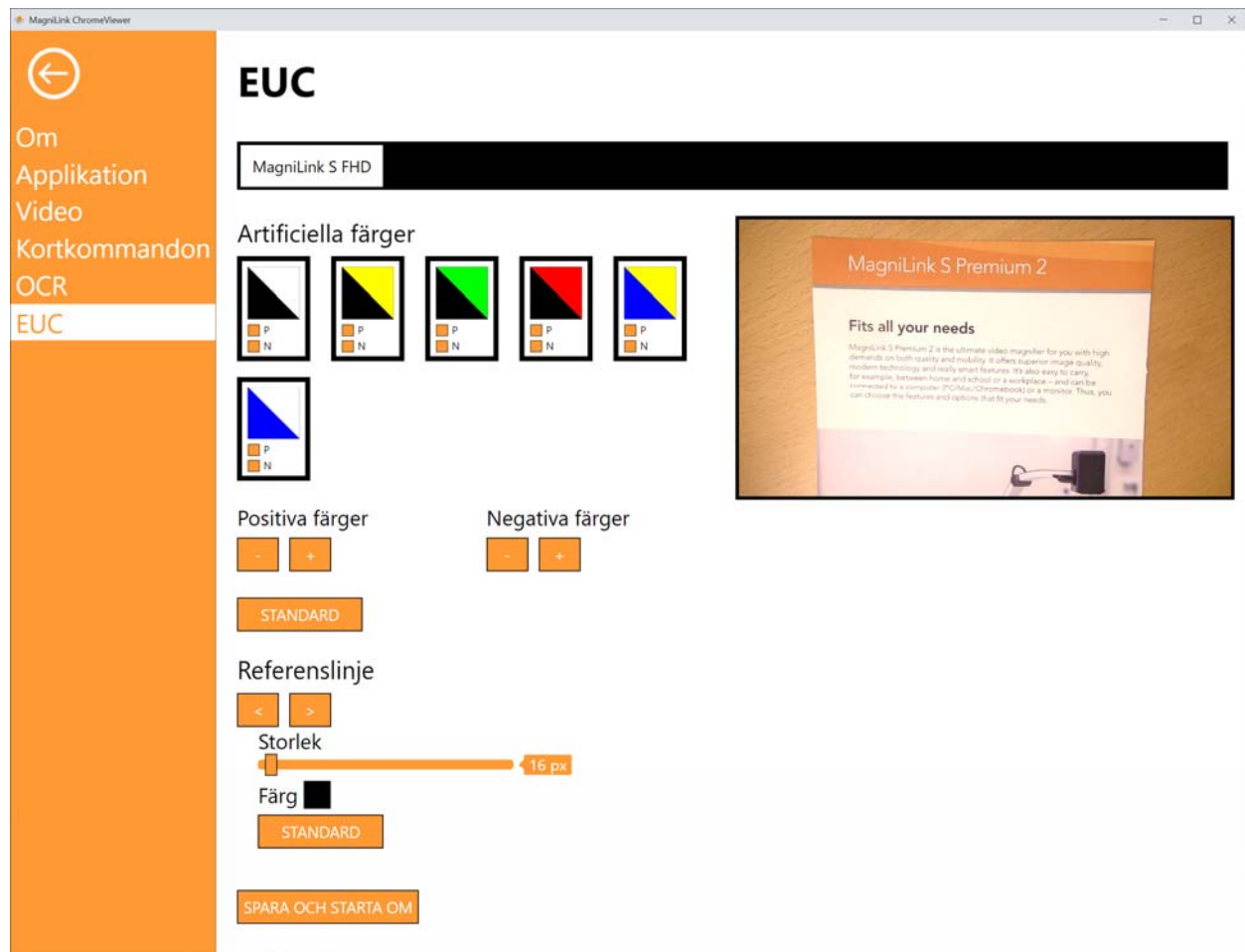

I denna flik kan man konfigurera kameran. Om en "Spara"-knapp är synlig längst ned måste den tryckas ned för att spara ändringarna. När du gör det startar kameran om och konfigureringen har sparats.

Artificiella färger

Det är möjligt att ta bort och ändra på kamerans artificiella färger.

- För att ta bort antingen den positiva eller negativa komponenten. Klicka ur kryssrutorna "P" eller "N".
- För att ta bort en färgkombination, avmarkera både P och N.
- För att ändra en färgkombination, tryck på en utav de triangulära fälten och en färgdialog visar sig. Välj färg och tryck ok.
- För att återställa färgerna, tryck på "Standard".

Referenslinje

Ställ in storleken och färgen på referenslinjen. Tryck på "Standard" för att återställa.

5.6 Kvalitet på OCR-behandling

För att få ett så bra resultat som möjligt på OCR-behandlingen, tänk på följande.

- Se till att förstoringen är tillräcklig. För liten text gör att OCR-resultatet blir dåligt. Minst 12pt rekommenderas vid minsta förstoringen på läskameran.
- Undvik glansigt papper eftersom det ger reflektioner i bilden. Detta försämrar resultatet av OCR-behandlingen. Om glansigt papper skall behandlas rekommenderas att ljuset från enheten stängs av.
- Vissa teckensnitt kan vara svårtolkade för OCR-motorn.
- Det är viktigt att textens kontrast är tillräcklig.

Alfabetiskt index

Använda mjukvaran	12
Applikationsinställningar	26
EUC.....	31
Funktioner via menyer.....	12
Funktioner via tangentbordet	21
Informations- och inställningsfönster.....	25
Installation av mjukvaran.....	7
Inställningar för kortkommandon.....	29
Introduktion av MagniLink ChromeViewer	6
Kamera-flik	12
Kvalitet på OCR-behandling	32
Licensiering.....	11
LVI-kamera	12
Minimala systemkrav	6
Notepad-flik.....	19
OCR-flik	17
OCR-inställningar	30
Om applikationen.....	25
Om LVI.....	5
Rekommenderade systemkrav	6
Styrning via musen	25
Videoinställningar.....	27