

MagniLink PRO





Condensed Income Statement

For the Year Ended December 31, 2018

	2018	2017
Sales	100,000	95,000
Cost of Sales	(40,000)	(38,000)
Gross Profit	60,000	57,000
Selling Expenses	(10,000)	(9,000)
Administrative Expenses	(15,000)	(14,000)
Interest Expense	(2,000)	(1,500)
Income Before Taxes	33,000	32,500
Income Tax Expense	(8,250)	(8,125)
Net Income	24,750	24,375

Das System am Arbeitsplatz

MagniLink PRO bietet eine einzigartige Vielfalt an kundenorientierten Lösungen am sehbehindertengerechten Arbeitsplatz. Die herausragenden Funktionalitäten der kombinierten Lese- und Distanzkamera mit Full HD sind USB 3.0 und HDMI-Anschluss, einfache Handhabung und die Option, Texte über ein TTS-Modul (Text-to-Speech) vorlesen zu lassen.

Sehen Sie alles, was Sie sehen müssen

Die hochwertige Full HD-Kamera zeigt sowohl im Lese-, Raum- oder im Spiegelmodus jedes Detail. Die Kamera verfügt über einen Schwenkbereich von 270°, einen abschaltbaren Autofokus sowie einen manuellen Fokus. Die integrierte Beleuchtung ist dimm- und abschaltbar.

Umfassende Wahlfreiheit

MagniLink PRO kann über USB 3.0 und der kameraeigenen Software mit einem PC, Mac oder Chromebook verbunden werden. Selbstverständlich ist auch der digitale Anschluss an einen separaten Monitor möglich. Wählen Sie die Option, die im jeweiligen Augenblick am besten passt und erhalten Sie uneingeschränkte Möglichkeiten für Ihre Nutzung!


Bild- und Videoaufnahmen sind mit MagniLink PRO einfach auf Knopfdruck möglich und ermöglichen das spätere Studieren der Aufnahmen.

Überall einsetzbar

MagniLink PRO ist durch die Portabilität überall einsetzbar. Auf dem Schreibtisch aufgebaut, beansprucht das System wenig Stellfläche und bietet ein sehr stabiles Bild. Bei Bedarf lässt sich MagniLink PRO zusammenklappen und abbauen. Im Akku betrieb steht das System wirklich überall bis zu 9 Stunden zur Verfügung – egal ob in der Besprechung oder im Termin.


Viel Platz


Mit einer Arbeitshöhe von 46 cm können Sie völlig unbehindert unter der Kamera in größeren Büchern und Ordnern blättern.

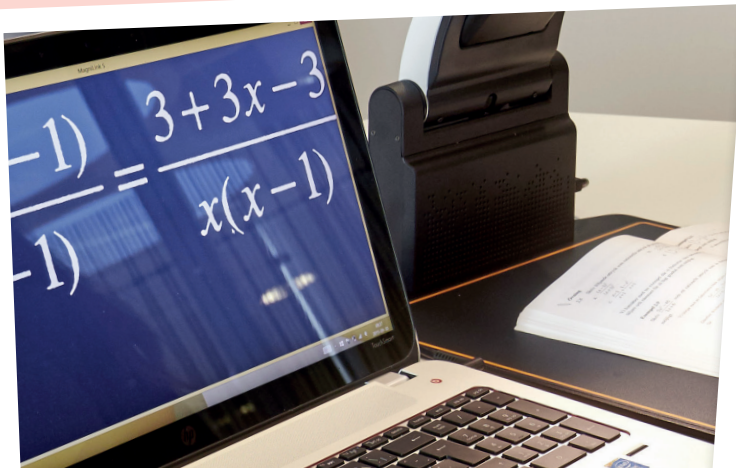

Sie entscheiden

Die mitgelieferte Software steuert für Sie alle Funktionen der Lesekamera, z. B. die Vergrößerungsstufe, Hochkontrastfarben und Helligkeit, so dass die Wiedergabe möglichst genau Ihren persönlichen Anforderungen entspricht. Und Sie können Ihre MagniLink PRO noch weiter individuell anpassen, indem Sie verschiedenes Zubehör für eine noch praktischere Nutzung auswählen.

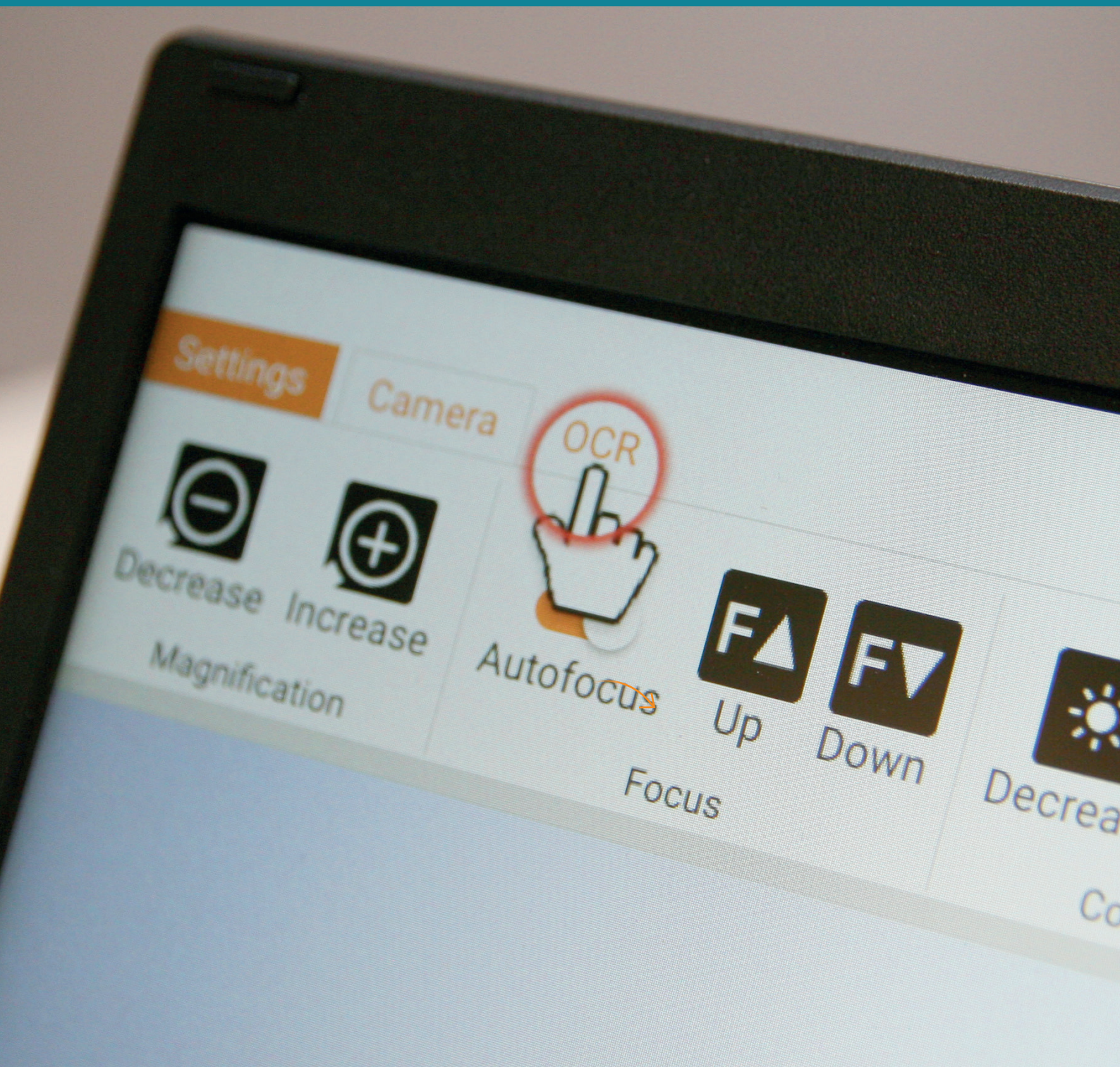

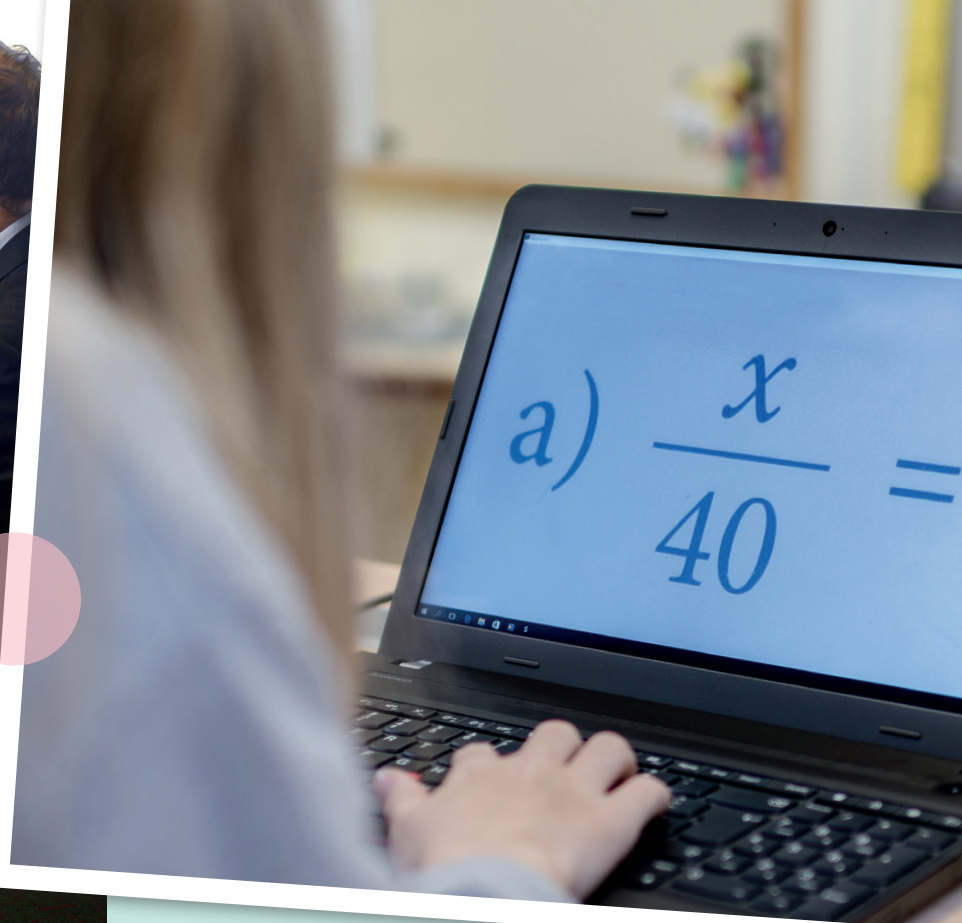


Text to Speech

Die mitgelieferte Software wird für die Anzeige von Bildern Ihrer MagniLink PRO auf einem PC, Mac oder Chromebook genutzt. Optional enthält die Software eine Text-zu-Sprache-Funktion TTS (Text to Speech). Diese Funktion ermöglicht das Vorlesen durch eine OCR-Erkennung eines Textes. Der OCR-verarbeitete Text kann in verschiedenen Wiedergabemodi angezeigt werden, beispielsweise Wort für Wort oder Zeile für Zeile. Gleichzeitig ist der Text mit der Sprachausgabe synchronisiert. MagniLink Pro verarbeitet auf Knopfdruck Texte aus dem aktuellen Livebild, aber natürlich auch Texte aus schon gespeicherten Dokumenten. Auch können Sie Text direkt in das Programm einzufügen („copy/paste“), um ihn laut vorlesen zu lassen. Lassen Sie sich doch Text parallel zum Lesen laut vorlesen – das sorgt für ein verbessertes Leseverständnis und mehr Ausdauer beim Lesen.

Kompatibilität

Die Software ist mit Vergrößerungsprogrammen wie zum Beispiel ZoomText und SuperNova kompatibel.

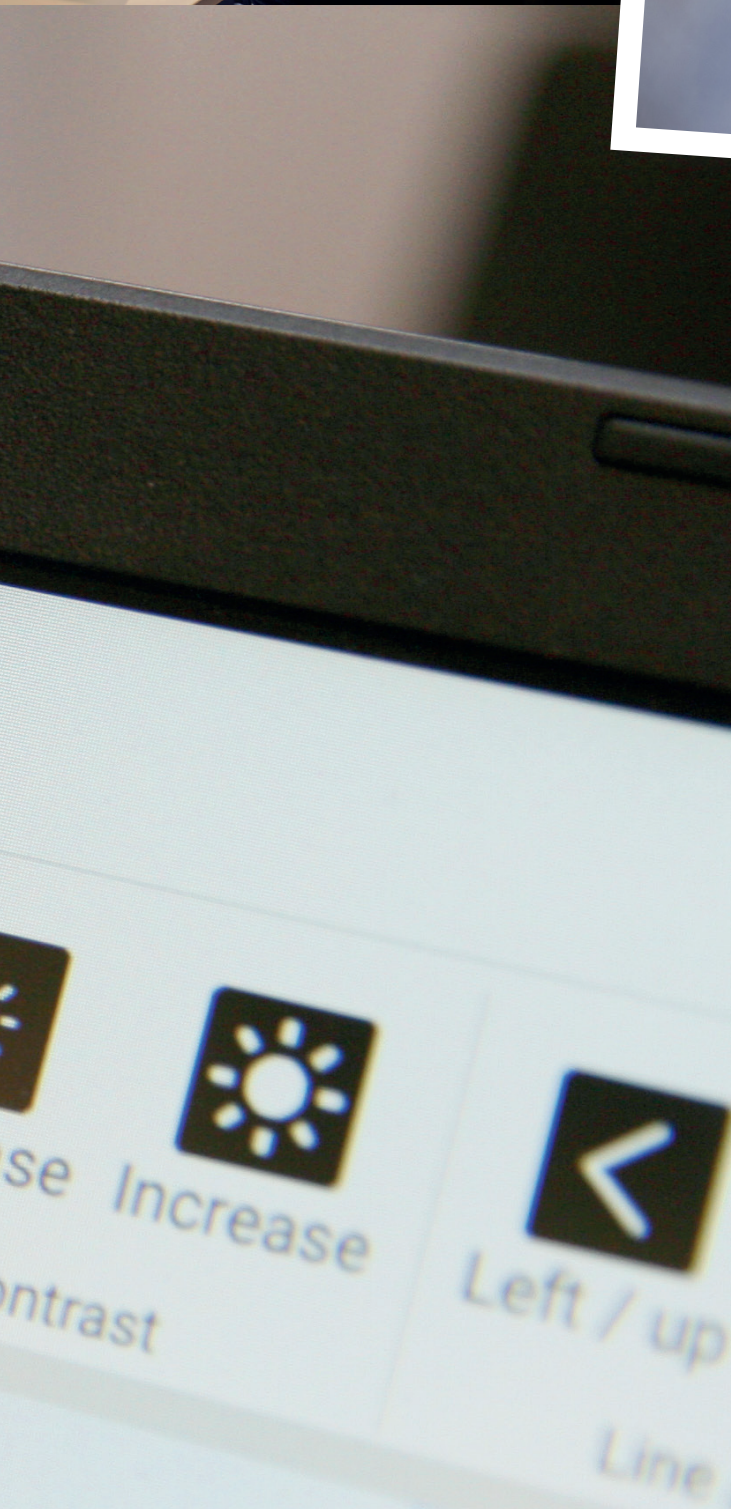



Ein Lesetisch macht es einfacher

Wählen Sie den andockbaren und stabilen Lesetisch mit Reibungsbremsen in X/Y-Richtung. Der Lesetisch erleichtert insbesondere bei längeren Texten das Lesen.

Monitor Ihrer Wahl

Hochwertiger Monitor von LVI, speziell entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und ausgezeichneten Kontrast, helle Kanten und ein Design, das zu Ihrem MagniLink PRO passt.

Zwei-Kamera-Lösung

In bestimmten Situationen ist eine Lösung mit zwei Kameras optimal. In diesem Fall können Sie Ihre MagniLink PRO leicht mit einer externen Distanzkamera kombinieren.



Technische Daten

Modell

MagniLink PRO Full HD

Anschlüsse

USB 3.0 (type C), HDMI

Kameraauflösung

FHD: 1920 x 1080

Vergrößerungsbereich

FHD: 1.1x-70x* (23" Monitor)

Freie Arbeitshöhe

42,5-46 cm

Farbmodi

Echtfarbdarstellung, 6 Kontrastfarben
(positiv/negativ)

Anzeigemodi

Lesen (links/rechts), Distanz, Spiegelmodus

Bildfrequenz

60 digitale Vollbilder/Sekunde

Kompatibilität

PC: ZoomText 10.X oder höher, Dolphin
SuperNova 12 oder höher

Systemvoraussetzungen

PC: Windows 7 oder höher
Mac: Mac OSX 10.6 oder höher
Chromebook: Chrome OS 59 oder höher

Abmessungen

Zusammengeklappt: 33 x 47 x 17 cm
Aufgeklappt: 33 x 38 x 52 cm

Gewicht (ohne Akku)

4,2 kg

* Einstellungen sind über die Software individuell konfigurierbar.

LVI Low Vision International ist als einer der weltweit führenden Hersteller von elektronisch vergrößernden Sehhilfen anerkannt mit der Mission, das tägliche Leben für Menschen mit Sehbehinderung angenehmer zu gestalten.

Wir sind zertifiziert nach ISO 14001 & 9001.



Intertek

MagniLink PRO 20220629

**BUNDESWEIT vor Ort,
Deutschland-Zentrale:**

LVI Deutschland GmbH
Bahnhofsplatz 1
21423 Winsen (Luhe)
Tel: 04171-66 938 44
Fax: 04171-66 938 45
E-mail: info@lvideutschland.de
WWW.LVIDEUTSCHLAND.DE



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE